

UTILIZARE PREVĂZUTĂ:

Produsul este utilizat pentru transportul pacienților pe scări, în situații de urgență sau în situații care necesită îndepărtarea rapidă și sigură a pacientului. Trebuie utilizat exclusiv de către personal calificat și instruit, instruit în îngrijirea „de urgență”. Poate fi utilizat în ambulanțe, spitale și medii sportive.

ATENȚIE (!) :

- În caz de problemă, NU utilizați produsul până când nu este reparat și contactați reprezentantul autorizat și instruit.
- Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele specificate în acest manual este interzisă.
- MOBIAK S.A. își declină orice răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din utilizarea diferită de cea menționată în acest manual.
- MOBIAK S.A. își rezervă dreptul de a efectua modificări ale produsului și ale manualului următor fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți caracteristicile acestuia.
- Există posibilitatea unei abateri a dimensiunilor produselor în intervalul de ±3%.
- Se recomandă întotdeauna respectarea procedurilor concepute pentru a gestiona situațiile de urgență.
- Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate provoca vătămări pacientului.

AVERTISMENTE GENERALE:

- NU utilizați acest produs sau orice echipament opțional disponibil fără a fi citit și înțeles în prealabil integral acest manual de utilizare.
- Dacă nu înțelegeți avertismentele, precauțiile sau instrucțiunile, contactați un profesionist din domeniul sănătății, un distribuitor sau personal tehnic înainte de a încerca să utilizați dispozitivul, în caz contrar putând rezulta vătămări corporale sau daune materiale.
- CITIȚI cu atenție întregul manual înainte de a utiliza produsul.
- Vă rugăm să păstrați acest formular pentru utilizare ulterioară.
- Produsul trebuie utilizat numai de către personal calificat.
- A se păstra produsul departe de sursele de căldură.
- Fiți atenți când sunt copii în preajmă și NU lăsați copiii să se joace cu produsul.
- Este necesară întotdeauna o atenție deosebită acolo unde există piese mobile care pot provoca prinderea membrelor și rănirea acestora.

ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE:

1. Verificați dacă rama este deteriorată pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului (nu există crăpături sau rupturi în cadru).
2. În caz de deteriorare, nu utilizați produsul și contactați reprezentantul autorizat și instruit.
3. Verificați dacă produsul este asamblat corect și dacă toate șuruburile sunt fixate și strânse.
4. Verificați întotdeauna starea de uzură a pieselor mecanice pentru a asigura utilizarea în deplină siguranță a produsului pentru persoane și obiecte.
5. Verificați periodic durabilitatea și stabilitatea.

UTILIZAREA PRODUSULUI:

Deschide targa.

Mutați cu succes pacientul pe targă și fixați-l cu centura.

Ridicați cotierele pe măsură ce mutați targa pe scări și coborâți-le când targa este pe podea.

Țineți de mânerul pliabil situat în spate și de mânerul reglabil de pe partea inferioară a targii (se recomandă utilizarea produsului de către 2 persoane) pentru un transport ușor.

Așezați șinele într-o poziție paralelă cu scările atunci când urcați sau coborâți. Când ajungeți la un teren plat, așezați targa în poziție verticală, cu roțile atingând solul.

CURĂȚARE ȘI DEZINFECTIE:

- Folosiți doar o cârpă umedă și săpun delicat pe suprafețele care necesită curățare. Apoi uscați bine înainte de a utiliza produsul.
- NU lăsați produsul umed.
- Nu folosiți produse chimice de curățare pentru a curăța cadrul. Acest lucru poate deteriora suprafața de acoperire a produsului.
- Nu folosiți niciodată acizi, alcali sau solvenți precum acetona.
- Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor
- Protejați produsul de abraziuni, tăieturi și înțepături

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:

Declarăm pe propria noastră responsabilitate că Dispozitivele Medicale menționate în această declarație sunt din Categoria de Risc Scăzut (Clasa de Risc I) și îndeplinesc cerințele Regulamentului European 745/2017 și, acolo unde este cazul, standardele și legislația menționate.

PROTECȚIA MEDIULUI:



Dacă constatați că produsul dumneavoastră trebuie înlocuit sau nu vă mai este util, luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu alte deșeuri municipale (aceasta este semnificația simbolului de reciclare).
- 2) Contactați autoritățile municipale pentru a vă indica punctele unde puteți elimina produsul pentru reciclare.
- 3) Prin eliminarea produsului care nu mai este util la punctul de reciclare corect, contribuiți la protejarea mediului și la reutilizarea materialelor din care este compus produsul dumneavoastră.

RAPORT DE INCIDENT:

Orice incident grav care apare în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care locuiește utilizatorul și/sau pacientul.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ:

Produsul este utilizat pentru transportul pacienților pe scări, în caz de urgență sau în situații care necesită o evacuare rapidă și sigură a pacientului. Trebuie utilizat exclusiv de către personal profesionist și calificat, instruit corespunzător pentru îngrijiri de urgență. Poate fi utilizat în ambulanțe, spitale și medii sportive.

AVERTISMENT (!)

- În caz de deteriorare sau funcționare defectuoasă a produsului, NU utilizați produsul și vă rugăm să contactați reprezentantul autorizat și instruit.
- Nu utilizați produsul în scopuri care nu sunt indicate în acest manual.
- MOBIAK SA își declină orice responsabilitate pentru orice consecințe rezultate din utilizarea incorectă a acestui produs și din modificarea neautorizată a cadrului produsului.
- MOBIAK SA își rezervă dreptul de a modifica informațiile conținute în acest document fără notificare prealabilă.
- Există o abatere de ± 3% pentru dimensiunile produselor.
- Se recomandă întotdeauna respectarea procedurilor concepute pentru intervenția în caz de urgență.
- Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate provoca vătămări pacientului.

AVERTISMENTE GENERALE:

- Dacă nu citiți acest manual de utilizare, este de preferat să nu utilizați acest dispozitiv sau o altă piesă disponibilă.
- Dacă nu înțelegeți modul de utilizare sau precauțiile, vă rugăm să contactați distribuitorul sau persoana tehnică competentă înainte de a utiliza dispozitivul, deoarece acest lucru poate provoca daune.
- CITIȚI cu atenție întregul manual înainte de a utiliza produsul.
- Păstrați acest document pentru referințe viitoare.
- Produsul trebuie utilizat numai de către personal calificat.
- A se păstra produsul departe de sursele de căldură.
- Fiți atenți când se află copii în apropiere și nu le permiteți să se joace sau să utilizeze dispozitivul.
- Este necesară întotdeauna o atenție deosebită acolo unde există piese mobile care pot provoca prinderea sau rănirea membrelor.

ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE:

1. Verificați dacă rama este deteriorată pentru a garanta o utilizare în siguranță a produsului (nu există crăpături sau fracturi în cadru).
2. În caz de deteriorare, nu utilizați produsul și contactați distribuitorul pentru instrucțiuni suplimentare.
3. Verificați dacă produsul este asamblat corect și dacă toate șuruburile sunt fixate și bine înșurubate.
4. Verificați întotdeauna starea de uzură a pieselor mecanice pentru a asigura utilizarea în siguranță absolută a produsului pentru persoane și obiecte.
5. Verificați periodic rezistența și stabilitatea acestuia.

UTILIZAREA PRODUSULUI:

Deschide targa.

Mutați cu succes pacientul pe targă și fixați-l cu centura de siguranță.

Ridicați cotierele pe măsură ce urcați scaunul de scară pe scări și coborâți-le când scaunul de scară este pe podea.

Țineți de mânerul pliabil situat în spate și de mânerul reglabil din partea inferioară a targii (se recomandă utilizarea produsului de către 2 persoane) pentru un transport ușor.

Așezați șinele într-o poziție paralelă cu scările atunci când urcați sau coborâți. Când ajungeți la nivelul solului, așezați scaunul de scară în poziție verticală, cu roțile atingând

CURĂȚARE ȘI DEZINFECTIE:

- Folosiți doar o cârpă umedă și săpun delicat pe suprafețele care necesită curățare. Apoi uscați bine înainte de a utiliza produsul.
- A se usca ferit de lumina directă a soarelui.
- NU lăsați produsul umed.
- Nu folosiți produse chimice de curățare pentru a curăța cadrul. Acest lucru ar putea deteriora suprafața produsului.
- Nu folosiți niciodată acizi, alcali sau solvenți precum acetona
- Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor.
- Protejați articolul de zgârieturi, tăieturi și perforații.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:

Suntem singurii responsabili pentru declararea faptului că Dispozitivele Medicale menționate în această declarație sunt din Clasa de Risc Scăzut (Clasa I) și respectă cerințele Regulamentului European 745/2017 și, acolo unde este cazul, standardele și legislația la care se face referire.

PROTECȚIA MEDIULUI:



Dacă într-o zi descoperiți că produsul dumneavoastră trebuie înlocuit sau nu mai funcționează pentru dumneavoastră, luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor publice (aceasta este și semnificația semnului de reciclare afișat).
- 2) Contactați autoritățile publice, care vă vor informa cu privire la centrele de reciclare la care trebuie eliminat produsul dumneavoastră.
- 3) Eliminarea corectă a produsului dumneavoastră ajută la protejarea mediului, precum și la reciclarea componentelor produsului.

RAPORTARE INCIDENTE:

Orice incident grav care apare în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și unei autorități competente din statul membru în care locuiește utilizatorul și/sau pacientul.

CARACTERISTICI TEHNICE

COD MBK	MATERIALUL RAMEI/ MATERIALUL RAMEI	SARCINĂ MAXIMĂ/ CAPACITATE MAXIMĂ DE ÎNCĂRCARE
0805976	ALUMINIU	159 kg

DIMENSIUNI DESCHISE/ DIMENSIUNI DESCHISE	DIMENSIUNI ÎNCHISE/ DIMENSIUNI ÎNCHISE	DIMENSIUNI CUTIE/ DIMENSIUNILE CUTIEI
163 × 51 × 118 cm	106 × 51 × 30 cm	109 × 55 × 31 cm

PIESE ÎN CUTIE/ BUCĂȚI PE CUTIE	GREUTATE BRUTĂ PRODUS GREUTATE BRUTĂ	GREUTATE NETĂ PRODUS/ PRODUSE NET GREUTATE
1	24 kg	21 kg

- Proiectat cu șine speciale, pentru transport convenabil și sigur pe scări.
- Ușor și pliabil
- Curățare și dezinfecție ușoară
- Echipat cu patru roți de cauciuc rezistente la uzură
- Poate fi folosită și ca targă cu roți pe teren plat.

GARANȚIE:

Produsul este garantat să funcționeze corect timp de (2) ani de la data achiziției. Garanția acoperă defectele din fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, întreținerea defectuoasă, modificarea, abuzul sau nerespectarea instrucțiunilor produsului. De asemenea, NU acoperă piesele consumabile și orice s-ar putea uza în timpul utilizării sau în timp. De asemenea, nu sunt acoperite de garanție daunele sau defectele cauzate de: dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare cu energie electrică (unde este prevăzută) și companii de transport. Nicio lucrare sau piesă nu este acoperită decât dacă a fost inspectată de un centru de service autorizat sau de producătorul produsului. Costurile de transport pentru inspecție sunt suportate de utilizator sau client sau de către comerciant.

GARANȚIE:

Produsul este garantat pentru o perioadă de doi (2) ani de la data achiziției. Garanția se aplică defectelor din fabrică și NU se aplică daunelor rezultate din utilizarea necorespunzătoare, întreținerea defectuoasă, modificarea, utilizarea excesivă sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare ale produsului. De asemenea, NU SE aplică pe piesele care se pot uza în timpul utilizării sau în timp. Daunele sau defectele cauzate de dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare cu energie electrică (unde este cazul) și transportatori nu sunt acoperite de garanție. Nicio piesă de service sau de schimb nu se aplică decât dacă a fost inspectată de un departament de service autorizat sau de producătorul produsului. Costurile de transport pentru bunurile aflate în garanție vor fi suportate de către utilizatorul final-client sau de către distribuitor.

FORMULAR DE GARANȚIE:

DETALII CUMPĂRĂTOR:	
NUMELE COMPLET NUMELE COMPLET:	
DATA ACHIZIȚIEI DATA ACHIZIȚIEI:	
TELEFON / TELEFON:	
NUMĂR DE LOT SAU SERIE:	
DETALII DEALER	
MARCĂ / NUMELE COMPLET:	
ADRESĂ / ADRESA:	
TELEFON / TELEFON:	
SIGILIU ȘI SEMNĂTURĂ MAGAZIN / SEMNĂTURĂ ȘI SEMNĂTURĂ	

Interpretarea simbolurilor de pe eticheta de pe cutie sau din instrucțiunile de utilizare ale produsului
Descrierea simbolurilor care au fost imprimate pe etichetă, cutie principală și/sau manualul de utilizare



KATAΣKEYΑΣTHΣ
MANUFACTURER



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
PRODUCT NUMBER



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΧΡΗΣΗΣ
READ THE INSTRUCTION FOR
USE



ΣΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE
CE MARK



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
PRODUCTION DATE



ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
MEDICAL DEVICE



ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ
BATCH NUMBER



ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΑΝ
ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ
DO NOT USE IF PACKAGE IS
DAMAGE



Μοναδικός αναγνωριστικός
κωδικός προϊόντος
Unique Device Identification



ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ
IN DOOR USE ONLY




ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ
HANDLE WITH CARE



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
WASTE ELECTRICAL AND
ELECTRONIC EQUIPMENT DIRECTIVE

CARACTERISTICI TEHNICE

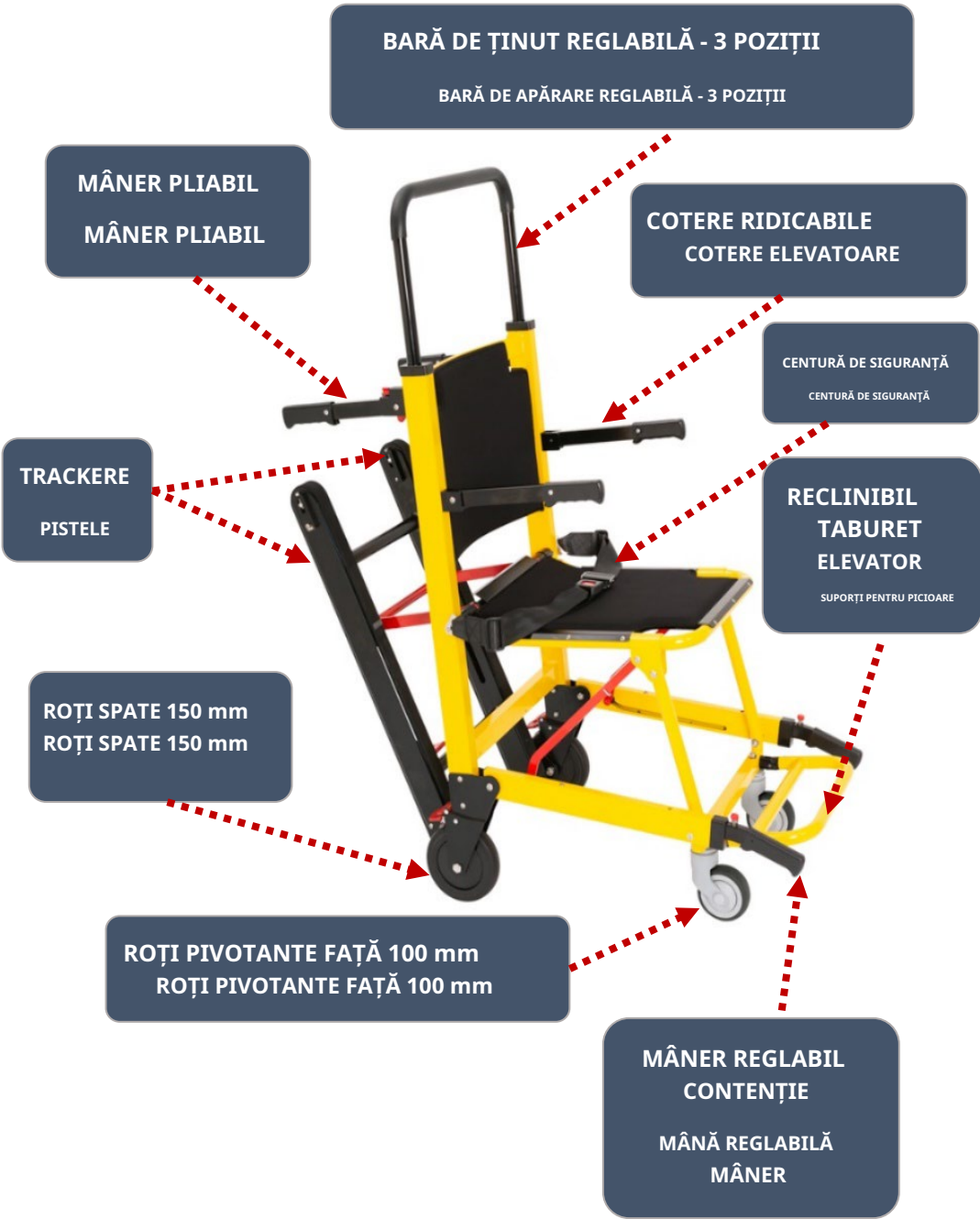

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: SCAUN URCĂTOR DIN ALUMINIU

MANUAL DE UTILIZARE: URCĂTOR DE SCĂRI

REF : 0805976



MBK COD	DESCRIERE EN	DESCRIERE EN
0805976	SCAUN CU PURTĂTOR DIN ALUMINIU PENTRU SCĂRI	SCĂRĂTOR DE SCĂRI

 MOBIAK S.A
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com

