

#### UTILIZARE PREVĂZUTĂ:

Produsul este utilizat pentru transportul pacienților pe scări, în situații de urgență sau în situații care necesită îndepărtarea rapidă și sigură a pacientului. Trebuie utilizat exclusiv de către personal calificat și instruit, instruit în îngrijirea „de urgență”. Poate fi utilizat în ambulanțe, spitale și medii sportive.

#### INDICATII:

Pentru transportul pacienților, indiferent de vârstă și sex, în situații de urgență sau în situații care necesită îndepărtarea rapidă și sigură a pacientului.

Trebuie utilizat exclusiv de către personal specializat și calificat, instruit în cazuri de „urgență”.

#### CONTRAINDICATII:

Utilizarea sa de către personal nespecializat și neinstruit este contraindicată.

Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate provoca vătămări pacientului.

Dacă suprafața este deteriorată (există crăpături sau rupturi), nu utilizați produsul.

#### ATENȚIE (!) :

- În caz de problemă, NU utilizați produsul până când nu este reparat și contactați reprezentantul autorizat și instruit.
- Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele specificate în acest manual este interzisă.
- MOBIAS S.A. își declină orice răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din utilizarea diferită de cea menționată în acest manual.
- MOBIAS S.A. își rezervă dreptul de a efectua modificări ale produsului și ale manualului următor fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți caracteristicile acestuia.
- Există posibilitatea unei abateri a dimensiunilor produselor în intervalul de  $\pm 3\%$ .
- Se recomandă întotdeauna respectarea procedurilor concepute pentru a gestiona situațiile de urgență.
- Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate provoca vătămări pacientului.

#### AVERTISMENTE GENERALE:

- NU utilizați acest produs sau orice echipament opțional disponibil fără a fi citit și înțeles în prealabil integral acest manual de utilizare.
- Dacă nu înțelegeți avertismentele, precauțiile sau instrucțiunile, contactați un profesionist din domeniul sănătății, un distribuitor sau personal tehnic înainte de a încerca să utilizați dispozitivul, în caz contrar putând rezulta vătămări corporale sau daune materiale.
- CITIȚI cu atenție întregul manual înainte de a utiliza produsul.
- Vă rugăm să păstrați acest formular pentru utilizare ulterioară.
- Produsul trebuie utilizat numai de către personal calificat.
- A se păstra produsul departe de sursele de căldură.
- Fiți atenți când sunt copii în preajmă și NU lăsați copiii să se joace cu produsul.
- Este necesară întotdeauna o atenție deosebită acolo unde există piese mobile care pot provoca prinderea membrelor și rănirea acestora.

#### ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE:

1. Verificați dacă rama este deteriorată pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului (nu există crăpături sau rupturi în cadru).
2. În caz de deteriorare, nu utilizați produsul și contactați reprezentantul autorizat și instruit.
3. Verificați dacă produsul este asamblat corect și dacă toate șuruburile sunt fixate și strânse.
4. Verificați întotdeauna starea de uzură a pieselor mecanice pentru a asigura utilizarea în deplină siguranță a produsului pentru persoane și obiecte.
5. Verificați periodic durabilitatea și stabilitatea.

#### CURĂȚARE ȘI DEZINFECTIE:

- Folosiți doar o cârpă umedă și săpun delicat pe suprafețele care necesită curățare. Apoi uscați bine înainte de a utiliza produsul.
- NU lăsați produsul umed.
- Nu folosiți produse chimice de curățare pentru a curăța cadrul. Acest lucru poate deteriora suprafața de acoperire a produsului.
- Nu folosiți niciodată acizi, alcali sau solvenți precum acetona.
- Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor
- Protejați produsul de abraziuni, tăieturi și înțepături

#### DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:

Declarăm pe propria noastră răspundere că Dispozitivele Medicale menționate în această declarație sunt din Categoria de Risc Scăzut (Clasa de Risc I) și îndeplinesc cerințele Regulamentului European 2017/745 și, acolo unde este cazul, standardele și legislația menționate.

#### PROTECȚIA MEDIULUI:



Dacă constatați că produsul dumneavoastră trebuie înlocuit sau nu vă mai este util, luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu alte deșeuri municipale (aceasta este semnificația simbolului de reciclare).
- 2) Contactați autoritățile municipale pentru a vă indica punctele unde puteți elimina produsul pentru reciclare.
- 3) Prin eliminarea produsului care nu mai este util la punctul de reciclare corect, contribuiți la protejarea mediului și la reutilizarea materialelor din care este compus produsul dumneavoastră.

#### RAPORT DE INCIDENT:

Orice incident grav care apare în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care locuiește utilizatorul și/ sau pacientul.

#### UTILIZARE PREVĂZUTĂ:

Produsul este utilizat pentru transportul pacienților pe scări, în caz de urgență sau în situații care necesită o evacuare rapidă și sigură a pacientului. Trebuie utilizat exclusiv de către personal profesionist și calificat, instruit corespunzător pentru îngrijiri de urgență. Poate fi utilizat în ambulanțe, în spitale și în medii sportive.

#### INDICATII:

Pentru transportul pacienților, indiferent de vârstă și sex, în situații de urgență sau în situații care necesită îndepărtarea rapidă și sigură a pacientului.

Trebuie utilizat exclusiv de către personal specializat și instruit, instruit în cazuri de „urgență”.

#### CONTRAINDICATII:

Este contraindicată utilizarea de către personal nespecializat și neinstruit.

Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate provoca vătămări pacientului.

Dacă suprafața este deteriorată (crăpături sau rupturi), nu utilizați produsul.

#### AVERTISMENT (!)

- În caz de deteriorare sau funcționare defectuoasă a produsului, NU utilizați produsul și vă rugăm să contactați reprezentantul autorizat și instruit.
- Nu utilizați produsul în scopuri care nu sunt indicate în acest manual.
- MOBIAS SA își declină orice responsabilitate pentru orice consecințe rezultate din utilizarea incorectă a acestui produs și din modificarea neautorizată a cadrului produsului.
- MOBIAS SA își rezervă dreptul de a modifica informațiile conținute în acest document fără notificare prealabilă.
- Există o abatere de  $\pm 3\%$  pentru dimensiunile produselor.
- Se recomandă întotdeauna respectarea procedurilor concepute pentru intervenția în caz de urgență.
- Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate provoca vătămări pacientului.

#### AVERTISMENTE GENERALE:

- Dacă nu citiți acest manual de utilizare, este de preferat să nu utilizați acest dispozitiv sau o altă piesă disponibilă.
- Dacă nu înțelegeți modul de utilizare sau precauțiile, vă rugăm să contactați distribuitorul sau persoana tehnică competentă înainte de a utiliza dispozitivul, deoarece acest lucru poate provoca daune.
- CITIȚI cu atenție întregul manual înainte de a utiliza produsul.
- Păstrați acest document pentru referințe viitoare.
- Produsul trebuie utilizat numai de către personal calificat.
- A se păstra produsul departe de sursele de căldură.
- Fiți atenți când se află copii în apropiere și nu le permiteți să se joace sau să utilizeze dispozitivul.
- Este necesară întotdeauna o atenție deosebită acolo unde există piese mobile care pot provoca prinderea sau rănirea membrelor.

#### ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE:

1. Verificați dacă rama este deteriorată pentru a garanta o utilizare în siguranță a produsului (nu există crăpături sau fracturi în cadru).
2. În caz de deteriorare, nu utilizați produsul și contactați distribuitorul pentru instrucțiuni suplimentare.
3. Verificați dacă produsul este asamblat corect și dacă toate șuruburile sunt fixate și bine înșurubate.
4. Verificați întotdeauna starea de uzură a pieselor mecanice pentru a asigura utilizarea în siguranță absolută a produsului pentru persoane și obiecte.
5. Verificați periodic rezistența și stabilitatea acestuia.

#### CURĂȚARE ȘI DEZINFECTIE:

- Folosiți doar o cârpă umedă și săpun delicat pe suprafețele care necesită curățare. Apoi uscați bine înainte de a utiliza produsul.
- A se usca ferit de lumina directă a soarelui.
- NU lăsați produsul umed.
- Nu folosiți produse chimice de curățare pentru a curăța cadrul. Acest lucru ar putea deteriora suprafața produsului.
- Nu folosiți niciodată acizi, alcali sau solvenți precum acetona
- Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor.
- Protejați articolul de zgârieturi, tăieturi și perforații.

#### DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:

Suntem singurii responsabili pentru declararea faptului că Dispozitivele Medicale menționate în această declarație sunt din Clasa de Risc Scăzut (Clasa I) și respectă cerințele Regulamentului European 2017/745 și, acolo unde este cazul, standardele și legislația la care se face referire.

#### PROTECȚIA MEDIULUI:



Dacă într-o zi descoperiți că produsul dumneavoastră trebuie înlocuit sau nu mai funcționează pentru dumneavoastră, luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor publice (aceasta este și semnificația semnului de reciclare afișat).
- 2) Contactați autoritățile publice, care vă vor informa cu privire la centrele de reciclare la care trebuie eliminat produsul dumneavoastră.
- 3) Eliminarea corectă a produsului dumneavoastră ajută la protejarea mediului, precum și la reciclarea componentelor produsului.


#### RAPORTARE INCIDENTE:

Orice incident grav care apare în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și unei autorități competente din statul membru în care locuiește utilizatorul și/ sau pacientul.

CARACTERISTICI TEHNICE

- MATERIAL CADRU: ALUMINIU
- MATERIAL SPĂTAR ȘI ȘEZUT: PIELE OXFORD 602D (PE)
- CAPACITATE MAXIMĂ DE ÎNCĂRCARE: 180 KG
- PROIECTATE CU ȘINE SPECIALE, PENTRU UN TRANSPORT COMOD ȘI SIGUR PE SCĂRI
- CURĂȚARE ȘI DEZINFECȚIE UȘOARĂ
- ECHIPAT CU PATRU ROȚI DE CAUCIUC REZISTENTE LA UZURĂ
- LUNGIMEA MÂNERULUI PLIABIL RAR: 26CM
- LUNGIMEA MÂNERULUI REGLABIL ÎN FRONTAL CU BUTON: 15CM-35CM
- ÎNĂLȚIMEA BAREI DE APĂRARE REGLABILE: 108cm, 127cm, 146cm, 164cm
- GREUTATE NETĂ: 34 KG
- ÎNCĂRCĂTOR: 29,4 V, 2 A
- BATERIE: 24V / 13.2AH
- PUTERE DE FUNCȚIONARE: AC 100-240V 50/60Hz
- MOTOR: CC 24V / 120W
- CLASA DE PROTECȚIE IP: IP33

DIMENSIUNI (mm)

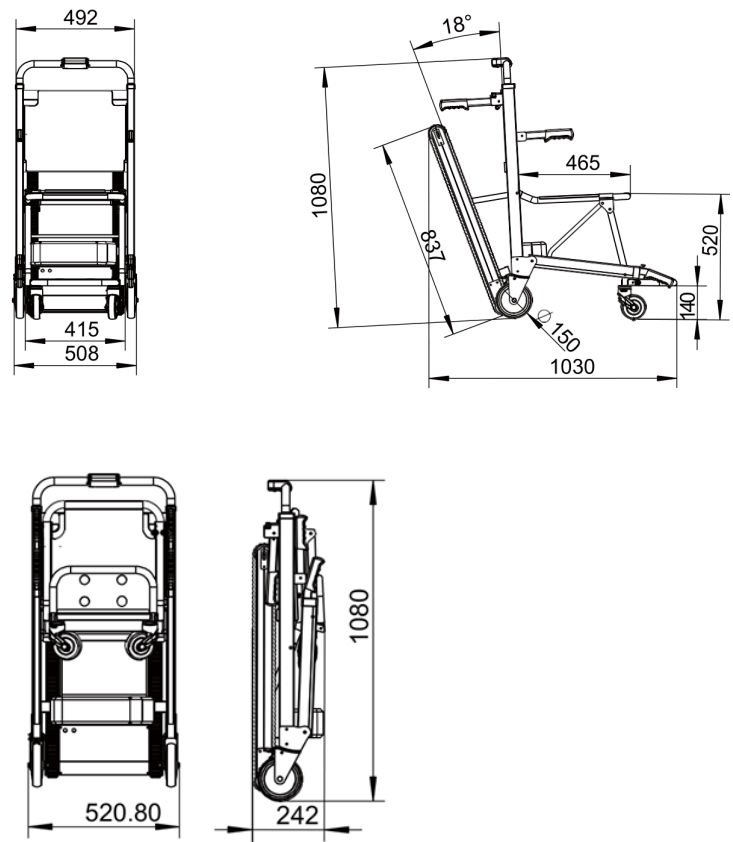

UTILIZAREA PRODUSULUI:

Deschide targa/  
Deschide targa

Deschideți cotierele

Deschideți spatele  
mănerile așa cum se arată,  
până când își asigură  
în poziția lor / Deschideți  
mănerile din spate așa cum se  
arată, până când se blochează  
în poziție.

Deschideți mânerile frontale  
apăsând butonul roșu  
buton până când  
Deschideți mânerile  
frontale apăsând butonul  
roșu până când se blochează  
în poziție.

Pentru a deschide șinele, apăsați pedala  
roșie de blocare.

Când targa este în poziția  
deschisă și așezată, bara  
reglabilă va  
trebuie să fie la poziția cu  
cea mai joasă înălțime/  
Când targa este în poziția  
deschisă și așezată, bara  
reglabilă trebuie să fie la  
înălțimea cea mai joasă

La urcarea sau coborârea  
scărilor, operatorul trebuie să  
ajusteze înălțimea cadrului  
mănerului telescopic aproape  
de înălțimea umerilor  
pacientului.

Pentru a mări înălțimea: Împingeți  
bara roșie de blocare spre interior și  
trageți mânerul la înălțimea  
corespunzătoare, apoi eliberați  
bara.  
Pentru a mări înălțimea: Împingeți  
bara roșie de blocare spre interior  
și trageți mânerul la înălțimea  
corespunzătoare, apoi eliberați  
bara de blocare până când mânerul  
se blochează la înălțimea  
corespunzătoare.

Pentru a coborî înălțimea: Împingeți  
bara roșie de blocare spre interior și  
coborâți mânerul la înălțimea  
corespunzătoare, apoi eliberați  
bara.  
Pentru a coborî înălțimea:  
Împingeți bara roșie de blocare  
spre interior și coborâți mânerul la  
înălțimea corespuanzătoare, apoi  
eliberați bara de blocare până când  
mânerul se blochează la înălțimea  
corespunzătoare.

Reglați tetiera la înălțimea  
corespunzătoare în funcție de  
înălțimea pacientului/ Reglați  
tetiera la înălțimea  
corespunzătoare, în funcție de  
la înălțimea pacientului.


După ce pasagerul s-a așezat, reglați  
centura de siguranță și fixați-o.

centura de siguranță și fixați-o.

Dacă șina devine prea întinsă  
sau prea slăbită, aceasta poate fi  
ajustată așa cum se arată,  
folosind cheia Allen furnizată./  
Dacă șina devine prea întinsă  
sau prea slăbită, aceasta poate fi  
ajustată așa cum se arată,  
folosind cheia Allen furnizată.



PANOU DE CONTROL

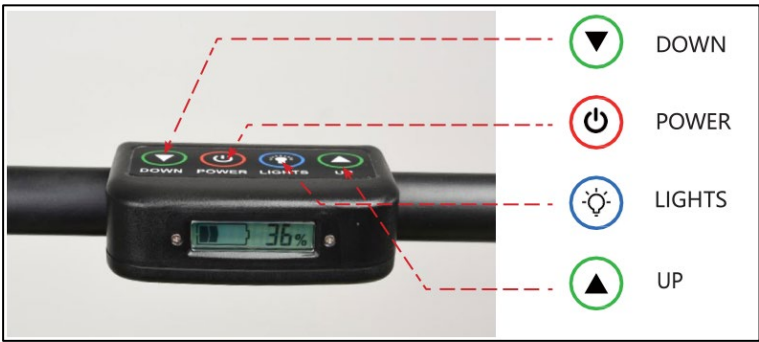

- APĂSAȚI BUTONUL DE LUMINI: AFIȘAJUL LED ANABEI
  - APĂSAȚI DIN NOU BUTONUL LUMINI: AFIȘAJUL LED SE STINGE
  - PENTRU A URCA SCĂRILE: APĂSAȚI CONTINU BUTONUL SUS
  - ÎNTRERUPE SAU OPRI ÎNCĂRCAREA: ELIBERAȚI BUTONUL SUS
  - PENTRU A COBOARĂ SCĂRILE: APĂSAȚI CONTINU BUTONUL DE JOS
  - ÎNTRERUPEȚI SAU OPRIȚI DESCĂRCAREA: ELIBERAȚI BUTONUL JOS
- 
- APĂSAȚI BUTONUL LUMINI: AFIȘAJUL LED ESTE PORNIT
  - APĂSAȚI DIN NOU BUTONUL LUMINI: AFIȘAJUL LED SE STINGE
  - PENTRU A URCA SCĂRILE: APĂSAȚI BUTONUL SUS CONTINU
  - PENTRU A ÎNTRERUPE SAU A OPRI URCAREA: ELIBERAȚI BUTONUL DE SUS
  - PENTRU A COBOARĂ SCĂRILE: APĂSAȚI BUTONUL DE COBORARE CONTINU
  - PENTRU A ÎNTRERUPE SAU A OPRI COBORSAREA: ELIBERAȚI BUTONUL DE JOS

ÎNCĂRCAREA ȘI INSTALAREA BATERIEI



Conectați adaptorul CC a1 la portul de încărcare a bateriei a3 (conectați celălalt capăt a2 la priza de alimentare) pentru încărcare și asigurați-vă că bateria este complet încărcată înainte de a utiliza targa. Când indicatorul bateriei a4 devine verde din roșu, înseamnă că bateria este complet încărcată.

- Încărcătorul reîncarcă bateria până la 100%.
- Dacă nivelul bateriei este mai mic de 25%, este necesară încărcarea.
- Nu dezasamblați și nu modificați încărcătorul.
- Asigurați-vă că încărcătorul nu este expus la umezeală în timpul încărcării bateriei.
- Nu atingeți niciodată ștecherul cu mâinile ude.
- Bateria trebuie verificată și încărcată înainte de utilizare și cel puțin la fiecare 2 săptămâni.
- Bateria trebuie încărcată după fiecare utilizare și poate fi încărcată direct pe produs sau oprită.

Conectați adaptorul CC a1 la portul de încărcare a bateriei a3 (conectați celălalt capăt a2 la priza de alimentare) pentru încărcare și asigurați-vă că bateria este complet încărcată înainte de a utiliza targa. Când indicatorul bateriei a4 devine verde din roșu, înseamnă că bateria este complet încărcată.

- Încărcătorul reîncarcă bateria până la 100%.
- Dacă nivelul bateriei este mai mic de 25%, este necesară încărcarea.
- Nu dezasamblați și nu modificați încărcătorul.
- Asigurați-vă că încărcătorul nu este expus la umezeală în timpul încărcării bateriei.
- Nu atingeți niciodată ștecherul cu mâinile ude.
- Bateria trebuie verificată și încărcată înainte de utilizare și cel puțin la fiecare 2 săptămâni.
- Bateria trebuie încărcată după fiecare utilizare și poate fi încărcată atât pe produs, cât și separat.



Fanta din interiorul bateriei trebuie să se alinieze cu adâncitura din cărucior. Împingeți bateria de-a lungul săgeții b1 până când se fixează în poziție cu un clic. Rotiți cheia în sensul acelor de ceasornic@180° pentru a bloca bateria în targă.

Rotiți cheia în sens invers acelor de ceasornic@Împingeți bateria la 180° înainte în direcția b2 pentru a o scoate.

Apăsați butonul din mijloc, unde există patru lumini roșii. Fiecare indică un nivel de încărcare al bateriei de 25%. Nu utilizați produsul atunci când este aprinsă o singură lumină roșie. Încărcați complet bateria și apoi utilizați-o.

Când indică o putere sau o tensiune scăzută, este necesară încărcarea.

Fanta din interiorul bateriei trebuie să se alinieze cu adâncitura din targă. Împingeți bateria de-a lungul săgeții b1 până când se fixează în poziție cu un clic. Rotiți cheia în sensul acelor de ceasornic.@180° pentru a bloca bateria în targă.

Rotiți cheia în sens invers acelor de ceasornic.@180° și împingeți bateria înainte în direcția b2 pentru a o scoate.

Apăsați butonul din mijloc, unde există patru lumini roșii. Fiecare indică un nivel de încărcare al bateriei de 25%. Nu utilizați produsul atunci când este aprinsă o singură lumină roșie. Încărcați complet bateria și apoi utilizați-o.

Când indică o putere sau o tensiune scăzută, este necesară încărcarea.



**Pornire -** Porniți comutatorul bateriei (I) așa cum se arată în f1, apăsați butonul POWER - se deschide afișajul LED - se afișează capacitatea rămasă a bateriei.


Pornire - Porniți comutatorul bateriei (I) așa cum se arată în f1, apăsați butonul POWER - se deschide afișajul LED - se afișează capacitatea rămasă a bateriei.

**Oprire alimentare -** Apăsați butonul POWER, afișajul LED se va stinge. Închideți comutatorul bateriei (O) așa cum se arată în f2.


Oprire - Apăsați butonul POWER, afișajul LED se va stinge. Închideți comutatorul bateriei (O) așa cum se arată în f2.

Bateria are două chei și acestea pot fi folosite pentru a o bloca pe unitate.

Bateria are două chei și acestea pot fi folosite pentru a o bloca pe unitate.

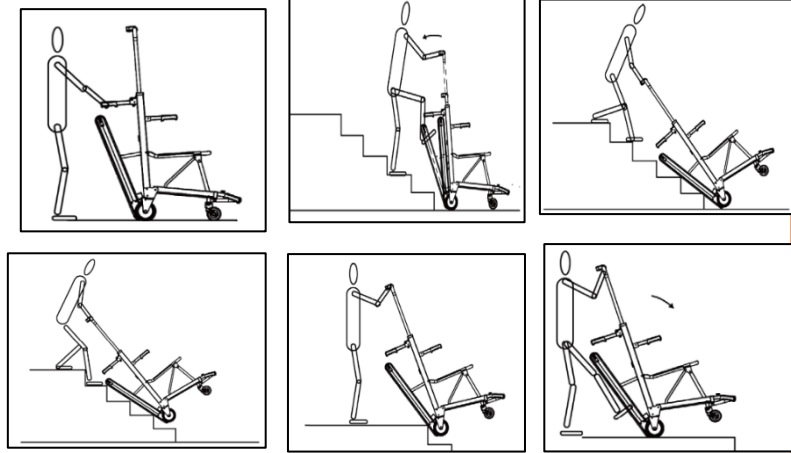

Prindeți mânerul din spate și împingeți targa până la următoarea scară. / Prindeți mânerul din spate și împingeți targa până la următoarea scară.

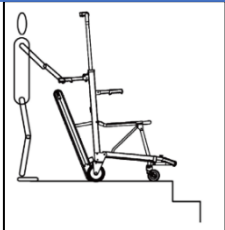

**GARANȚIE:**

Produsul este garantat să funcționeze corect timp de (2) ani de la data achiziției. Garanția acoperă defectele din fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, întreținerea defectuoasă, modificarea, abuzul sau nerespectarea instrucțiunilor produsului.

De asemenea, NU acoperă piesele consumabile și orice s-ar putea uza în timpul utilizării sau în timp.

De asemenea, nu sunt acoperite de garanție daunele sau defectele cauzate de: dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare cu energie electrică (unde este prevăzută) și companii de transport.

Nicio lucrare sau piesă nu este acoperită decât dacă a fost inspectată de un centru de service autorizat sau de producătorul produsului. Costurile de transport pentru inspecție sunt suportate de utilizator sau client sau de către comerciant.

**GARANȚIE:**

Produsul este garantat pentru o perioadă de doi (2) ani de la data achiziției.

Garanția se aplică defectelor din fabrică și NU se aplică daunelor rezultate din utilizarea necorespunzătoare, întreținerea defectuoasă, modificarea, utilizarea excesivă sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare ale produsului.

De asemenea, NU SE aplică pe piesele care se pot uza în timpul utilizării sau în timp. Daunele sau defectele cauzate de dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare cu energie electrică (unde este cazul) și transportatori nu sunt acoperite de garanție.

Nicio piesă de service sau de schimb nu se aplică decât dacă a fost inspectată de un departament de service autorizat sau de producătorul produsului. Costurile de transport pentru bunurile aflate în garanție vor fi suportate de către utilizatorul final-client sau de către distribuitor.

**FORMULAR DE GARANȚIE:**

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| DETALII CUMPĂRĂTOR:                                         |  |
| NUMELE COMPLET                                              |  |
| DATA ACHIZIȚIEI                                             |  |
| TELEFON /                                                   |  |
| NUMĂR DE LOT SAU SERIE:                                     |  |
| DETALII DEALER                                              |  |
| MARCĂ /                                                     |  |
| ADRESĂ /                                                    |  |
| TELEFON /                                                   |  |
| SIGILIU ȘI SEMNĂTURĂ<br>MAGAZIN /<br>SEMNĂTURĂ ȘI SEMNĂTURĂ |  |

Interpretarea simbolurilor de pe eticheta de pe cutie sau din instrucțiunile de utilizare ale produsului

Descrierea simbolurilor care au fost imprimate pe etichetă, cutie principală și/sau manualul de utilizare

**A URCĂ SCĂRILE**

Deschideți targa așa cum se arată, asigurați-vă că bateria este pornită, reglați bara de susținere reglabilă la înălțimea corespunzătoare.


Reglați distanța (30-40 cm) dintre roțile din spate și scară, înclinați încet mânerul înapoi până când șinele ating treptele scării.

Apăsăți butonul POWER pentru a începe ridicarea targii, între timp apăsați ușor ghidonul reglabil pentru a ca omizile să se blocheze pe treptele scării./Apăsăți butonul POWER pentru a începe ridicarea targii, între timp apăsați ușor bara de susținere reglabilă pentru a face ca targile să se lipească de treptele scării.

Apăsăți butonul SUS continuu și, în același timp, urcați scările. Dacă este necesară o pauză sau o oprire, eliberați butonul SUS.

Notă: când șinele sunt pe una sau două trepte, asigurați-vă că împingeți ușor în jos bara de susținere reglabilă pentru a preveni înclinarea targii înainte./ Notă: când șinele sunt pe una sau două trepte, asigurați-vă că împingeți ușor în jos bara de susținere reglabilă pentru a preveni înclinarea targii înainte.

Când toate roțile ajung la palierul scării, eliberați butonul SUS, apucați mânerul și aplecați-vă încet înainte pentru a aduce toate cele patru roți pe sol. / Când toate roțile ajung la palierul scării, eliberați butonul SUS, apucați mânerul și aplecați-vă încet înainte pentru a aduce toate cele patru roți pe sol.

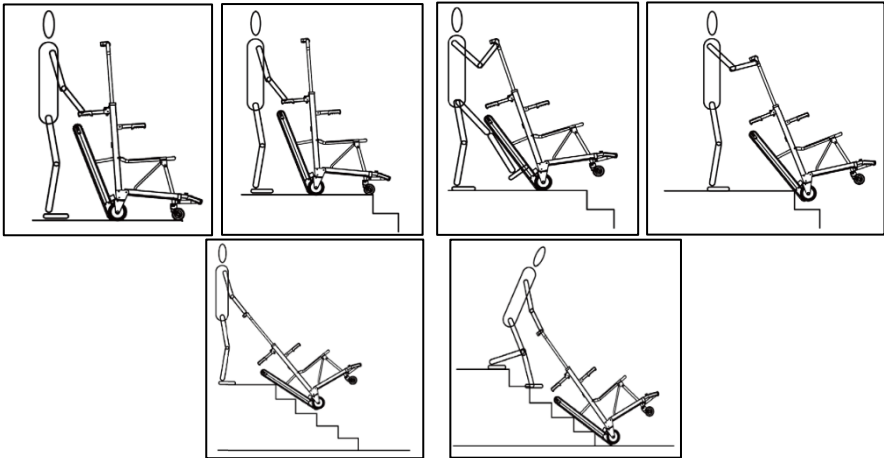

**COBORÂND SCĂRILE**







- Deschideți targa așa cum se arată, asigurați-vă că bateria este pornită, reglați bara de susținere reglabilă la înălțimea corespunzătoare.
- Împingeți targa spre scară, reglați targa și șinele așa cum se arată în imagine/ Împingeți targa spre scară, reglați targa și șinele așa cum se arată în imagine
- Când roțile din față ajung la marginea scărilor, înclinați targa înapoi până când șinele ating podeaua, așa cum se arată, apoi apăsați butonul JOS.
- După ce șinele acoperă prima treaptă, ajustați targa astfel încât șinele să acopere 2-3 trepte.
- Dacă este necesară o pauză sau o oprire, eliberați butonul JOS.
- Notă: când șinele acoperă una sau două trepte, împingeți ușor mânerul în jos pentru a împiedica înclinarea targii înainte./ Notă: când șinele acoperă una sau două trepte, împingeți ușor mânerul în jos pentru a împiedica înclinarea targii înainte.
- Când șinele ajung la podea la baza scărilor, eliberați butonul JOS, apoi înclinați încet targa înainte până când toate cele patru roți sunt pe podea.



REF : 0807110



| MBK COD | DESCRIERE EN                                             | DESCRIERE EN                            |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 0807110 | SUPORT DIN ALUMINIU CU SCĂRĂTOARE ELECTRICĂ CU ȘERNITURĂ | SCAUN ELECTRIC DE ALUMINIU PENTRU SCĂRI |

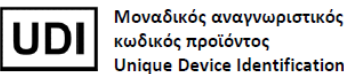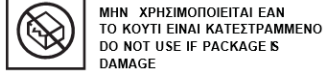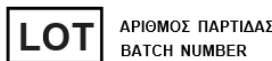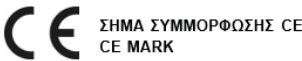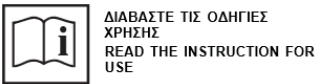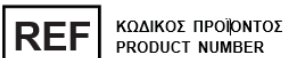

MOBIKAK S.A  
KATHIANA AKROTIRIOU, XANIA - KPHTH  
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE  
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



DATA EMISIUNII: 04/2025