

yuwell



Manual de utilizare

Serie de echipamente respiratorii

Mască cu perne nazale

YP-01

Utilizare indicată

O mască este un dispozitiv neinvaziv utilizat pentru a administra flux de aer (cu sau fără oxigen suplimentar) unui pacient dintr-o presiune pozitivă în căile respiratorii.

- Dispozitiv de presiune (PAP), cum ar fi presiunea pozitivă continuă a căilor respiratorii (CPAP) sau un sistem cu două niveluri.
- Masca este destinată utilizării de către pacienți (greutate >30 kg), fiind indicată pentru reutilizare de către pacient în mediul casnic.
- Masca este indicată pentru utilizarea de către un pacient într-un spital sau institut.

Contraindicații

Dacă utilizatorul are următoarele afecțiuni, atunci produsul poate să nu fie potrivit pentru utilizare. Se recomandă prudență la utilizarea acestuia. În orice caz, medicul este cel care decide dacă masca trebuie utilizată sau nu. Aceste afecțiuni includ:

- Operație recentă la ochi sau ochi uscați
- Glaucom
- Hernie hiatală
- Disfuncție a sfincterului cardiac, reflux excesiv, afectarea reflexului de tuse
- Vărsături
- Foliculită
- Tensiune arterială patologic scăzută
- Bypassul căilor respiratorii superioare
- Pneumotorax
- Diagnosticat cu sinuzită acută sau otită medie
- Risc de aspirare a conținutului gastric
- Alergie sau hipersensibilitate la materialele măștii sau la pacienții care nu pot îndepărta masca.

ATENȚIE

În Statele Unite, legea federală restricționează vânzarea acestui dispozitiv la medici sau la recomandarea unui medic.


AVERTIZĂRI

- Vă rugăm să citiți acest ghid înainte de utilizare.

- Orificiile de ventilație trebuie menținute curate.
- Explicație a avertismentului: Sistemele CPAP sunt destinate utilizării cu măști speciale, neatașate, care au orificii de ventilație pentru a permite fluxul continuu de aer din mască. Când aparatul CPAP este pornit și funcționează corect, aerul proaspăt din aparatul CPAP elimină aerul expirat prin orificiul de expirare al măștii atașate. Cu toate acestea, atunci când aparatul CPAP nu funcționează, nu va fi furnizat suficient aer proaspăt prin mască, iar aerul expirat va fi reînhalat. Reînhalarea aerului expirat timp de mai mult de câteva minute poate duce, în unele cazuri, la sufocare. Acest avertisment se aplică majorității modelelor de sisteme CPAP.
- În CPAP de joasă presiune, debitul prin orificiul de expirație poate fi insuficient pentru a elimina tot gazul expirat din tub. Este posibil să apară o reînspirare.
- Pentru a reduce la minimum riscul de vărsături în timpul somnului, pacientul trebuie să evite să mănânce sau să bea timp de trei ore înainte de utilizarea măștii. Această mască nu este recomandată dacă pacientul ia medicamente eliberate pe bază de rețetă care pot provoca vărsături.
- Această mască nu trebuie utilizată la pacienții care nu cooperează, sunt inconștienți, nu răspund la niciun gest sau nu își pot scoate masca.
- Respectați toate precauțiile atunci când utilizați oxigen suplimentar.
- Fluxul de oxigen trebuie oprit atunci când generatorul de debit nu funcționează, astfel încât acest oxigen neutilizat să nu se acumuleze în interiorul carcasei generatorului de debit și să creeze un pericol de incendiu.
- La un debit constant de oxigen suplimentar, concentrația de oxigen inspirat variază în funcție de setările de presiune, modelul de respirație al pacientului, mască, locul de aplicare și rata de scurgere.
- Specificațiile tehnice ale măștii sunt furnizate medicului dumneavoastră pentru a verifica compatibilitatea acesteia cu generatorul de debit. Dacă este utilizată dincolo de specificațiile tehnice sau cu dispozitive incompatibile, etanșarea și confortul măștii pot fi ineficiente, terapia optimizată poate să nu fie atinsă, iar scurgerile sau variația ratei de scurgere pot afecta funcționarea generatorului de debit.
- Întrerupeți utilizarea măștii și consultați medicul sau somnologul dacă aveți ORICE reacție adversă în urma utilizării măștii.


- Consultați manualul generatorului de debit pentru detalii despre setări și informații operaționale.
- Ca în cazul tuturor măștilor, este posibil să apară o anumită reînspirație în cazul CPAP cu presiune joasă.
- Îndepărtați toate ambalajele înainte de a utiliza masca.

Părți ale măștii

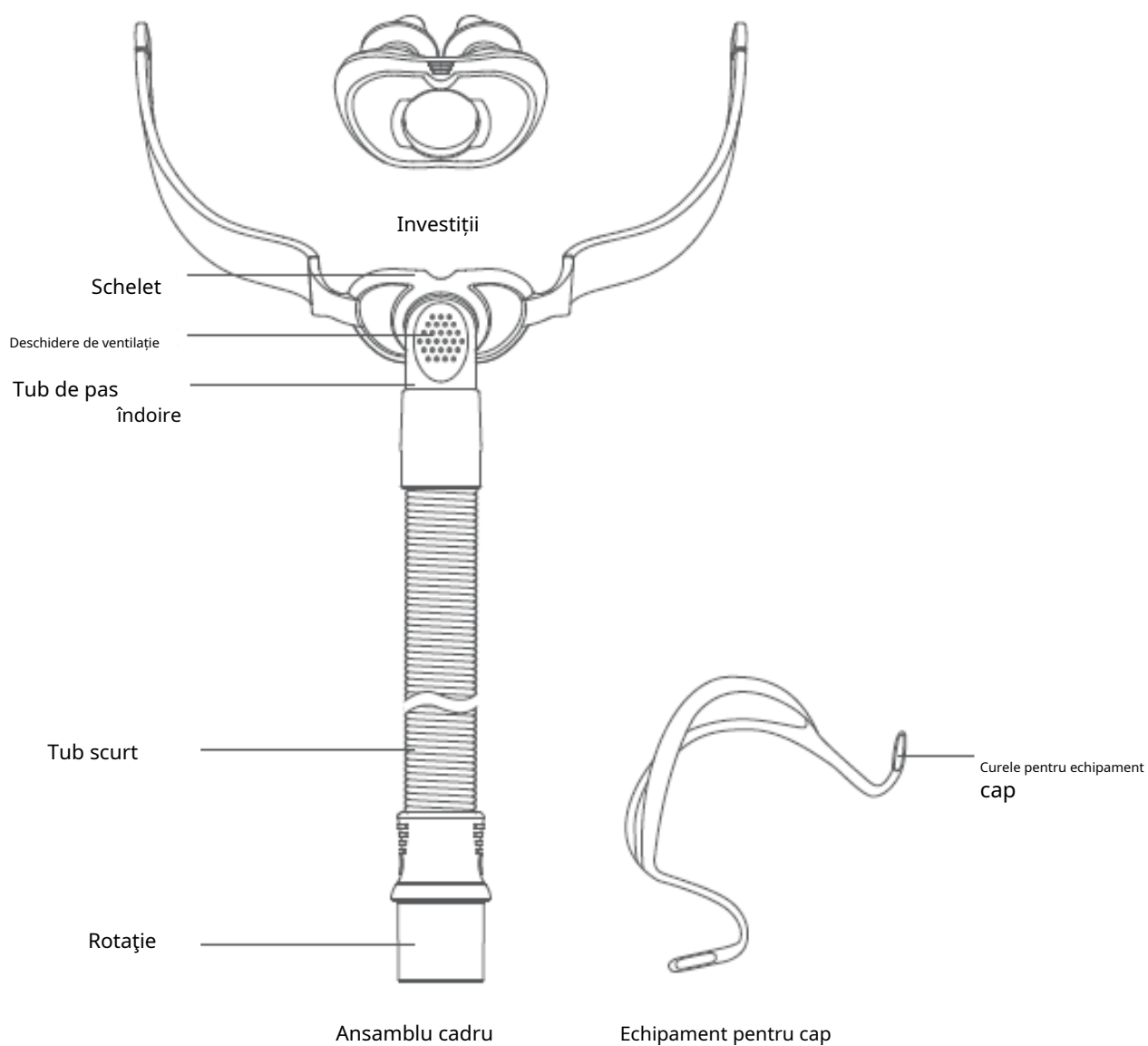

Loc

Folosiți un conector conic standard dacă sunt necesare citiri de presiune și/sau oxigen suplimentar.

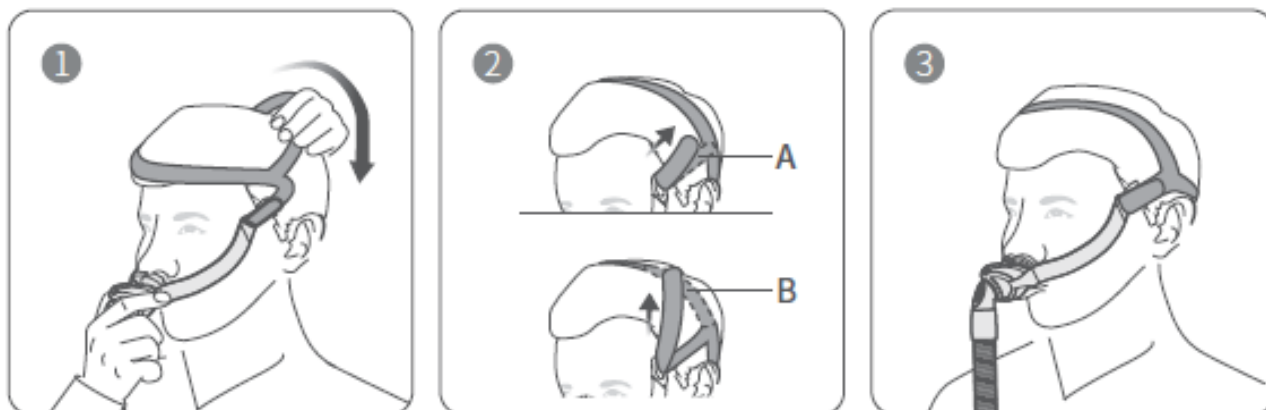

1. Țineți masca ferm pe față și trageți casca de pe cap.
2. Slăbiți curelele de tensiune de pe curelele echipamentului de protecție pentru cap. Trageți curelele uniform spre creștetul capului sau peste urechi până când masca este fixată și confortabilă. Reatașați curelele de tensiune.
3. Masca și echipamentul de protecție pentru cap trebuie poziționate așa cum se arată în imagine.

⚠ **Nota:**

Conectați tubul de aer al dispozitivului la pivotul măștii și asigurați-vă că este conectat corect.

Îndepărtare

Pentru a scoate masca, desprindeți echipamentul de protecție pentru cap de cadrul măștii.


⚠ **PRECAUȚII**

Asigurați-vă că puteți scoate catarama și eșarfa pentru cap fără probleme.

Demontare

⚠ **Note**

Poate apărea o îndoire treptată a ansamblului de țevi, iar reinstalarea poate deveni mai dificilă.

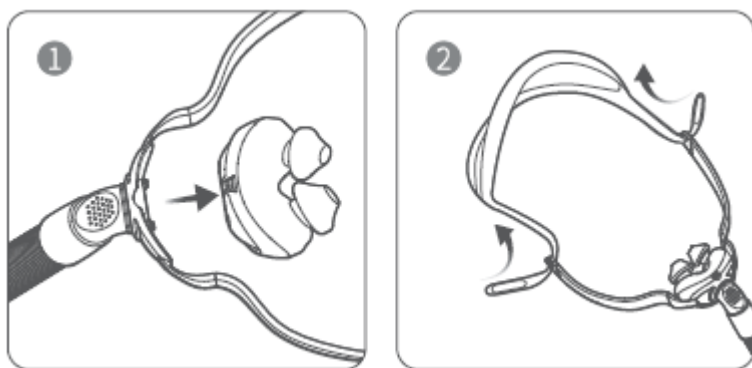

1. Separați cu grijă căptușeala de cadru.
2. Desfaceți curelele de prindere a cascii de pe cadru.

Reasamblare

1. Fixați ornamentul în canalul cadrului.
2. Trecerea curelelor echipamentului de protecție pentru cap prin bucla cadrului.

Curățarea măștii acasă

⚠ Note

- Masca și echipamentul de protecție pentru cap pot fi curățate doar prin spălare manuală.
- Țeava cu îndoire graduală nu poate fi demontată pentru spălare.
- Dacă există vreo deteriorare evidentă a unei componente a măștii (crăpare, șifonare, rupere etc.), atunci componenta măștii trebuie aruncată și înlocuită.

PRECAUȚII

- Nu utilizați soluții care conțin înălbitor, clor, alcool, parfumuri, umectanți, agenți antibacterieni sau uleiuri parfumate pentru a curăța nicio parte a sistemului sau a tubului de aer. Aceste soluții pot provoca daune și pot scurta durata de viață a produsului.
- Expunerea oricărei părți a sistemului sau a conductelor la lumina directă a soarelui sau la căldură poate cauza deteriorarea.
- Nu folosiți detergent de vase pentru a spăla această mască.
- Nu uscați componentele măștii la aer în lumina directă a soarelui, deoarece acest lucru poate accelera îmbătrânirea produsului.
- Nu călcați accesoriul pentru cap. Acesta se poate deteriora.
- Dacă curățarea nu este efectuată conform instrucțiunilor (sau dacă se crește frecvența curățării), acest lucru poate duce la performanțe slabe ale produsului sau la o durată de viață redusă.

Zilnic/După fiecare utilizare

- Dezasamblați componentele măștii conform instrucțiunilor de dezasamblare.
- Curățați temeinic componentele individuale ale măștii (cu excepția echipamentului de protecție pentru cap), frecându-le ușor cu apă caldă (aproximativ 30°C) folosind un săpun delicat.
- Folosiți o perie cu peri moi pentru a curăța orificiul de ventilație.
- Pentru a îmbunătăți etanșarea măștii, uleiurile faciale trebuie îndepărtate de pe căptușeală după utilizare.
- Inspectați fiecare componentă și, dacă este necesar, repetați spălarea până când este vizibil curată și asigurați-vă că nu au rămas reziduuri de săpun.
- Clătiți bine toate piesele cu apă potabilă și lăsați-le să se usuce la aer, în lumina directă a soarelui.
- Când toate piesele sunt uscate, reasamblați-le conform instrucțiunilor de reasamblare.

Săptămânal

- Spălați manual echipamentul de protecție pentru cap și toate accesoriile în apă caldă (aproximativ 30°C) cu săpun. Folosiți săpun pur. Clătiți accesoriile bine și lăsați-le să se usuce la aer, ferite de lumina directă a soarelui.

- Această acțiune va deteriora sau distruge masca și îi va scurta durata de viață. Dacă există vreo deteriorare evidentă a unei componente a măștii (crăpare, șifonare, ruptură etc.), atunci componenta măștii trebuie aruncată și înlocuită.

Folosiți masca în spital sau institut

PRECAUȚII


Masca este destinată utilizării de către un singur pacient într-un spital sau institut. Dacă masca se murdărește în timpul utilizării, vă rugăm să folosiți o lavetă sau hârtie de curățare medicală de unică folosință pentru a curăța murdăria vizibilă, apoi clătiți masca bine cu apă potabilă și lăsați-o să se usuce la aer, în lumina directă a soarelui.

Depanare

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Masca este foarte zgomotoasă	Cel/Ceal/Ceile deschideri ventilare sunt orificiile de curățare conform instrucțiunilor blocată sau parțial blocată. în „Curățarea măștii acasă”. Masca este asamblată incorect. Reasamblați masca.	
Masca curge. Este posibil ca masca să fi fost aplicată pe față. Urmați cu atenție instrucțiunile pentru zona feței.	incorect.	instrucțiuni în "Loc".
Masca nu este confortabilă	Masca poate fi plasată incorect. Urmați.	cu atenție cel/ceal/ceile instrucțiuni în
	Căptușeala măștii poate fi murdară.	în „Curățarea măștii acasă”.

Specificații tehnice

Curba presiune-debit

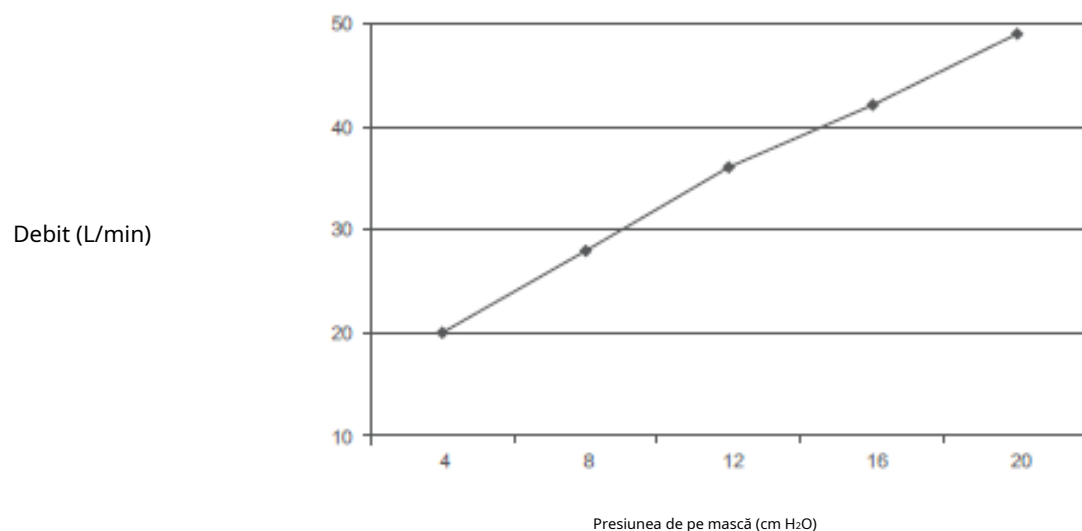

Informații despre spațiul liber	Spațiul gol este volumul gol al măștii până la cot. Spațiul gol al măștii variază în funcție de dimensiunile căptușelii, dar este mai mic de 16 ml.
Presiunea de tratament	4 până la 20 cmH ₂ Cel/Cea/Cei/Cele
Rezistență	Scădere a presiunii măsurate la 50 L/ min: ≤1,0 cmH₂O la 100 L/min: ≤ 3,5 cmH₂ Cel/Cea/Cei/Cele
Sunet	VALORI DE EMISIE DE ZGOMOT DECLARATE, ÎN DOUĂ CIFRE, conform ISO 4871. Nivelul de putere sonoră ponderat A al măștii este mai mic de 38 dBA, cu o incertitudine de 3 dBA. Nivelul de presiune sonoră ponderat A al măștii la o distanță de 1 m este mai mic de 30 dBA, cu o incertitudine de 3 dBA.

Condiții de mediu	Temperatură de funcționare: +5°C până la +40°C (41°F până la 104°F) Umiditate de funcționare: 10%~Umiditate relativă 90% fără condens Depozitare și transport: -20°C până la +60°C (-4°F până la 140°F) Umiditate la depozitare și transport: 10%~90% umiditate relativă fără condens
-------------------	---

Nota:

Sistemul de mască nu conține latex de cauciuc natural, materiale din clorură de polivinil sau ftalat de bis(2-etilhexil).

Depozitare

Asigurați-vă că masca este complet curată și uscată înainte de a o depozita pentru o perioadă lungă de timp. Depozitați masca într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui.

Eliminare

Masca nu conține substanțe nocive și poate fi aruncată la gunoiul menajer obișnuit.

Simboluri

Sistem și ambalare



Cod lot



Data fabricației



Număr de catalog



Nu conține latex de cauciuc natural



Limită de temperatură



Limită de umiditate



Producător



Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană



Dispozitiv medical



Utilizați până la



Consultați instrucțiunile de utilizare.



Un pacient - utilizare multiplă



Atenție, vă rugăm să consultați documentele însoțitoare.

Indică un avertisment sau o precauție și vă avertizează asupra unei potențiale vătămări corporale sau explică măsurile speciale pentru utilizarea sigură și eficientă a dispozitivului.



Simbol CE

Garanție limitată

Garantează că masca, inclusiv cadrul, căptușeala și echipamentul pentru cap, vor fi lipsite de defecte de material și de fabricație pentru o perioadă de nouăzeci (90) de zile de la data achiziției de către consumatorul inițial.

Această garanție nu acoperă daunele cauzate de accidente, utilizare necorespunzătoare, abuz, neglijență, modificare, neutilizarea sau neîntreținerea Produsului în condiții normale de utilizare și în conformitate cu termenii din documentația produsului și alte defecte care nu au legătură cu materialele sau manoperă.



Suzhou Yuyue Medical Technology Co., Ltd.

No.9 Jinfeng Road., Suzhou Science & Technology Town, 215163 Suzhou, Jiangsu, PRC Tel.:

+86-512-67373001

site web: www.yuyue.com.cn



Metrax GmbH

Rheinwaldstr.22, D-78628 Rottweil, Germania

Tel.: +49-741-257-0

Fax: +49-741-257-214

E-mail: vigilance@primedic.com



Versiunea IFU-V-27(01): B

Data pregătirii: 2020-02

yuwell



Suzhou Yuyue Medical Technology Co., Ltd.

No.9 Jinfeng Road., Suzhou Science & Technology
Town, 215163 Suzhou, Jiangsu, PRC Tel:
+86-512-67373001

Adresă web: www.yuwell.com



Metrax GmbH

Rheinwaldstr.22, D-78628 Rottweil, Germania Tel:
+49-741-257-0 +49-741-257-223 Fax:
+49-741-257-214

E-mail: vigilance@primedic.com
heiko.borkowsky@primedic.com




Versiunea IFU-V-27(01): D
Data pregătirii: 03-2022

Manual de utilizare

Seria de îmbrăcăminte respirabilă

Mască de perne nazale

YP-01

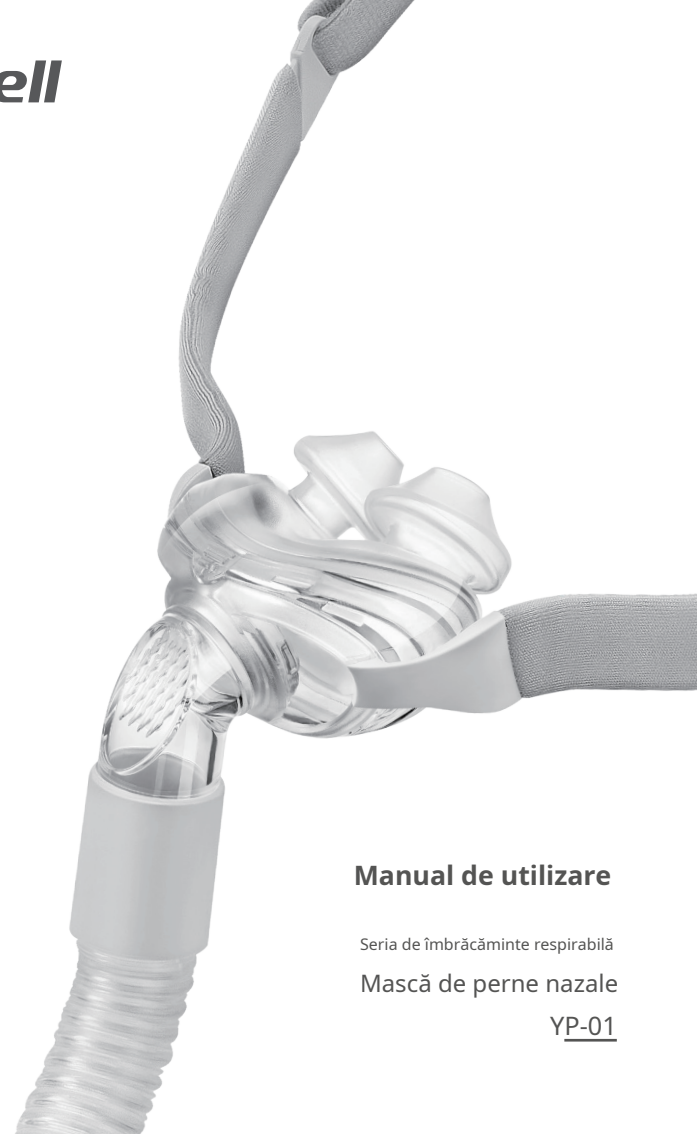

Utilizare preconizată

Masca este un accesoriu neinvaziv utilizat pentru canalizarea fluxului de aer (cu sau fără oxigen suplimentar) către un pacient de la un dispozitiv cu presiune pozitivă a căilor respiratorii (PAP), cum ar fi un sistem cu presiune pozitivă continuă a căilor respiratorii (CPAP) sau un sistem cu două niveluri.

- Masca trebuie utilizată de pacienți (cu greutatea ≥ 30 kg), fiind destinată reutilizării de către un singur pacient în mediul casnic.
- Masca este destinată utilizării de către un singur pacient în mediul spitalicesc sau instituțional.

Contraindicații

Dacă utilizatorul suferă de următoarele afecțiuni, este posibil ca produsul să nu fie potrivit pentru utilizare. De asemenea, trebuie acordată o atenție deosebită atunci când trebuie utilizat. În ambele cazuri, medicul este cel care decide dacă masca trebuie utilizată sau nu. Aceste afecțiuni includ:

- Operație recentă la ochi sau ochi uscați
- Glaucom
- Hernie hiatală
- Funcție afectată a sfincterului cardiac, reflux excesiv, reflex de tuse afectat,
- vărsături
- Boala pulmonară buloasă
- Tensiune arterială patologic scăzută, ocolită de
- căile respiratorii superioare
- Pneumotorax
- Diagnosticat cu sinuzită acută sau otită medie.
- Cu risc de aspirare a conținutului gastric.
- Alergie sau hipersensibilitate la materialele măștii sau la pacienții care nu pot scoate masca



AVERTIZARE

În SUA, legea federală restricționează vânzarea acestui dispozitiv la vânzarea de către sau pe numele recomandarea medicului.



AVERTIZĂRI


- Vă rugăm să citiți întregul ghid înainte de utilizare.

- Orificiile de ventilație trebuie menținute libere.
- Explicația avertismentului: Sistemele CPAP sunt destinate utilizării cu măști speciale cu conectori care au orificii de ventilație pentru a permite un flux continuu de aer în afara mășci. Când aparatul CPAP este pornit și funcționează corect, aerul proaspăt din aparatul CPAP elimină aerul expirat prin orificiul de expirare al măștii atașat. Cu toate acestea, atunci când aparatul CPAP nu funcționează, nu va fi furnizat suficient aer proaspăt prin mască, iar aerul expirat va fi reinhalat. Reinhalarea aerului expirat mai mult de câteva minute poate duce, în anumite circumstanțe, la sufocare. Acest avertisment se aplică majorității modelelor de sisteme CPAP. La presiuni CPAP scăzute, fluxul prin orificiul expirat poate fi inadecvat pentru a elimina tot gazul expirat din tub. Este posibil să apară o reinhalare.

- Pentru a reduce la minimum riscul de vărsături în timpul somnului, pacientul trebuie să evite să mănânce sau să bea timp de trei ore înainte de utilizarea măștii. Această mască nu este recomandată dacă pacientul ia un medicament eliberat pe bază de rețetă care poate provoca vărsături.
- Această mască nu trebuie utilizată la pacienții care nu cooperează, sunt obtuși, nu răspund la vibrații sau nu își pot scoate masca.
- Respectați toate precauțiile atunci când utilizați oxigen suplimentar.
- Fluxul de oxigen trebuie oprit atunci când generatorul de debit nu funcționează, astfel încât oxigenul neutilizat să nu se acumuleze în incinta generatorului de debit și să creeze un risc de incendiu.
- La un debit fix de oxigen suplimentar, concentrația de oxigen inhalat variază în funcție de setările de presiune, modelul de respirație al pacientului, mască, punctul de aplicare și debitul de scurgere.
- Specificațiile tehnice ale măștii sunt furnizate medicului dumneavoastră pentru a verifica dacă aceasta este compatibilă cu generatorul de debit. Dacă este utilizată dincolo de specificațiile tehnice sau cu dispozitive incompatibile, etanșarea și confortul măștii pot să nu fie eficiente, terapia optimă poate să nu fie atinsă, iar scurgerile sau variația ratei de scurgere pot afecta funcționarea generatorului de debit.
- Întrerupeți utilizarea măștii și consultați medicul sau somnologul dacă aveți ORICE reacție adversă la utilizarea măștii.


- Consultați manualul generatorului de debit pentru detalii despre setări și informații operaționale.
- Ca în cazul tuturor măștilor, este posibil să apară o anumită reinspirație la presiuni CPAP scăzute.
- Îndepărtați tot ambalajul înainte de a utiliza masca.

Părți ale măștii

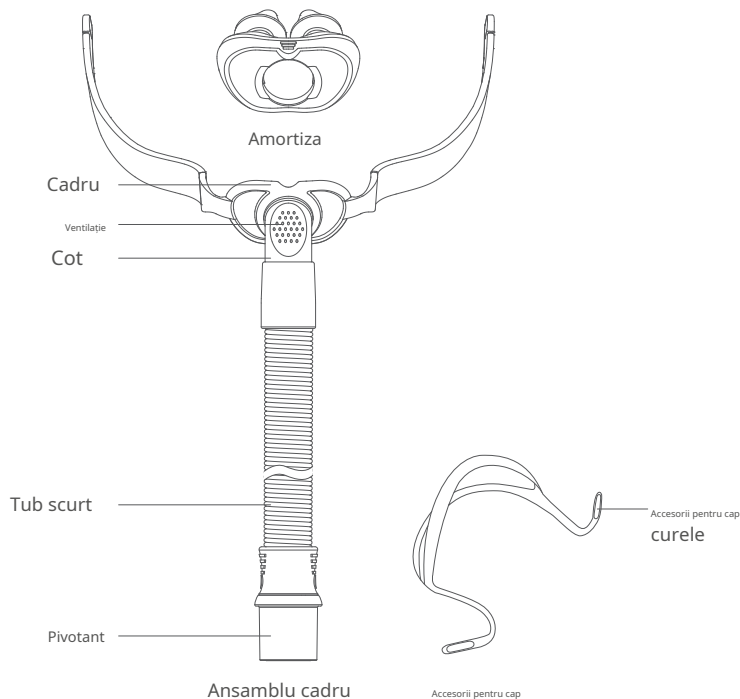

Montaj

Folosiți un conector conic standard dacă sunt necesare citiri de presiune și/sau oxigen suplimentar.

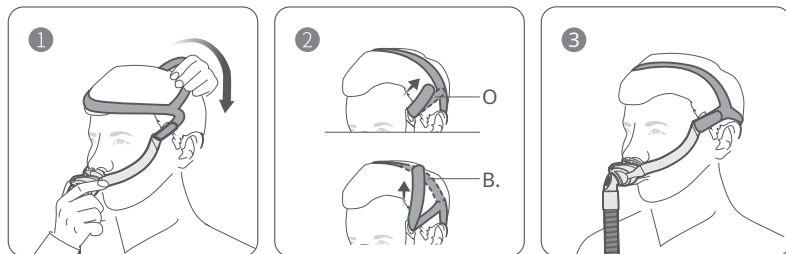

1. Țineți masca ferm pe față și trageți casceta peste cap.
2. Desfaceți clemele de fixare de pe curelele caschetei. Trageți curelele uniform spre creștetul capului sau deasupra urechilor până când masca este stabilă și confortabilă. Reașezați clemele de fixare.
3. Masca și echipamentul de protecție pentru cap trebuie poziționate așa cum se arată în ilustrație.

⚠️ Nota:

Conectați tubul de aer al dispozitivului la pivotul măștii și asigurați-vă că este fixat ferm. conectat.

Îndepărtare

Pentru a scoate masca, desprindeți echipamentul de protecție pentru cap de cadrul măștii.


⚠️ ATENȚII

Vă rugăm să confirmați că puteți scoate catarama și eșarfa pentru cap fără probleme.

Demontare


⚠️ Note

Ansamblul cotului poate fi suportat, iar reinstalarea va deveni mai dificil.

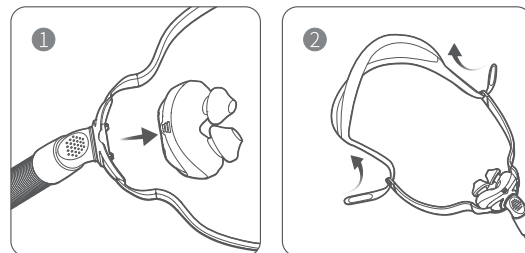

1. Separați cu grijă perna de cadrul.
2. Desfaceți curelele de prindere a cascii de pe cadrul.

Reasamblare

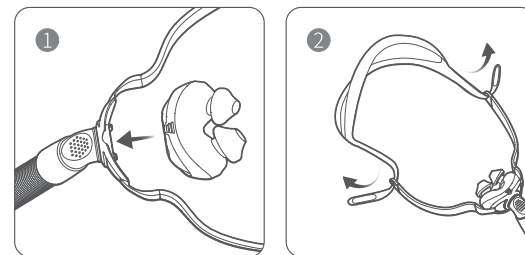

1. Montați perna în canalul cadrului.
2. Trecerea curelelor pentru cap prin bucla cadrului.

Curățarea măștii acasă

⚠️ Note

- Masca și echipamentul de protecție pentru cap pot fi curățate doar prin spălare manuală.
- Cotul nu poate fi demontat pentru spălare.
- Dacă este evidentă orice deteriorare vizibilă a unei componente a măștii (crăpături, rupturi etc.), componenta măștii trebuie aruncată și înlocuită.

- Măștile sunt recomandate pentru înlocuire după 30 de curățări. Se recomandă înlocuirea lor lunară.

⚠️ ATENȚII

- Nu utilizați soluții care conțin înălbitor, clor, alcool, substanțe aromatice, hidratante, agenți antibacterieni sau uleiuri parfumate pentru a curăța orice parte a sistemului sau a tubului de aer. Aceste soluții pot provoca daune și pot reduce durata de viață a produsului.
- Expunerea oricărei părți a sistemului sau a tubulaturii la lumina directă a soarelui sau la căldură poate cauza deteriorarea.
- Nu folosiți mașina de spălat vase pentru a spăla această mască.
- Nu uscați componentele măștii la aer în lumina directă a soarelui, deoarece acest lucru poate accelera îmbătrânirea produsului.
- Nu călcați accesoriul pentru cap. Acesta se poate deteriora.
- Dacă curățarea nu este efectuată conform instrucțiunilor (sau dacă se crește frecvența curățării), produsul poate fi afectat de performanța sa slabă sau de durata sa de viață redusă.

Zilnic / După fiecare utilizare

- Dezasamblați componentele măștii conform instrucțiunilor de dezasamblare.
- Curățați temeinic componentele separate ale măștii (cu excepția echipamentului de protecție a capului), frecându-le ușor în apă caldă (aproximativ 30 °C) folosind un săpun delicat. Înmuiați-le în apă cel mult 10 minute.
- Folosiți o perie cu peri moi pentru a curăța orificiul de ventilație.
- Pentru a optimiza etanșarea măștii, uleiurile faciale trebuie îndepărtate de pe pernă după utilizare.
- Inspectați fiecare componentă și, dacă este necesar, repetați spălarea până când este curată vizual, asigurându-vă că nu există reziduuri de săpun.
- Clătiți bine toate componentele timp de 3-5 minute cu apă potabilă și lăsați-le să se usuce la aer, ferite de lumina directă a soarelui.
- Când toate componentele sunt uscate, reasamblați-le conform instrucțiunilor de reasamblare.

Săptămânal

- Spălați manual echipamentul de protecție pentru cap și toate componentele în apă caldă (aproximativ 30°C) cu săpun. Folosiți săpun pur. Clătiți bine componentele și lăsați-le să se usuce la aer, ferite de lumina directă a soarelui.
- Această acțiune va îmbătrâni sau deteriora masca și îi va scurta durata de viață. Dacă este evidentă orice deteriorare vizibilă a unei componente a măștii (crăpături, rupturi etc.), componenta măștii trebuie aruncată și înlocuită.

Utilizați masca în mediul spitalicesc sau instituțional

⚠️ ATENȚII


Masca este destinată utilizării unui singur pacient în mediul spitalicesc sau instituțional. Metode de curățare conform secțiunii: Curățarea măștii acasă.

Depanare

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Masca este prea zgomotoasă	Gurile de aerisire sunt blocate sau parțial blocate. Masca este asamblată încorect.	Curățați orificiile de ventilație conform instrucțiunilor din secțiunea „Curățarea măștii acasă”. Reasamblați masca.
Scurgeri de mască în jurul feței	Este posibil ca masca să fi fost montată încorect.	Urmați cu atenție instrucțiunile din „Montare”.
Masca este incomod	Este posibil ca masca să fi fost montată încorect. Perna măștii poate fi murdară.	Urmați cu atenție instrucțiunile din „Montare”. Curățați orificiile de ventilație conform instrucțiunilor din secțiunea „Curățarea măștii acasă”.

Technical Specifications

Curba Presiune-Debit

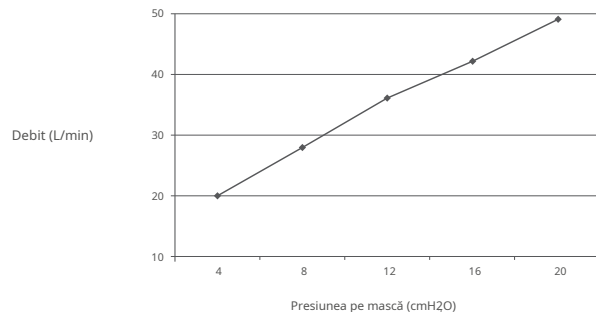

Informații despre spațiul mort

Spațiul mort este volumul gol al măștii până la cot.

Spațiul mort al măștii variază în funcție de dimensiunile pernuțelor, dar este mai mic de 16 ml.

Presiune terapeutică

4 până la 20 cmH₂O/Cel/Cei/Cele

Rezistență

Scădere de presiune măsurată la
50 L/min: $\leq 1,0$ cmH₂O la 100 L/
min: $\leq 3,5$ cmH₂O/Cel/Cei/Cele

Sunet

VALORI DE EMISIE DE ZGOMOT CU NUMĂR DUAL
DECLARATE în conformitate cu ISO 4871. Nivelul de
putere sonoră ponderat A al măștii este mai mic de
31 dBA, cu o incertitudine de 3 dBA. Nivelul de
presiune sonoră ponderat A al măștii la o distanță
de 1 m este mai mic de 23 dBA, cu o incertitudine
de 3 dBA.

Condiții de mediu

Temperatura de funcționare: +5°C la 0°C la +40°C.

(41° F până la 104°F)

Umiditate de funcționare: 10% ~ 90%

umiditate relativă fără condens

Depozitare și transport: -20° C to +60° C.

(-4° F până la 140°F)

Umiditate la depozitare și transport: 10% ~ 90%

umiditate relativă fără condens

⚠ Nota:

Sistemul de mască nu conține latex de cauciuc natural, PVC sau materiale DEHP.
riale.

Depozitare

Asigurați-vă că masca este complet curată și uscată înainte de a o depozita pentru o perioadă
lungă de timp. Depozitați masca într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui.

Eliminare

Masca nu conține substanțe periculoase și poate fi aruncată la gunoiul menajer.

Simboluri

Sistem și ambalare



Cod lot



Data fabricației



Număr de catalog



Nu este fabricat cu latex de cauciuc natural

	Limitarea temperaturii
	Limitarea umidității
	Producător
	Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană
	Dispozitiv medical
	Data de expirare
	Consultați instrucțiunile de utilizare
	Pacient unic - utilizare multiplă
	Atenție, consultați documentele însoțitoare. Indică un avertisment sau o precauție și vă avertizează asupra unei posibile vătămări corporale sau explică măsurile speciale pentru utilizarea sigură și eficientă a dispozitivului.
	Marcaj CE
	Identificator unic al dispozitivului

Garanție limitată

Se garantează că masca, inclusiv ansamblul cadrului, perna și echipamentul de protecție pentru cap, vor fi lipsite de defecte de material și de fabricație pentru o perioadă de nouăzeci (90) de zile de la data achiziției de către consumatorul inițial.

Această garanție nu acoperă daunele cauzate de accidente, utilizare necorespunzătoare, abuz, neglijență, modificare, neutilizarea sau neîntreținerea Produsului în condiții normale de utilizare și în conformitate cu termenii din documentația produsului și alte defecte care nu au legătură cu materialele sau manopera.

