

UTILIZARE PREVĂZUTĂ:

Scaunul de baie permite utilizatorului să își sporească independența în timpul dușului, în igiena personală zilnică, reducând oboseala musculară cauzată de poziția în picioare, precum și riscurile de alunecare și accidentare. Picioarele antiderapante din cauciuc asigură aderența cu podeaua și suprafața căzii/dușului, iar picioarele reglabile pe înălțime permit utilizatorului să modifice cu ușurință înălțimea totală în funcție de nevoile sale. Spătarul oferă siguranță și confort suplimentar. Scaunul de cadă poate fi mutat cu ușurință datorită greutateii reduse și rotit la 360° prin utilizarea unei manete ușor de utilizat.

INDICAȚII ȘI CONTRAINDICAȚII:

Scaunul de baie oferă sprijin persoanelor în vârstă, utilizatorilor de scaune cu rotile, persoanele cu mobilitate redusă a extremităților inferioare, regiunii lombare și șoldului, precum și toți cei care au dificultăți în menținerea unei poziții verticale în timpul dușului sau al igienei personale zilnice. Utilizatorul trebuie să fie capabil să își mențină singur echilibrul în poziție așezat și în poziție de ridicare, precum și să aibă suficientă capacitate pentru a se menține în poziție așezat.

Scaunul de baie nu trebuie utilizat dacă utilizatorul are probleme care sunt legate de tulburări de echilibru sau de percepție.

ATENȚIE (!):

- În cazul unei probleme, NU utilizați produsul până când nu este reparat și contactați reprezentantul autorizat și instruit.
- NU utilizați acest produs sau orice echipament opțional disponibil fără a fi citit și înțeles în prealabil integral acest manual de utilizare.
- Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele specificate în acest manual este interzisă.
- MOBIAC S.A. își declină orice răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din utilizarea diferită de cea menționată în acest manual.
- MOBIAC S.A. își rezervă dreptul de a efectua modificări ale produsului și ale manualului următor fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți caracteristicile acestuia.
- Există posibilitatea unei abateri a dimensiunilor produselor în intervalul de $\pm 3\%$.
- A se păstra produsul departe de sursele de căldură.
- Vă rugăm să păstrați acest formular pentru utilizare ulterioară.
- Fiți atenți când sunt copii în preajmă și NU lăsați copiii să se joace cu produsul.
- Este necesară întotdeauna o atenție deosebită acolo unde există piese mobile care pot provoca prinderea membrelor și rănirea acestora.
- Nu încercați să ridicați produsul ținând de nicio piesă de asamblare.
- Protejați produsul de abraziuni, tăieturi și înțepături

AVERTIZĂRI ȘI INDICAȚII DE SIGURANȚĂ:

- Nu trebuie depășită greutatea maximă a utilizatorului menționată în instrucțiuni.
- Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că scaunul este asamblat corect într-o poziție stabilă.
- Scaunul poate fi utilizat doar pe o suprafață fără obstacole.
- La asamblare, urmați cu strictețe instrucțiunile din Manualul de utilizare.

- Riscul de accidentare a degetelor poate crește în timpul procesului de instalare sau asamblare.
- Nu vă legănați pe scaun, deoarece acest lucru poate duce la alunecare, răsturnare sau chiar ruperea picioarelor. Dacă utilizați scaunul de baie, mențineți întotdeauna suportul scaunului pe toate cele patru (4) picioare.
- Nu modificați scaunul de baie și accesoriile acestuia, indiferent de motiv.
- Nu utilizați scaunul dacă este deteriorat sau modificat în vreun fel. Crăpăturile și deformările pot afecta grav performanța și siguranța dispozitivului.

- După utilizare, scaunul de baie trebuie scos din spațiu pentru a evita orice obstrucție.

- Nu utilizați scaunul în alte scopuri decât cele prevăzute.
- Scaunul nu trebuie depozitat în aer liber.
- Verificați dacă picioarele scaunului de baie sunt fixate ferm pe podea, dacă cotierele sunt fixate și dacă scaunul se rotește ușor.

INFORMAȚII DE ÎNTREȚINERE:

Pentru a asigura o utilizare sigură și un nivel adecvat de igienă, utilizatorul trebuie să efectueze aceste proceduri înainte de fiecare utilizare. Utilizatorul trebuie să asigure integritatea structurală a produsului și a componentelor sale. Pentru procedurile de curățare și dezinfectare, urmați pașii de mai jos:

- Trebuie să purtați mănuși.
- Îndepărtați murdăria vizibilă înainte de a trece la o dezinfecție mai temeinică.
- Folosiți apă sau detergent blând pentru procesul de curățare.
- Ștergeți cu o cârpă uscată și curată.
- Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor.

PROTECTIA MEDIULUI:

Dacă într-o zi descoperiți că produsul dumneavoastră trebuie înlocuit sau nu vă mai este util, gândiți-vă la protejarea mediului:

- Nu aruncați produsul împreună cu alte deșeuri municipale (aceasta este semnificația simbolului de reciclare).
- Contactați autoritățile municipale pentru a vă indica punctele unde puteți elimina produsul pentru reciclare.
- Prin eliminarea produsului care nu mai este util la punctul de reciclare corect, contribuiți la protejarea mediului și la reutilizarea materialelor din care este compus produsul dumneavoastră.

RAPORT DE INCIDENT:

Orice incident grav care apare în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care locuiește utilizatorul și/sau pacientul.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:

Declarăm pe propria noastră responsabilitate că Dispozitivele Medicale menționate în această declarație sunt din Categoria de Risc Scăzut (Clasa de Risc I) și îndeplinesc cerințele Regulamentului European 2017/745 și, acolo unde este cazul, standardele și legislația menționate.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ:

Scaunul de duș permite utilizatorului să își sporească independența în timpul dușului, în igiena personală zilnică, reducând oboseala musculară cauzată de statul în picioare, precum și riscurile de alunecare și accidentare. Picioarele antiderapante din cauciuc asigură aderența cu podeaua și suprafața căzii/dușului, iar picioarele reglabile pe înălțime permit utilizatorului să modifice cu ușurință înălțimea totală în funcție de nevoile sale. Spătarul oferă siguranță și confort suplimentar. Scaunul de cadă poate fi mutat cu ușurință datorită greutateii reduse și rotit la 360° prin utilizarea unei manete ușor de utilizat.

INDICAȚII ȘI CONTRAINDICAȚII:

Scaunul de duș este destinat persoanelor în vârstă, utilizatorilor de scaune cu rotile, persoanelor cu mobilitate redusă a zonei lombare, a genunchiului sau a șoldului, precum și tuturor celor care au dificultăți în menținerea poziției în picioare în timpul etapelor de duș pentru igiena personală zilnică. Utilizatorul trebuie să aibă autonomie de echilibru în timpul procedurilor de așezare și ridicare în picioare, precum și să aibă o capacitate adecvată de a menține poziția în șezut. Scaunul de duș nu trebuie utilizat dacă utilizatorul are probleme legate de echilibru sau tulburări de percepție.

AVERTISMENT (!)

- În caz de deteriorare sau funcționare defectuoasă a produsului, NU utilizați produsul și vă rugăm să contactați reprezentantul autorizat și instruit.
- Dacă nu citiți acest manual de utilizare, este de preferat să nu utilizați acest produs sau o altă piesă disponibilă.
- Nu utilizați produsul în scopuri care nu sunt indicate în acest manual
- MOBIAC SA își declină orice responsabilitate pentru orice consecințe rezultate din utilizarea incorectă a acestui produs și din modificarea neautorizată a cadrului produsului.
- MOBIAC SA își rezervă dreptul de a modifica informațiile conținute în acest document fără notificare prealabilă.
- Există o abatere de $\pm 3\%$ pentru dimensiunile produselor.
- A se păstra produsul departe de sursele de căldură.
- Păstrați acest document pentru referințe viitoare.
- Fiți atenți când se află copii în apropiere și nu le permiteți să se joace cu produsul.
- Este necesară întotdeauna o atenție deosebită acolo unde există piese mobile care pot provoca prinderea membrelor și rănirea acestora.
- Nu încercați să ridicați produsul ținând de nicio piesă detașabilă
- Protejați produsul de zgârieturi, tăieturi și perforații.

AVERTIZĂRI ȘI INDICAȚII DE SIGURANȚĂ:

- Nu trebuie depășită greutatea maximă a utilizatorului indicată în instrucțiuni.
- Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că scaunul este asamblat corect într-o poziție stabilă.
- Scaunul poate fi utilizat doar pe suprafețe fără obstacole.
- În timpul asamblării, respectați cu strictețe instrucțiunile din Manualul de utilizare.
- Riscul de rănire a degetelor poate crește în timpul procesului de montare sau asamblare.
- Nu vă balansați pe scaun, acest lucru poate duce la alunecarea, răsturnarea sau lăsarea picioarelor. Dacă folosiți scaunul de duș, țineți întotdeauna scaunul pe cele 4 picioare ale sale.
- Nu modificați scaunul și componentele acestuia în niciun fel.
- Nu utilizați scaunul de duș dacă este deteriorat sau modificat în vreun fel. Crăpăturile și deformările pot afecta puternic performanța și siguranța dispozitivului.
- După utilizare, scaunul de duș trebuie scos din cădița de duș pentru a evita orice obstrucție.
- Nu utilizați scaunul de duș în alt scop decât cel prevăzut.
- Scaunul de duș nu trebuie depozitat în aer liber.
- Verificați dacă picioarele scaunului de duș sunt fixate ferm pe podea, dacă cotierele sunt fixate și dacă scaunul se rotește ușor.

INFORMAȚII DE ÎNTREȚINERE:

Pentru a garanta o utilizare sigură și un standard adecvat de igienă, utilizatorul trebuie să efectueze aceste proceduri înainte de fiecare utilizare. Utilizatorul trebuie să fie sigur de integritatea structurală a dispozitivului și a componentelor sale. Pentru procedurile de curățare și igienizare, urmați pașii de mai jos:

- Trebuie purtate mănuși.
- Îndepărtați murdăria evidentă înainte de a continua cu cea mai precisă dezinfecție.
- Folosiți apă sau detergent blând pentru procedura de curățare.
- Ștergeți cu o cârpă uscată și curată.
- Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor

PROTECTIA MEDIULUI:

Dacă într-o zi descoperiți că produsul dumneavoastră trebuie înlocuit sau nu mai funcționează pentru dumneavoastră, luați în considerare protejarea mediului: 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor publice (aceasta este și semnificația semnului de reciclare afișat). 2) Contactați autoritățile publice, care vă vor informa cu privire la centrele de reciclare la care trebuie eliminat produsul dumneavoastră. 3) Eliminarea corectă a produsului dumneavoastră ajută la protejarea mediului, precum și la reciclarea componentelor produsului.

RAPORTARE INCIDENTE:

Orice incident grav care apare în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și unei autorități competente din statul membru în care locuiește utilizatorul și/sau pacientul.


DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:

Suntem singurii responsabili pentru declararea faptului că Dispozitivele Medicale menționate în această declarație sunt din Clasa de Risc Scăzut (Clasa I) și respectă cerințele Regulamentului European.2017/745și, după caz, standardele și legislația menționate.

Asamblare/ Asamblare:

ANSAMBLU COTIERĂ

CONȚINUTUL PACHETULUI

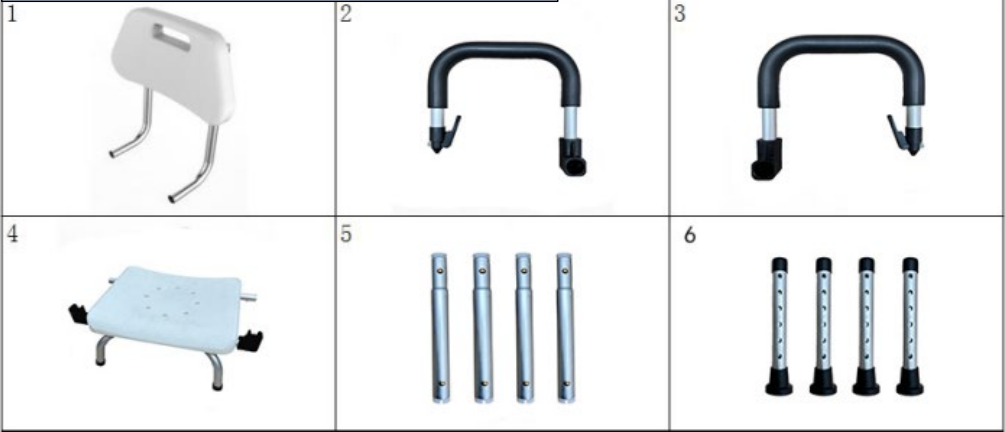

ANSAMBLU TUB PENTRU PICIOARE



ANSAMBLU SPĂTAR



GARANȚIE:

Produsul beneficiază de o garanție de bună funcționare timp de doi (2) ani de la data achiziției.

Garanția acoperă defectele din fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, întreținerea defectuoasă, modificarea, abuzul sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare ale produsului.

De asemenea, NU acoperă piesele consumabile și orice s-ar putea uza în timpul utilizării sau în timp.

De asemenea, nu sunt acoperite de garanție daunele sau defectele cauzate de: dezastru natural, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare cu energie electrică (unde este cazul), companii de transport.

GARANȚIE:

Produsul este garantat pentru o perioadă de doi (2) ani de la data achiziției. Garanția se aplică defectelor din fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, întreținerea defectuoasă, modificarea, utilizarea excesivă sau nerespectarea specificațiilor produsului.

De asemenea, NU acoperă piesele care se pot uza în timpul utilizării sau în timp. Daunele sau defectele cauzate de dezastru natural, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare cu energie electrică (unde este cazul), transportatorii nu sunt acoperiți de garanție.

Nicio piesă de service sau de schimb nu se aplică decât dacă a fost inspectată de un departament de service autorizat sau de producătorul produsului. Costurile de transport pentru bunurile aflate în garanție vor fi suportate de către utilizatorul final-client sau de către distribuitor.

FORMULAR DE GARANȚIE:

DETALII CUMPĂRĂTOR:	
NUMELE COMPLET	
DATA ACHIZIȚIEI	
TELEFON /	
LOT:	
DETALII DEALER	
MARCĂ /	
ADRESĂ /	
TELEFON /	
SIGILIU ȘI SEMNĂTURĂ MAGAZIN / SEMNĂTURĂ ȘI SEMNĂTURĂ	

Interpretarea simbolurilor de pe eticheta de pe cutie sau din instrucțiunile de utilizare ale produsului

Descrierea simbolurilor care au fost imprimate pe etichetă, cutie principală și/sau manualul de utilizare



Când utilizați scaunul de baie rotativ, dacă trebuie să îl rotiți, trageți mai întâi de maneta de pe lateralul acestuia și apoi rotiți-o. Nu este nevoie să trageți de manetă mult timp în timp ce rotiți scaunul. Există patru direcții de rotație (360°), dintr-o direcție în alta, maneta va scoate un „clic”, indicând faptul că scaunul rotativ s-a blocat o dată și nu se rotește.

Când utilizați scaunul rotativ de baie, dacă trebuie să îl rotiți, trageți mai întâi de maneta de pe lateralul acestuia și apoi rotiți-o. Nu este nevoie să trageți de manetă mult timp în timp ce rotiți scaunul. Există patru direcții de rotație (360°); de la o direcție la alta, maneta va scoate un „clic”, indicând faptul că scaunul rotativ s-a blocat o dată și nu se rotește.

REF								
0805660	50 cm	50 cm	40 cm	34 cm	34 cm	43-55 cm	136 kg	4,9 kg

MATERIAL SPĂTAR, ȘEZUT, MANETĂ PIVOTANTĂ: PE MATERIAL CADRU: ALUMINIU

MATERIAL COTIERĂ: ALUMINIU ȘI SPUMĂ EVA MATERIAL CAPETE: TPR



REF:0805660

REF.	DESCRIERE	DESCRIERE EN
0805660	SCAUN PIVOTANT BAIE 360°	Scaun de duș rotativ la 360°

MOBIAM S.A
KATHIANA AKROTIRIOU, XANIA - KPHTH
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com

