

UTILIZARE PREVĂZUTĂ:

Scaunul de transfer pentru cadă permite utilizatorului să își sporească independența în timpul dușului, în igiena personală zilnică, reducând oboseala musculară cauzată de statul în picioare, precum și riscurile de alunecare și accidentare. Picioarele antiderapante din cauciuc asigură aderența cu podeaua și suprafața căzii/dușului, iar picioarele reglabile pe înălțime permit utilizatorului să modifice cu ușurință înălțimea totală în funcție de nevoile sale. Spătarul și centura oferă siguranță și confort suplimentar. Scaunul este glisant cu ajutorul unui buton și poate fi rotit la 360° prin utilizarea unei manete ușor de utilizat.

INDICAȚII ȘI CONTRAINDICAȚII:

Scaunul de transfer pentru cadă oferă suport pentru utilizatorii în vârstă utilizatorii de scaune cu rotile, persoanele cu mobilitate redusă a extremităților inferioare, a regiunii lombare și a șoldului și toți cei care au dificultăți în menținerea unei poziții verticale în timpul dușului sau al igienei personale zilnice. Utilizatorul trebuie să își poată menține echilibrul atât în poziție așezată, cât și în picioare și să aibă suficientă capacitate pentru a se menține în poziție așezată. Scaunul de transfer pentru baie nu trebuie utilizat dacă utilizatorul are probleme legate de tulburări de echilibru sau de percepție. **ATENȚIE**

(!):

- În cazul unei probleme, NU utilizați produsul până când nu este reparat și contactați reprezentantul autorizat și instruit.
- NU utilizați acest produs sau orice echipament opțional disponibil fără a fi citit și înțeles în prealabil integral acest manual de utilizare.
- Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele specificate în acest manual este interzisă.
- MOBIAC S.A. își declină orice răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din utilizarea diferită de cea menționată în acest manual.
- MOBIAC S.A. își rezervă dreptul de a efectua modificări ale produsului și ale manualului următor fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți caracteristicile acestuia.
- Există posibilitatea unei abateri a dimensiunilor produselor în intervalul de ±3%.
- A se păstra produsul departe de sursele de căldură.
- Vă rugăm să păstrați acest formular pentru utilizare ulterioară.
- Fiți atenți când sunt copii în preajmă și NU lăsați copiii să se joace cu produsul.
- Este necesară întotdeauna o atenție deosebită acolo unde există piese mobile care pot provoca prinderea membrelor și rănirea acestora.
- Nu încercați să ridicați produsul ținând de nicio piesă de asamblare.
- Protejați produsul de abraziuni, tăieturi și înțepături

AVERTIZĂRI ȘI INDICAȚII DE SIGURANȚĂ:

- Nu trebuie depășită greutatea maximă a utilizatorului menționată în instrucțiuni.
- Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că scaunul este asamblat corect într-o poziție stabilă.
- Scaunul poate fi utilizat doar pe o suprafață fără obstacole.
- La asamblare, urmați cu strictețe instrucțiunile din Manualul de utilizare.
- Riscul de accidentare a degetelor poate crește în timpul procesului de instalare sau asamblare.
- Nu vă legănați pe scaun, deoarece acest lucru poate duce la alunecare, răsturnare sau chiar ruperea picioarelor. Dacă utilizați scaunul de baie, mențineți întotdeauna suportul scaunului pe toate cele patru (4) picioare.
- Nu modificați scaunul de baie și accesoriile acestuia, indiferent de motiv.
- Nu utilizați scaunul dacă este deteriorat sau modificat în vreun fel. Crăpăturile și deformările pot afecta grav performanța și siguranța dispozitivului.
- După utilizare, scaunul de transfer al căzii trebuie scos din spațiu pentru a evita orice obstrucție.
- Nu utilizați scaunul în alte scopuri decât cele prevăzute.
- Scaunul nu trebuie depozitat în aer liber.
- Verificați dacă picioarele scaunului de transfer pentru cadă sunt stabile, dacă cotierele sunt fixate și dacă rotația este lină.

INFORMAȚII DE ÎNTREȚINERE:

Pentru a asigura o utilizare sigură și un nivel adecvat de igienă, utilizatorul trebuie să efectueze aceste proceduri înainte de fiecare utilizare. Utilizatorul trebuie să asigure integritatea structurală a produsului și a componentelor sale. Pentru procedurile de curățare și dezinfectare, urmați pașii de mai jos:

- Trebuie să purtați mănuși.
- Îndepărtați murdăria vizibilă înainte de a trece la o dezinfecție mai temeinică.
- Folosiți apă sau detergent blând pentru procesul de curățare.
- Ștergeți cu o cârpă uscată și curată.
- Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor.



PROTECȚIA MEDIULUI:

Dacă într-o zi descoperiți că produsul dumneavoastră trebuie înlocuit sau nu vă mai este util, gândiți-vă la protejarea mediului:

- Nu aruncați produsul împreună cu alte deșeuri municipale (aceasta este semnificația simbolului de reciclare).
- Contactați autoritățile municipale pentru a vă indica punctele unde puteți elimina produsul pentru reciclare.
- Prin eliminarea produsului care nu mai este util la punctul de reciclare corect, contribuiți la protejarea mediului și la reutilizarea materialelor din care este compus produsul dumneavoastră.

RAPORT DE INCIDENT:

Orice incident grav care apare în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care locuiește utilizatorul și/sau pacientul.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:

Declarăm pe propria noastră responsabilitate că Dispozitivele Medicale menționate în această declarație sunt din Categoria de Risc Scăzut (Clasa de Risc I) și îndeplinesc cerințele Regulamentului European 2017/745 și, acolo unde este cazul, standardele și legislația menționate.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ:

Banca de cadă de transfer permite utilizatorului să își sporească independența în timpul dușului, în igiena personală zilnică, reducând oboseala musculară cauzată de statul în picioare, precum și riscurile de alunecare și accidentare. Picioarele antiderapante din cauciuc asigură aderența cu podeaua și suprafața căzii/dușului, iar picioarele reglabile pe înălțime permit utilizatorului să modifice cu ușurință înălțimea totală în funcție de nevoile sale. Spătarul și centura oferă siguranță și confort suplimentar. Scaunul este glisant cu ajutorul unui buton și poate fi rotit la 360° folosind o pârghie ușor de utilizat.

INDICAȚII ȘI CONTRAINDICAȚII:

Banca de transfer pentru cadă este destinată persoanelor în vârstă, utilizatorilor de scaune cu rotile, persoanelor cu mobilitate redusă a zonei lombare, a genunchiului sau a șoldului, precum și tuturor celor care au dificultăți în menținerea poziției în picioare în timpul etapelor de duș din cadrul igienei personale zilnice. Utilizatorul trebuie să aibă autonomie de echilibru în timpul procedurilor de așezare și ridicare în picioare, precum și să aibă o capacitate adecvată de a menține poziția în șezut. Banca de transfer pentru cadă nu trebuie utilizată dacă utilizatorul are probleme legate de tulburări de echilibru sau de percepție.

AVERTISMENT (!)

- În caz de deteriorare sau funcționare defectuoasă a produsului, NU utilizați produsul și vă rugăm să contactați reprezentantul autorizat și instruit.
- Dacă nu citiți acest manual de utilizare, este de preferat să nu utilizați acest produs sau o altă piesă disponibilă.
- Nu utilizați produsul în scopuri care nu sunt indicate în acest manual
- MOBIAC SA își declină orice responsabilitate pentru orice consecințe rezultate din utilizarea incorectă a acestui produs și din modificarea neautorizată a cadrului produsului.
- MOBIAC SA își rezervă dreptul de a modifica informațiile conținute în acest document fără notificare prealabilă.
- Există o abatere de ± 3% pentru dimensiunile produselor.
- A se păstra produsul departe de sursele de căldură.
- Păstrați acest document pentru referințe viitoare.
- Fiți atenți când se află copii în apropiere și nu le permiteți să se joace cu produsul.
- Este necesară întotdeauna o atenție deosebită acolo unde există piese mobile care pot provoca prinderea membrelor și rănirea acestora.
- Nu încercați să ridicați produsul ținând de nicio piesă detașabilă
- Protejați produsul de zgârieturi, tăieturi și perforații.

AVERTIZĂRI ȘI INDICAȚII DE SIGURANȚĂ:

- Nu trebuie depășită greutatea maximă a utilizatorului indicată în instrucțiuni.
- Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că scaunul este asamblat corect într-o poziție stabilă.
- Scaunul poate fi utilizat doar pe suprafețe fără obstacole.
- În timpul asamblării, respectați cu strictețe instrucțiunile din Manualul de utilizare.
- Riscul de rănire a degetelor poate crește în timpul procesului de montare sau asamblare.
- Nu vă balansați pe scaun, acest lucru poate duce la alunecarea, răsturnarea sau lăsarea picioarelor. Dacă folosiți scaunul de duș, țineți întotdeauna scaunul pe cele 4 picioare ale sale.
- Nu modificați scaunul și componentele acestuia în niciun fel.
- Nu utilizați scaunul de duș dacă este deteriorat sau modificat în vreun fel. Crăpăturile și deformările pot afecta puternic performanța și siguranța dispozitivului.
- După utilizare, scaunul de duș trebuie scos din cădița de duș pentru a evita orice obstrucție.
- Nu utilizați scaunul de duș în alt scop decât cel prevăzut.
- Scaunul de duș nu trebuie depozitat în aer liber.
- Verificați dacă picioarele băncii de transfer pentru cadă sunt stabile, dacă cotierele sunt fixate și dacă se rotește ușor.

INFORMAȚII DE ÎNTREȚINERE:

Pentru a garanta o utilizare sigură și un standard adecvat de igienă, utilizatorul trebuie să efectueze aceste proceduri înainte de fiecare utilizare. Utilizatorul trebuie să fie sigur de integritatea structurală a dispozitivului și a componentelor sale. Pentru procedurile de curățare și igienizare, urmați pașii de mai jos:

- Trebuie purtate mănuși.
- Îndepărtați murdăria evidentă înainte de a continua cu cea mai precisă dezinfecție.
- Folosiți apă sau detergent blând pentru procedura de curățare.
- Ștergeți cu o cârpă uscată și curată.
- Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor



PROTECȚIA MEDIULUI:

Dacă într-o zi descoperiți că produsul dumneavoastră trebuie înlocuit sau nu mai funcționează pentru dumneavoastră, luați în considerare protejarea mediului: 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor publice (aceasta este și semnificația semnului de reciclare afișat). 2) Contactați autoritățile publice, care vă vor informa cu privire la centrele de reciclare la care trebuie eliminat produsul dumneavoastră. 3) Eliminarea corectă a produsului dumneavoastră ajută la protejarea mediului, precum și la reciclarea componentelor produsului.


RAPORTARE INCIDENTE:

Orice incident grav care apare în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și unei autorități competente din statul membru în care locuiește utilizatorul și/sau pacientul.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:

Suntem singurii responsabili pentru declararea faptului că Dispozitivele Medicale menționate în această declarație sunt din Clasa de Risc Scăzut (Clasa I) și respectă cerințele Regulamentului European.2017/745și, după caz, standardele și legislația menționate.

Asamblare/ Asamblare

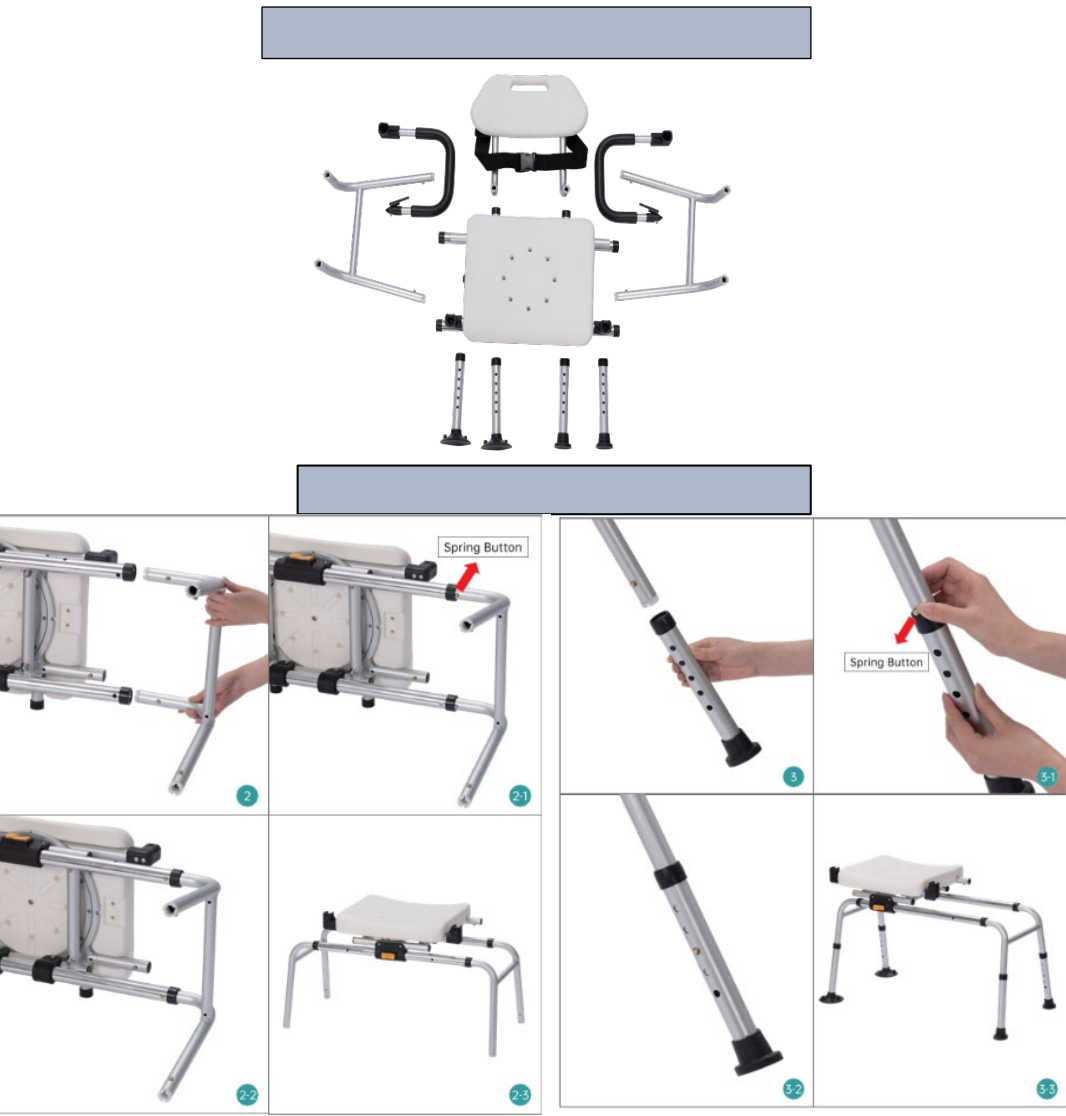

ANSAMBLU COTIERĂ



ANSAMBLU SPATE/
ANSAMBLU SPĂTAR



PENTRU A MIȘCA - GLISA SCAUNUL, APĂSAȚI BUTONUL DE MAI JOS



GARANȚIE:

Produsul este garantat să funcționeze corect timp de doi (2) ani de la data achiziției. Garanția acoperă defectele din fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, întreținerea defectuoasă, modificarea, abuzul sau nerespectarea instrucțiunilor produsului. De asemenea, NU acoperă piesele consumabile și orice s-ar putea uza în timpul utilizării sau în timp. De asemenea, nu sunt acoperite de garanție daunele sau defectele cauzate de: dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare cu energie electrică (unde este cazul), companii de transport.

GARANȚIE:

Produsul este garantat pentru o perioadă de doi (2) ani de la data achiziției. Garanția se aplică defectelor din fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, întreținerea defectuoasă, modificarea, utilizarea excesivă sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare ale produsului. De asemenea, NU acoperă piesele care se pot uza în timpul utilizării sau în timp. Daunele sau defectele cauzate de dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare cu energie electrică (unde este cazul), transportatorii nu sunt acoperiți de garanție. Nicio piesă de service sau de schimb nu se aplică decât dacă a fost inspectată de un departament de service autorizat sau de producătorul produsului. Costurile de transport pentru bunurile aflate în garanție vor fi suportate de către utilizatorul final-client sau de către distribuitor.

FORMULAR DE GARANȚIE:

DETALII CUMPĂRĂTOR:	
NUMELE COMPLET	
NUME:	
DATA ACHIZIȚIEI	
DATA ACHIZIȚIEI:	
TELEFON /	
TELEFON:	
LOT:	
DETALII DEALER	
MARCĂ /	
NUMELE COMPLET:	
ADRESĂ /	
ADRESA:	
TELEFON /	
TELEFON:	
SIGILIU ȘI SEMNĂTURĂ MAGAZIN / SEMNĂTURĂ ȘI SEMNĂTURĂ	

Interpretarea simbolurilor de pe eticheta de pe cutie sau din instrucțiunile de utilizare ale produsului

Descrierea simbolurilor care au fost imprimate pe etichetă, cutie principală și/sau manualul de utilizare

KΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
MANUFACTURER

REF

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
PRODUCT NUMBER

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΧΡΗΣΗΣ
READ THE INSTRUCTION FOR
USE

ΣΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE
CE MARK

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
PRODUCTION DATE

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
MEDICAL DEVICE

ΛΟΤ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ
BATCH NUMBER

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΑΝ
ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ
DO NOT USE IF PACKAGE IS
DAMAGE

Μοναδικός αναγνωριστικός
κωδικός προϊόντος
Unique Device Identification

ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ
IN DOOR USE ONLY

ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ
HANDLE WITH CARE

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
WASTE ELECTRICAL AND
ELECTRONIC EQUIPMENT DIRECTIVE

Κând utilizați scaunul de transport rotativ, dacă trebuie să îl rotiți, trageți mai întâi maneta în lateral și apoi rotiți-o. Nu este nevoie să țineți maneta în timp ce rotiți scaunul. Există patru direcții de rotație (360°), dintr-o direcție în alta, maneta va scoate un „clic”, indicând faptul că scaunul rotativ s-a blocat o dată și nu se rotește.

Κând utilizați scaunul rotativ, dacă trebuie să îl rotiți, trageți mai întâi maneta în lateral și apoi rotiți-o. Nu este nevoie să țineți maneta apăsată în timp ce rotiți scaunul. Există patru direcții de rotație (360°); de la o direcție la alta, maneta va scoate un „clic”, indicând faptul că scaunul rotativ s-a blocat o dată și nu se rotește.



REF								
0805661	87 cm	87 cm	40 cm	34 cm	34 cm	48-58 cm	136 kg	6,2 kg

MATERIAL SPĂTAR, ȘEZUT, MANETĂ PIVOTANTĂ: PE MATERIAL CADRU: ALUMINIU

MATERIAL COTIERĂ: ALUMINIU ȘI SPUMĂ EVA MATERIAL CAPETE: TPR



REF : 0805661



REF.	PE
0805661	TRANSFER B
DESPRE TRANSPORTATOR DE CĂI LA 360°	BANCĂ

MOBIAK S.A
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com

