



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: SCAUN DE BAIE „WAVE”

MANUAL DE UTILIZARE: SCAUN DE BAIE „VAL”

REF	DESCRIERE	DESCRIERE
0803848	SCAUN DE BAIE „WAVE” ALBASTRU	Scaun de baie „WAVE” S albastru
0803849	SCAUN DE BAIE „WAVE” M ALBASTRU	Scaun de baie „WAVE” M Albastru
0803850	SCAUN DE BAIE „WAVE” L ALBASTRU	Scaun de baie „WAVE” L Albastru
0803851	SCAUN DE BAIE „WAVE” ROZ	Scaun de baie „WAVE” S roz
0803852	SCAUN DE BAIE „WAVE” M ROZ	Scaun de baie „WAVE” M roz
0803853	SCAUN DE BAIE „WAVE” L ROZ	Scaun de baie „WAVE” L roz
0803857	SCAUN DE BAIE „WAVE” CU BAZA CU ROȚI S ALBASTRU	Scaun de baie cu bază cu roți, albastru
0803858	SCAUN DE BAIE „WAVE” CU BAZA CU ROȚI ALBASTRU	Scaun de baie cu bază cu roți M, albastru
0803859	SCAUN DE BAIE „WAVE” CU BAZA CU ROȚI L ALBASTRU	Scaun de baie cu bază cu roți, L, albastru
0803860	SCAUN DE BAIE „WAVE” CU BAZA CU ROȚI S ROZ	Scaun de baie cu bază cu roți, culoare roz
0803861	SCAUN DE BAIE „WAVE” CU BAZA CU ROȚI M ROZ	Scaun de baie cu bază cu roți M roz
0803862	SCAUN DE BAIE „WAVE” CU BAZA CU ROȚI L ROZ	Scaun de baie cu bază cu roți, culoare roz, L



UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Scaunul de baie WAVE este destinat să ofere sprijin copiilor/adolescenților în timpul băii sau dușului. Scaunul de baie este destinat utilizării în interior, în mediul de baie. Acesta oferă un suport și o stabilitate excelente în timpul băii, permițând îngrijitorilor să spele în siguranță și confortabil copiii/adolescenții care pot avea dificultăți în a se așeza sau în a-și menține echilibrul.

CARACTERISTICI ȘI DIMENSIUNI

Vă rugăm să consultați ANEXA A. **MONTAJ**: Vă rugăm să consultați ANEXA B. **SIMBOLURI**: Vă rugăm să consultați ANEXA C.

ΣΥΜΒΟΛΑ

AVERTISMENTE GENERALE

- NU utilizați acest produs sau orice echipament opțional disponibil fără a fi citit și înțeles în prealabil integral acest manual de utilizare.
Dacă nu înțelegeți avertismentele, precauțiile sau instrucțiunile, contactați un profesionist din domeniul sănătății, un distribuitor sau personal tehnic înainte de a încerca să utilizați dispozitivul, în caz contrar putând rezulta vătămări corporale sau daune materiale.
- Depozitați produsul departe de sursele de căldură.
- Nu depășiți sarcina utilă maximă.
- Este necesară întotdeauna o atenție deosebită acolo unde există piese mobile care pot provoca prinderea membrelor și rănirea acestora.
- Nu încercați să ridicați produsul ținând de nicio piesă de asamblare.
- Fiți deosebit de atenți când folosiți scaunul de baie în cadă.
- Nu lăsați niciodată utilizatorul nesupravegheat. Îngrijitorul trebuie să fie în contact cu utilizatorul în permanență.
- Nu lăsați niciodată utilizatorul să stea în picioare pe scaunul de baie.
- Nu așezați scaunul de baie pe teren neuniform sau în pantă.
- Toate componentele trebuie reglate cu atenție pentru confortul și siguranța utilizatorului.
- Scaunul de baie trebuie verificat periodic pentru a depista semne de deteriorare și uzură. Nu utilizați scaunul de baie dacă vreo piesă este spartă, ruptă sau lipsește. Piese deteriorate sau uzate trebuie reparate imediat.

ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Verificați dacă rama prezintă deteriorări pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului. Nu există crăpături sau rupturi în cadru.
- Verificați dacă produsul este asamblat corect.
- Verificați dacă frânele funcționează corect.
- Verificați întotdeauna starea de uzură a pieselor mecanice pentru a asigura utilizarea în deplină siguranță a produsului pentru persoane și obiecte.
- Cu excepția reglării înclinării suportului pentru picioare, scaunul de baie nu trebuie reglat în timpul utilizării.

ÎNȚREȚINERE

- Acest produs trebuie inspectat, întreținut, curățat și/sau dezinfectat periodic.
- Nu utilizați acest scaun de baie dacă este deteriorat, spart sau dezamblat.
- Contactați furnizorul pentru reparații sau înlocuiri calificate. Nu modificați sau reparați de către personal necalificat.
- După utilizarea scaunului de baie, este important să clătiți cu apă pentru a îndepărta orice reziduuri de săpun sau alte produse de baie.
- Lăsați scaunul de baie să se usuce în poziție deschisă și, după ce s-a uscat complet, îl puteți plia pentru depozitare.
- Dacă mediul este umed, depozitați scaunul de baie și accesoriile sale într-un loc relativ uscat și lăsați-le să se usuce în poziție deschisă pentru a preveni apariția mușcăiului.
- Expunerea continuă și prelungită la lumina soarelui poate schimba culoarea materialelor produsului.

CURĂȚENIE

Pe lângă întreținere și inspecție, se poate face și curățarea generală atât a cadrului, cât și a tapițeriei.

- Pentru a menține aspectul produsului, tapițeria trebuie curățată periodic.
- Cadrul scaunului de baie poate fi curățat cu o cârpă umedă și un detergent blând.
- Clățiți cu apă curată înainte de a-l lăsa să se usuce.
- **NU lăsați produsul umed.**
- Tapițeria scaunului de baie este detașabilă și se poate spăla la mașină la 40°C/100°F folosind un dezinfectant ușor.
- Este permisă utilizarea unui uscător la temperatură scăzută pentru uscarea tapetului.
- Puneți tapițeria scaunului de baie într-un sac de rufe pentru a evita deteriorarea acesteia și a mașinii de spălat/uscător.
- Rama trebuie curățată regulat cu un detergent blând.
- Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor.
- Protejați produsul de abraziuni, tăieturi și înțepături.
- Accesorii pentru scaunul de baie se pot spăla manual la 30°C / 85°F cu detergent blând. Nu uscați accesoriile la uscătorul de rufe.
- Le poți repositiona pe scaunul de baie după ce le-ai lăsat să se usuce complet natural.
- Nu folosiți înălțitor.
- Nu folosiți fier de călcat.



ATENȚIE (!):

- În cazul în care apare o problemă **NU** utilizați produsul până la repararea acestuia și contactați reprezentantul autorizat și instruit
- Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele specificate în acest manual este interzisă.
- MOBIK S.A. își declină orice răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din utilizarea diferită de cea menționată în acest manual.
- MOBIK S.A. își rezervă dreptul de a efectua modificări ale produsului și ale manualului următor fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți caracteristicile acestuia.
- Există posibilitatea unei abateri a dimensiunilor produselor în intervalul de $\pm 3\%$.
- Dacă picioarele bazei cu roțile sau picioarele de susținere ale bazei produsului sunt poziționate la 90 de grade, există un risc ridicat de răsturnare.



PROTECȚIA MEDIULUI

Dacă constatați că produsul dumneavoastră trebuie înlocuit sau nu vă mai este util, luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu alte deșeuri municipale (aceasta este semnificația simbolului de reciclare).
- 2) Contactați autoritățile municipale pentru a vă indica punctele unde puteți elimina produsul pentru reciclare.
- 3) Prin eliminarea produsului care nu mai este util la punctul de reciclare corect, contribuiți la protejarea mediului și la reutilizarea materialelor din care este compus produsul dumneavoastră.

RAPORT DE INCIDENT:

Orice incident grav care apare în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care locuiește utilizatorul și/sau pacientul.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Declarăm pe propria noastră răspundere că Dispozitivele Medicale menționate în această declarație sunt din Categoria de Risc Scăzut (Clasa de Risc I) și îndeplinesc cerințele Regulamentului European 2017/745 și, acolo unde este cazul, standardele și legislația menționate.

GARANȚIE

Produsul beneficiază de o garanție de bună funcționare timp de trei (3) ani de la data achiziției.

Garanția acoperă defectele din fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, întreținerea deficitară, modificarea, abuzul sau nerespectarea instrucțiunilor produsului. De asemenea, NU acoperă piesele de uzură, cum ar fi tapițeria, roțile sau frânele și orice altceva care se poate uza în timpul utilizării sau în timp.

De asemenea, nu sunt acoperite de garanție daunele sau defectele cauzate de: dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare cu energie electrică (unde este cazul) și companii de transport.

Nicio lucrare sau piesă nu este acoperită decât dacă a fost inspectată de un centru de service autorizat sau de producătorul produsului. Costurile de transport pentru inspecție sunt suportate de utilizator sau client sau de către comerciant.

FORMULAR DE GARANȚIE

DETALII CUMPĂRĂTOR			
NUMELE COMPLET:			
DATA ACHIZIȚIEI:		TELEFON:	
SERIAL NUMĂR:			
LOT:			
DETALII MAGAZIN			
MARCĂ:			
ADRESA:			
TELEFON:			
ȘTAMPILĂ ȘI SEMNĂTURĂ DE MAGAZIN			



MOBIK S.A
KATHIANA AKROTIRIOU, XANIA - KPTH
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



UTILIZARE PREVĂZUTĂ:

Scaunul de baie WAVE este destinat să ofere sprijin copiilor/adolescenților în timpul băii sau dușului. Scaunul de baie este destinat utilizării în interior, în mediul de baie. Acesta oferă un suport și o stabilitate excelente în timpul băii, permițând îngrijitorilor să spele în siguranță și confortabil copiii/adolescenții care pot avea dificultăți în a se așeza sau în a-și menține echilibrul.

SPECIFICAȚII ȘI DIMENSIUNI: Vă rugăm să consultați **ANEXA A**

ADUNARE: Vă rugăm să consultați **SIMBOLURI ANEXA B:** Vă rugăm să

consultați **ANEXA C**

AVERTISMENTE GENERALE:

- Dacă nu citiți acest manual de utilizare, este de preferat să nu utilizați acest produs sau o altă piesă disponibilă. Dacă nu înțelegeți modul de utilizare sau precauțiile, vă rugăm să contactați distribuitorul sau centrul de service autorizat. Consultați un tehnic înainte de a utiliza produsul, deoarece se pot produce daune.
- A se păstra produsul departe de sursele de căldură.
- Nu depășiți capacitatea maximă de încărcare.
- Este necesară întotdeauna o atenție deosebită acolo unde există piese mobile care pot provoca prinderea membrelor și rănirea acestora.
- Nu încercați să ridicați produsul ținând de nicio piesă detașabilă.
- Procedați cu mare precauție atunci când utilizați scaunul de baie în cadă.
- Nu lăsați niciodată utilizatorul nesupravegheat. Îngrijitorul trebuie să fie mereu în contact cu utilizatorul.
- Nu lăsați niciodată utilizatorul să se ridice în picioare în scaunul de baie.
- Nu așezați scaunul de baie pe teren neuniform sau în pantă.
- Toate accesoriile trebuie reglate cu atenție pentru confortul și siguranța utilizatorului.
- Scaunul de baie trebuie inspectat periodic pentru a depista semne de deteriorare și uzură. Nu utilizați scaunul de baie dacă vreo piesă este spartă, ruptă sau lipsește. Piese deteriorate sau uzate trebuie reparate imediat.

ÎNAINTE DE UTILIZARE:

- Verificați dacă rama este deteriorată pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului. Nu există crăpături sau rupturi în ramă.
- Verificați dacă produsul este asamblat corect.
- Verificați dacă frânele funcționează corect.
- Verificați întotdeauna starea de uzură a pieselor mecanice pentru a asigura utilizarea în siguranță absolută a produsului pentru persoane și obiecte
- Cu excepția reglării înclinării suportului pentru gambe, scaunul de baie nu trebuie reglat în timpul utilizării.

ÎNTREȚINERE:

- Acest produs trebuie inspectat, întreținut, curățat și/sau dezinfectat periodic.
- Nu utilizați acest scaun de baie dacă este deteriorat, spart sau dezasamblat.
- Contactați furnizorul pentru reparații sau înlocuiri calificate. Nu modificați sau reparați de către personal necalificat.
- După utilizarea scaunului de baie, este important să clătiți cu apă pentru a îndepărta orice reziduuri de săpun sau alte produse de baie.
- Lăsați scaunul de baie să se usuce în poziție deschisă și pliați-l după ce s-a uscat complet pentru depozitare.
- Dacă mediul este umed, depozitați scaunul de baie și accesoriile sale într-un loc relativ uscat și lăsați-le să se usuce în poziție deschisă pentru a preveni apariția mușgaiului.
- Expunerea continuă și prelungită la lumina soarelui poate schimba culoarea materialelor produsului.

CURĂȚARE:

Pe lângă întreținere și inspecție, atât cadrul, cât și tapiteria pot fi curățate temeinic.

- Pentru a menține aspectul produsului, tapiteria trebuie curățată periodic.
- Cadrul scaunului de baie poate fi curățat cu o cârpă umedă și un detergent blând.
- Clătiți cu apă curată înainte de a lăsa să se usuce.
- **NU lăsați produsul umed.**
- Tapiteria scaunului de baie este detașabilă și poate fi spălată la mașină la 40°C/100°F folosind un detergent blând.
- Uscător la temperatură joasă pentru a usca tapiteria.
- Puneți tapiteria scaunului de baie într-un sac de rufe pentru a evita deteriorarea tapiteriei și a mașinii de spălat/uscător.
- Rama trebuie curățată regulat cu un detergent blând.
- Dacă produsul trebuie dezinfectat, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor de curățat.
- Protejați produsul de abraziuni, tăieturi și înțepături.
- Accesoriiile pentru scaunul de baie se pot spăla manual la 30°C / 85°F cu un detergent blând. Nu uscați accesoriiile la uscătorul de rufe.
- Le puteți atașa din nou la scaunul de baie după ce le-ați lăsat să se usuce complet în mod natural.
- Nu folosiți înălțător.
- Nu călcați.



AVERTISMENT (I):

- În caz de deteriorare sau funcționare defectuoasă a produsului, **NU** utilizați produsul și vă rugăm să contactați reprezentantul autorizat și instruit.
- Nu utilizați produsul în scopuri care nu sunt indicate în acest manual.
- MOBIK SA își declină orice responsabilitate pentru orice consecințe rezultate din utilizarea incorectă a acestui produs și din modificarea neautorizată a cadrului produsului.
- MOBIK SA își rezervă dreptul de a modifica informațiile conținute în acest document fără notificare prealabilă.
- Există o abatere de $\pm 3\%$ pentru dimensiunile produselor.
- Dacă baza cu roți sau suportul de bază al produsului sunt poziționate la 90 de grade, există un risc ridicat de răsturnare.



PROTECȚIA MEDIULUI

Dacă într-o zi descoperiți că produsul dumneavoastră trebuie înlocuit sau nu mai funcționează pentru dumneavoastră, luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor publice (aceasta este și semnificația semnului de reciclare afișat).
- 2) Contactați autoritățile publice, care vă vor informa cu privire la centrele de reciclare la care trebuie eliminat produsul dumneavoastră.
- 3) Eliminarea corectă a produsului dumneavoastră ajută la protejarea mediului, precum și la reciclarea componentelor produsului.

RAPORTARE INCIDENTE:

Orice incident grav care apare în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și unei autorități competente din statul membru în care locuiește utilizatorul și/sau pacientul.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:

Suntem singurii responsabili pentru declararea faptului că Dispozitivele Medicale menționate în această declarație sunt din Clasa de Risc Scăzut (Clasa I) și respectă cerințele Regulamentului European 2017/745 și, acolo unde este cazul, standardele și legislația la care se face referire.

GARANȚIE:

Produsul este garantat pentru o perioadă de trei (3) ani de la data achiziției.

Garanția acoperă defectele din fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, întreținerea deficitară, modificarea, utilizarea excesivă sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare ale produsului. De asemenea, NU acoperă piesele care se pot uza în timpul utilizării sau în timp, cum ar fi tapițeria, roțile sau frânele.

Daunele sau defectele cauzate de dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de aprovizionare (unde este cazul), transportatorii nu sunt acoperiți de garanție

Nicio piesă de service sau piesă de schimb nu este acoperită decât dacă a fost inspectată de un departament de service autorizat sau de producătorul produsului. Costurile de transport pentru bunurile în garanție vor fi suportate de către clientul-utilizator sau de către distribuitor.

FORMULAR DE RECLAMAȚIE ÎN GARANȚIE

DETALII CUMPĂRĂTOR:			
NUMELE COMPLET:			
ACHIZIȚII DATA:		TELEFON::	
SERIAL NUMĂR:			
LOT:			
DETALII DEALER			
NUMELE COMPLET:			
ADRESA:			
TELEFON:			
SEMNĂTURĂ ȘI SEMNĂTURĂ			

ANEXA A SPECIFICAȚII ȘI DIMENSIUNII AȘTĂZEIZ
ANNEX A SPECIFICATIONS & DIMENSIONS

REF	DESCRIERE	DESCRIERE
0803848	SCAUN DE BAIE „WAVE” ALBASTRU	Scaun de baie „WAVE” S albastru
0803849	SCAUN DE BAIE „WAVE” M ALBASTRU	Scaun de baie „WAVE” M Albastru
0803850	SCAUN DE BAIE „WAVE” L ALBASTRU	Scaun de baie „WAVE” L Albastru
0803851	SCAUN DE BAIE „WAVE” ROZ	Scaun de baie „WAVE” S roz
0803852	SCAUN DE BAIE „WAVE” M ROZ	Scaun de baie „WAVE” M roz
0803853	SCAUN DE BAIE „WAVE” L ROZ	Scaun de baie „WAVE” L roz
0803857	SCAUN DE BAIE „WAVE” CU BAZA CU ROȚI S ALBASTRU	Scaun de baie cu bază cu roți, albastru
0803858	SCAUN DE BAIE „WAVE” CU BAZA CU ROȚI ALBASTRU	Scaun de baie cu bază cu roți M, albastru
0803859	SCAUN DE BAIE „WAVE” CU BAZA CU ROȚI L ALBASTRU	Scaun de baie cu bază cu roți, L, albastru
0803860	SCAUN DE BAIE „WAVE” CU BAZA CU ROȚI S ROZ	Scaun de baie cu bază cu roți, culoare roz
0803861	SCAUN DE BAIE „WAVE” CU BAZA CU ROȚI M ROZ	Scaun de baie cu bază cu roți M roz
0803862	SCAUN DE BAIE „WAVE” CU BAZA CU ROȚI L ROZ	Scaun de baie cu bază cu roți, culoare roz, L

	0803848, 0803851	0803849, 0803852	0803850, 0803853	0803857, 0803860	0803858, 0803861	0803859, 0803862
SCHELET / CADRU	ALUMINIU, PLIERE/ ALUMINIU, PLIABIL	ALUMINIU, PLIERE/ ALUMINIU, PLIABIL	ALUMINIU, PLIERE/ ALUMINIU, PLIABIL	ALUMINIU, PLIERE/ ALUMINIU, PLIABIL	ALUMINIU, PLIERE/ ALUMINIU, PLIABIL	ALUMINIU, PLIERE/ ALUMINIU, PLIABIL
MATERIAL TEXTIL/ MATERIAL TEXTIL	PERFORAT POLIESTER MATERIAL TEXTIL CU PROPRIETĂȚI DECELERARE FLACĂRĂ/ POLIESTER ȚESĂTURĂ DE PLASĂ CU FOC RETARDANT PROPRIETĂȚI	PERFORAT POLIESTER MATERIAL TEXTIL CU PROPRIETĂȚI DECELERARE FLACĂRĂ/ POLIESTER ȚESĂTURĂ DE PLASĂ CU FOC RETARDANT PROPRIETĂȚI	PERFORAT POLIESTER MATERIAL TEXTIL CU PROPRIETĂȚI DECELERARE FLACĂRĂ/ PLASĂ DE POLIESTER MATERIAL TEXTIL CU FOC RETARDANT PROPRIETĂȚI	PERFORAT POLIESTER MATERIAL TEXTIL CU PROPRIETĂȚI DECELERARE FLACĂRĂ/ PLASĂ DE POLIESTER MATERIAL TEXTIL CU FOC RETARDANT PROPRIETĂȚI	PERFORAT POLIESTER MATERIAL TEXTIL CU PROPRIETĂȚI DECELERARE FLACĂRĂ/ PLASĂ DE POLIESTER MATERIAL TEXTIL CU FOC RETARDANT PROPRIETĂȚI	PERFORAT POLIESTER MATERIAL TEXTIL CU PROPRIETĂȚI DECELERARE FLACĂRĂ/ PLASĂ DE POLIESTER MATERIAL TEXTIL CU FOC RETARDANT PROPRIETĂȚI
BAZA	ALUMINIU, ME ANTIDERAPANT DEPARTAMENTUL SPRIJIN/ ALUMINIU, CU ANTIDERAPANT SPRIJIN SECȚIUNE	ALUMINIU, ME ANTIDERAPANT PARTE SPRIJIN/ ALUMINIU, CU ANTIDERAPANT SPRIJIN SECȚIUNE	ALUMINIU, ME ANTIDERAPANT DEPARTAMENT DE ASISTENȚĂ/ ALUMINIU, CU ANTIDERAPANT SECȚIUNEA DE ASISTENȚĂ	ALUMINIU, ME ANTIDERAPANT DEPARTAMENT DE ASISTENȚĂ/ ALUMINIU, CU SUPPORT ANTIDERAPANT SECȚIUNE	ALUMINIU, ME ANTIDERAPANT DEPARTAMENT DE ASISTENȚĂ/ ALUMINIU, CU SUPPORT ANTIDERAPANT SECȚIUNE	ALUMINIU, ME ANTIDERAPANT DEPARTAMENT DE ASISTENȚĂ/ ALUMINIU, CU SUPPORT ANTIDERAPANT SECȚIUNE
SPATE ROȚI / SPATE ROȚI	-	-	-	3” ROTARE & ANTIDERAPANT/ 3” PIVOTARE ȘI ANTI- PAPUCI	3” ROTARE & ANTIDERAPANT/ 3” PIVOTARE ȘI ANTI- PAPUCI	3” ROTARE & ANTIDERAPANT/ 3” PIVOTARE ȘI ANTI- PAPUCI
FAȚĂ ROȚI / FAȚĂ ROȚI	-	-	-	3” ROTARE & ANTIDERAPANT/ 3” PIVOTARE ȘI ANTI- PAPUCI	3” ROTARE & ANTIDERAPANT/ 3” PIVOTARE ȘI ANTI- PAPUCI	3” ROTARE & ANTIDERAPANT/ 3” PIVOTARE ȘI ANTI- PAPUCI
FRÂNE/ FRÂNE	-	-	-	ÎN TOATE ROȚI/ ÎN TOATE ROȚI	PE TOATE ROȚILE/ LA TOATE ROȚILE	PE TOATE ROȚILE/ LA TOATE ROȚILE
MAXIM ÎNCĂRCARE / SARCINĂ MAXIMĂ	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
ADÂNCIME SCAUN/ ADÂNCIMEA SEZUTULUI	28 cm	35 cm	40 cm	28 cm	35 cm	40 cm
UTIL LĂȚIME SCAUN/ SCAUN UTIL LĂȚIME	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm
ÎNĂLȚIME SPATE SCAUN/ SPĂTAR ÎNĂLȚIME	49 cm	60 cm	71,5 cm	49 cm	60 cm	71,5 cm

LUNGIME DEPARTAMENT SCHIMBARE/ VIȚEL SECȚIUNE LUNGIME	25 cm	29,5 cm	34 cm	25 cm	29,5 cm	34 cm
TOTAL LUNGIME / PER TOTAL LUNGIME	100 cm (ÎN INTEGRALITATE ORIZONTALĂ ZONĂ/ COMPLET APARTAMENT POZIȚIE)	123 cm (ÎN INTEGRALITATE ORIZONTALĂ ZONĂ/ COMPLET APARTAMENT POZIȚIE)	142,5 cm (ÎN INTEGRALITATE ORIZONTALĂ ZONĂ/ COMPLET APARTAMENT POZIȚIE)	117 cm	120 cm	123 cm
TOTAL LĂȚIME /PER TOTAL LĂȚIME	43,8 cm	43,8 cm	43,8 cm	51 cm	51 cm	51 cm
ÎNĂLȚIME SCAUN (MĂSURARE DIN PODEA)/ ÎNĂLȚIMEA SCAUNULUI (MĂSURĂ DE LA PODEA)	15-40 cm	15-46 cm	15-51 cm	84 cm	90 cm	94 cm
VÂRSTĂ	1-6 ani	4-12 ani	9-16 ani	1-6 ani	4-12 ani	9-16 ani



Reglarea spătarului scaunului:

Ridicați inelul în D de pe spatele spătarului pentru a regla unghiul spătarului.

Nu mai trageți de inelul în D odată ce spătarul scaunului se află la unghiul dorit și asigurați-vă că bara este introdusă în orificiul din secțiunea de conectare dintre spătar și scaun.

Reglarea spătarului:

Ridicați inelul în D de pe spatele spătarului pentru a regla unghiul spătarului.

Nu mai trageți de inelul în D odată ce spătarul se află la unghiul dorit și asigurați-vă că bara este introdusă în orificiul din piesa de conectare dintre spătar și scaun.



Reglarea secțiunii tibiei:

Apăsați și țineți apăstate ambele butoane.

Rotiți suportul pentru tibie în poziția dorită, eliberați ambele butoane până când se fixează în poziție cu un clic.

Reglarea suportului pentru gambe:

Apăsați și țineți apăstate ambele butoane.

Rotiți suportul pentru tibie în poziția dorită, eliberați ambele butoane până când se fixează în poziție cu un clic.



Reglarea secțiunii de susținere din spate:

Apăsați și țineți apăstate ambele butoane.

Rotiți secțiunea de susținere din spate în poziția dorită, eliberați ambele butoane până când se fixează în poziție cu un clic.

Reglarea picioarelor de susținere din spate:

Apăsați și țineți apăstate ambele butoane.

Rotiți picioarele de susținere din spate în poziția dorită, eliberați ambele butoane până când se fixează în poziție cu un clic.



Reglarea secțiunii de susținere din spate și din față:


Apăsați și țineți apăsat ambele butoane.

Rotiți secțiunile de susținere din spate și din față în poziția dorită, eliberați ambele butoane până când se fixează în poziție cu un clic.

Reglarea secțiunii piciorului de susținere din spate și din față:

Apăsați și țineți apăsat ambele butoane.

Rotiți secțiunile de susținere din spate și din față în poziția dorită, eliberați ambele butoane până când se fixează în poziție cu un clic.

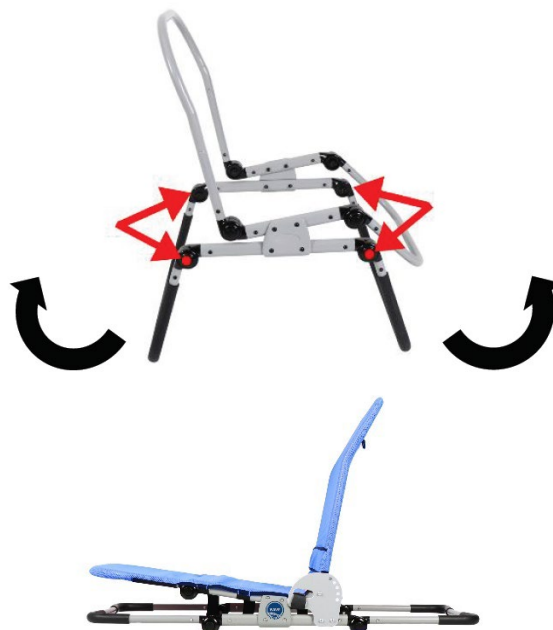


Scaun de baie pliabil

Vă rugăm să consultați următoarele imagini conexe.

Scaun de baie pliabil

Vă rugăm să consultați următoarele imagini aferente.

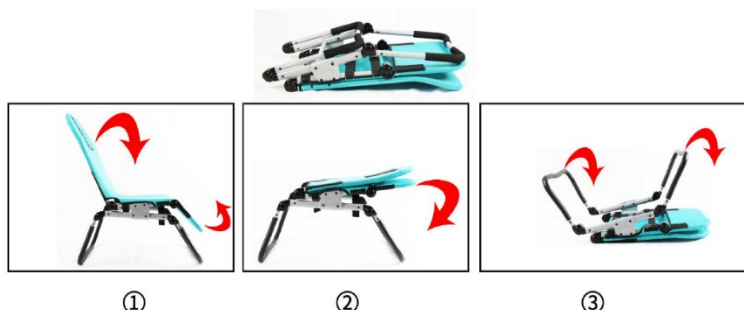


Îndepărtarea husei scaunului de baie

Vă rugăm să consultați următoarele imagini conexe.

Îndepărtarea husei scaunului de baie

Vă rugăm să consultați următoarele imagini aferente.

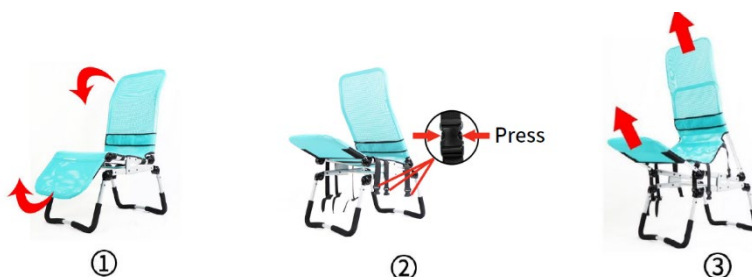

Asamblarea bazei cu roți

Vă rugăm să consultați următoarele imagini aferente. Pentru asamblare, apăsați și țineți apăsat butonul de pe tubul subțire, apoi introduceți-l în tubul mai mare până când butonul iese din orificiul din tubul gros. După ce vă asigurați că baza este fixată în siguranță și stabilă, este gata de utilizare.

Asamblarea bazei cu roți

Vă rugăm să consultați următoarele imagini aferente. Pentru asamblare, apăsați și țineți apăsat butonul de pe tubul subțire, apoi introduceți-l în tubul mai mare până când butonul iese din orificiul din tubul gros. După ce v-ați asigurat că suportul este fixat în siguranță și stabil, acesta este gata de utilizare.




Plierea bazei cu roți

Vă rugăm să consultați următoarele imagini conexe.

Plierea bazei cu roți

Vă rugăm să consultați următoarele imagini aferente.

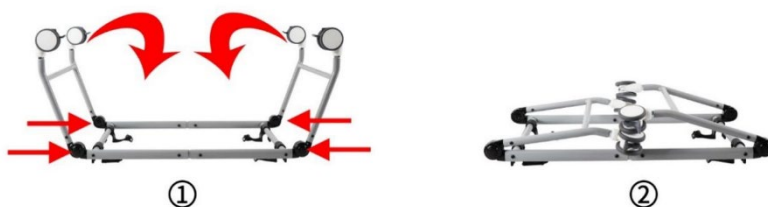


Așezarea scaunului de baie pe baza cu roți.

Vă rugăm să consultați următoarele imagini conexe.

Așezarea scaunului de baie pe baza cu roți.

Vă rugăm să consultați următoarele imagini aferente.

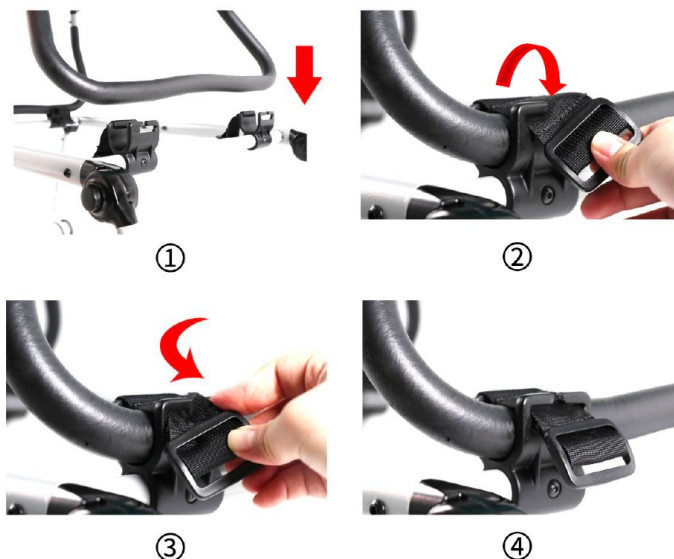

Roți pivotante


Vă rugăm să consultați următoarele imagini conexe.

Pentru a evita căderile sau rănirile, blocați întotdeauna toate roțile atunci când așezați sau scoateți utilizatorul.

Roți cu bază cu roți

Vă rugăm să consultați următoarele imagini aferente.

Pentru a evita căderile sau rănirile, blocați întotdeauna toate roțile atunci când așezați sau scoateți utilizatorul.

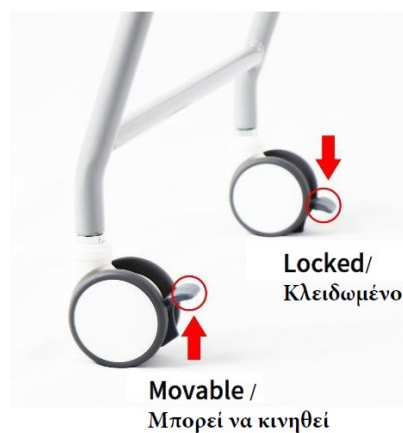

Așezarea accesoriilor pe scaunul de baie

Vă rugăm să consultați următoarele imagini conexe.

Atașarea accesoriilor la scaunul de baie

Vă rugăm să consultați următoarele imagini aferente.

Head Lateral Support/ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΦΑΛΗΣ



Chest Belt/ ΖΩΝΗ ΣΤΗΘΟΥΣ



Leg Straps/ ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΗΡΟΥ



Calf Straps/ ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΝΗΜΗΣ



Fixed Pelvic Belt/ Σταθερή ζώνη συγκράτησης περιοχής κοιλιάς



ANEXA C. SIMBOΛURIBOΛA ANEXA C. SYMBOLURS

Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual

	Ιατρική Συσκευή Medical Device		Σήμα συμμόρφωσης CE CE Mark
	Κατασκευαστής Manufacturer		Ημερομηνία Παραγωγής Production Date
	Κωδικός Προϊόντος Product Number		Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Read the instruction for use
	Σειριακός Αριθμός Serial Number		Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο Do not use if Package is Damage
	Αριθμός Παρτίδας Batch Number		Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά Right Way Up
	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Unique Device Identification		Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια Keep away from sunlight
	Διατηρήστε Στεγνό Keep Dry		Ύψος στοίβαξης 3 κιβώτια Stacking Height
	Χειριστείτε με προσοχή Handle With Care		Εύθραυστο Fragile
	Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο In Door Use Only		Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων Waste Electrical and Electronic Equipment Directive

