

GR
EN



INSTRUCIUNI DE UTILIZARE:NOPTIERĂ

MANUAL DE UTILIZARE:NOPTIERĂ

MOBIACARE[®]
MEDICAL EQUIPMENT

REF:0806647, 0806586

Utilizare preconizată:

Aceste noptiere sunt echipamente auxiliare pentru paturi de spital sau paturi de tip spitalicesc. Sunt utilizate în principal ca spațiu de depozitare pentru obiecte personale sau medicale.

Pot fi așezate pe ambele părți ale patului. Au o suprafață exterioară, un raft glisant, un sertar și un dulap.

Avertismente generale:

- NU utilizați acest produs sau orice alt produs echipamentul opțional disponibil, cu excepția cazului în care ați citit mai întâi și ați înțeles integral acest manual de utilizare. Dacă nu înțelegeți avertismentele, precauțiile sau instrucțiunile, contactați un profesionist din domeniul sănătății, un distribuitor sau personal tehnic înainte de a încerca să utilizați dispozitivul, în caz contrar putând rezulta vătămări corporale sau daune materiale.
- Depozitați produsul departe de surse de căldură.
- Fiți atenți când sunt copii în preajmă și NU lăsați copiii să se joace cu produsul.
- Nu depășiți sarcina utilă maximă.

Înainte de utilizare:

1. Verificați dacă rama este deteriorată pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului. Nu există crăpături sau rupturi în cadru.
2. Verificați dacă produsul este asamblat corect.
3. Acordați atenție strângerii șuruburilor și a roților.
4. Asigurați-vă că suprafața podelei pe care va susține noptiera este plană.
5. Efectuați ajustări ale produsului fără sarcină.



În timpul utilizării:

Nu depășiți niciodată greutatea maximă admisă a mesei. Pentru partea superioară < 20 Kg Pentru raft < 5 kg Pentru sertar < 10 kg



Întreținere și curățare:

- Curățați suprafața noptierei după fiecare utilizare, cu o cârpă moale.
- Curățați frecvent fiecare parte a produsului.
- Petele, uleiurile sau reziduurile trebuie îndepărtate de pe suprafața noptierei.
- Folosiți doar o cârpă umedă și săpun delicat pe suprafețe care necesită curățare.
- Apoi, uscați bine cu o cârpă uscată înainte utilizați produsul. Nu lăsați noptiera udă.
- Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant comun, ușor.



ATENȚIE (!) :

- În cazul în care apare o problemă **NU** utilizați produsul până la repararea acestuia și contactați reprezentantul autorizat și instruit
- Utilizarea acestui produs este interzisă în scopuri diferite de cele specificate în acest manual
- MOBIAC S.A. declină orice responsabilitate pentru daunele cauzate rezultă din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din utilizarea diferită de cea specificată în acest manual.
- MOBIAC S.A. își rezervă dreptul de a face modificări la produsul și manualul următor fără notificare prealabilă, pentru a-i îmbunătăți caracteristicile.



Protecția mediului

Dacă într-o zi descoperiți că produsul dumneavoastră trebuie înlocuit sau nu vă mai este util, gândiți-vă la protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu alte deșeuri municipale (aceasta este semnificația simbolului de reciclare).
- 2) Contactați autoritățile municipale pentru a vă indica punctele unde puteți elimina produsul pentru reciclare.
- 3) Prin eliminarea produsului care nu mai este util la punctul de reciclare corect, contribuiți la protejarea mediului și la reutilizarea materialelor din care este compus produsul dumneavoastră.

	0806647 (1)	0806586 (2)
Schelet:	Laterale metalice Suprafețe	Laterale metalice Suprafețe
	Restul părților sunt din plastic	Restul părților sunt din plastic
Culoare:	Alb	Bej cu autocolante în culoarea lemnului
Dimensiuni (LxIxÎ):	44x46x78 cm	50x50x70 cm
Cu roți:	Are patru roți	Are patru roți
	Are două Suporturi metalice și la două Suprafețe laterale	Are două Suporturi metalice și la două Suprafețe laterale
Greutate netă:	14,2 kg	16,6 kg
Greutate brută:	15,5 kg	18,1 kg



Garanție:

Produsul beneficiază de o garanție de un (1) an de la data achiziției.

Garanția acoperă defectele din fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, întreținerea defectuoasă, modificarea, abuzul sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare ale produsului.

De asemenea, NU acoperă piesele de uzură, cum ar fi frânele, roțile, saboții și orice altceva care s-ar putea uza în timpul utilizării sau în timp.

De asemenea, nu sunt acoperite de garanție daunele sau defectele cauzate de: dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare cu energie electrică (unde este cazul), companii de transport.

Formular de garanție

Detalii cumpărător

Numele complet:..... Data achiziției:.....S/N

..... LOT:

..... Telefon:

Detalii magazin

Numele mărcii:..... Adresa:..... Telefon:.....

Ștampilă de magazin

Importator:

MOBIAC SA

Kathiana Akrotiri, Chania, Creta. T:

+30 28210 63222,

www.mobiakcare.com

MOBIAC®
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977

Utilizare preconizată:

Aceste noptiere sunt echipamente auxiliare pentru paturi de îngrijire medicală sau paturi de spital. Sunt utilizate în principal ca zonă de depozitare pentru obiecte personale sau medicale.

Poate fi așezat pe ambele părți ale patului.

Au o placă superioară, un raft glisant, un sertar și un dulap.

Avertismente generale:

- Dacă nu citiți acest manual de utilizare, este de preferat să nu utilizați acest produs sau o altă piesă disponibilă.
Dacă nu înțelegeți modul de utilizare sau precauțiile, vă rugăm să contactați distribuitorul sau persoana tehnică competentă înainte de a utiliza produsul, deoarece acest lucru poate provoca daune.
- Țineți dispozitivul departe de sursele de căldură.
- Fiți atenți când se află copii în apropiere și nu le permiteți să se joace cu produsul.
- Nu depășiți sarcina utilă maximă.

Înainte de utilizare:

1. Verificați dacă rama este deteriorată pentru a garanta o utilizare sigură a produsului. (Nu există crăpături sau fracturi în ramă)
2. Verificați dacă dispozitivul este asamblat corect.
3. Acordați atenție blocării butoanelor, șuruburilor și roților.
4. Asigurați-vă că suprafața podelei care va susține noptiera este plană
5. Efectuați operațiunile de reglare fără sarcină.



În timpul utilizării:

Nu depășiți greutatea maximă admisă pentru noptieră

Pentru partea superioară <20 kg
Pentru raft < 5 kg
Pentru sertar <10 kg



Întreținere și curățare:

- Curățați suprafața noptierei după fiecare utilizare cu o lavetă moale.
- Curățați frecvent fiecare secțiune a produsului.
- Murdăria, uleiul sau resturile trebuie îndepărtate de pe suprafața noptierei.
- Folosiți doar o lavetă și săpun blând pe suprafețele care necesită curățare.
- Apoi, folosiți o lavetă curată și uscați bine înainte de a utiliza produsul. Nu lăsați noptiera udă.
- Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor



AVERTISMENT (!)

- În caz de deteriorare sau funcționare defectuoasă a produsului, NU utilizați produsul și vă rugăm să contactați reprezentantul autorizat și instruit.
- Nu utilizați produsul în scopuri care nu sunt indicate în acest manual
- MOBIAK SA își declină orice responsabilitate pentru orice consecințe rezultate din utilizarea incorectă a acestui produs și din modificarea neautorizată a cadrului produsului.
- MOBIAK SA își rezervă dreptul de a modifica informațiile conținute în acest document fără notificare prealabilă.



Protecția mediului:

Dacă într-o zi descoperiți că produsul dumneavoastră trebuie înlocuit sau nu mai funcționează pentru dumneavoastră, luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor publice (aceasta este și semnificația semnului de reciclare afișat).
- 2) Contactați autoritățile publice, care vă vor informa despre centrele de reciclare la care trebuie eliminat produsul dumneavoastră.
- 3) Eliminarea corectă a produsului dumneavoastră ajută la protejarea mediului, precum și la reciclarea componentelor produsului.

	0806647 (1)	0806586 (2)
Cadru:	Suprafețe laterale metalice	Suprafețe laterale metalice
	Alte piese din plastic	Alte piese din plastic
Culoare:	Alb	Bej cu autocolante pe pământ de lemn
Dimensiuni	44x46x78 cm	50x50x70 cm
Roți:	Există patru role	Există patru role
	Există două suporturi metalice pe ambele părți	Există două suporturi metalice pe ambele părți
Greutate netă:	14,2 kg	16,6 kg
Greutate brută:	15,5 kg	18,1 kg



Garanție:

Produsul este garantat pentru o perioadă de un (1) an de la data achiziției.

Garanția acoperă defectele de fabrică și **NU** acoperă daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, întreținerea deficitară, modificarea, utilizarea excesivă sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare ale produsului. De asemenea **NU** acoperă piesele care se pot uza în timpul utilizării sau în timp.

Daunele sau defectele cauzate de dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare (unde este cazul), transportatorii nu sunt acoperite de garanție.

Formular de reclamație în garanție:

Datele cumpărătorului

Nume:..... **Data achiziției:**.....**S/N**

..... **LOT:**

.....**Telefon:**

Date despre revânzător

Nume:..... **Adresa:**..... **Telefon:**.....

Ștampilă de revânzător

Importat de:

MOBIAK SA

Kathiana Akrotiriou Chania-Creta,

Tel.: +30 28210 63222, www.mobiakcare.com

MOBIAK[®]
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977