


GHID DE UTILIZARE

RĂȘINA BLUECAST
DENTAL CAST

AFLĂ DETALII



www.filamente3d.ro

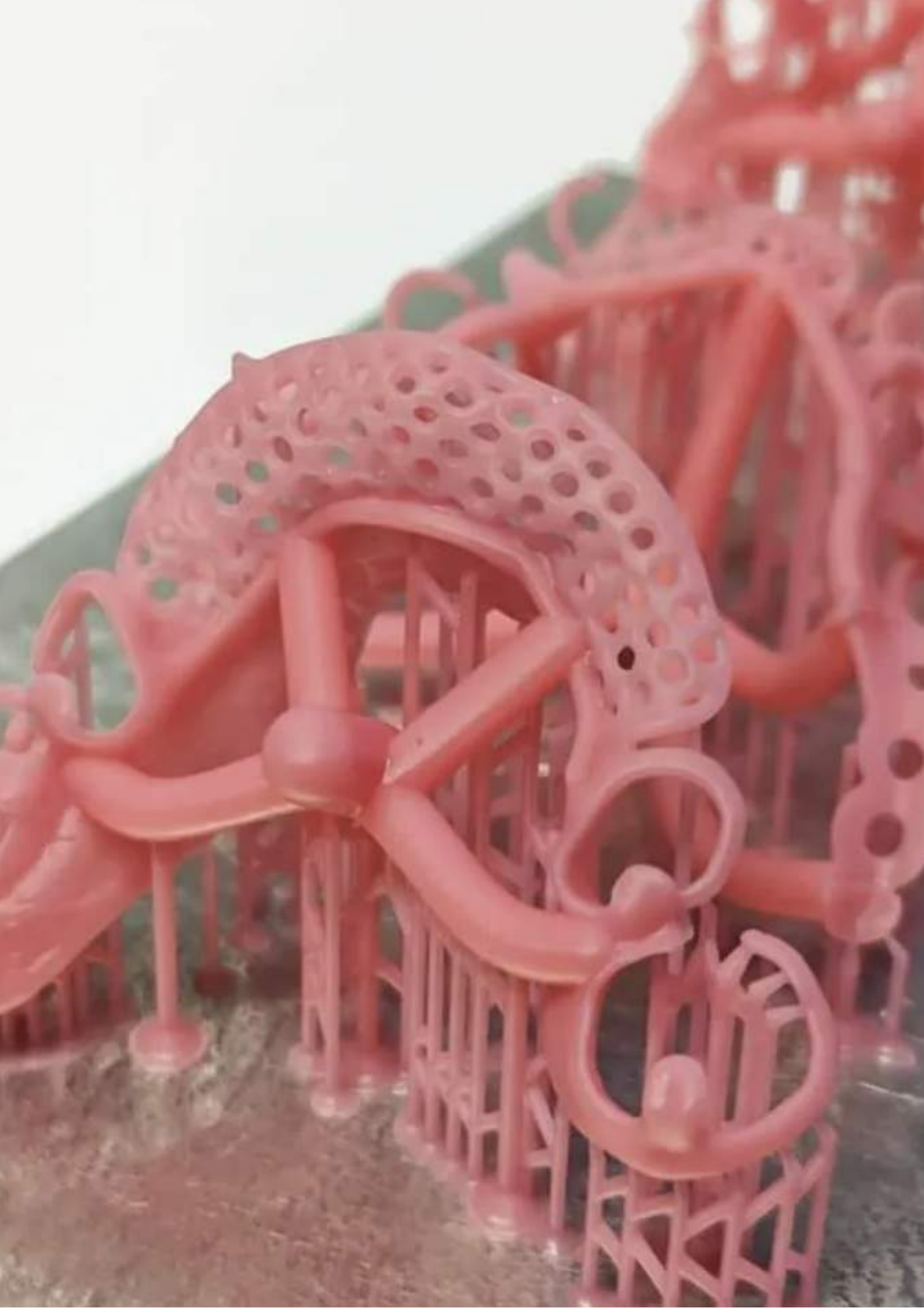

DENTAL CAST

BLUECAST

BLUE DENTAL CAST

Suggest applications:

Dental casting

Printability **EXCELLENT / EXTREME** ★★★★★+

Castability
by service **GOOD** ★★★★★+

SLA

DLP

LCD

www.filamente3d.ro





DENTAL CAST

ÎNAINTE DE PRINTARE

Cu BlueDent Dental Cast, puteți aranja cu ușurință modelele folosind câteva suporturi mici. Suportul general (raft) nu este necesar.

Efectuați calibrarea axei z urmând instrucțiunile producătorului imprimantei.

Înainte de utilizare, vă recomandăm să încălziți rășina folosind cuptoare cu microunde (nu depășește niciodată 30 de secunde), curățători cu ultrasunete, aer cald, încălzitor de biberoane etc.

Înainte de a turna rășina în rezervorul de rășină, agitați sticla timp de un minut.

Pentru o debaratare corectă, lăsați rășina să se odihnească în rezervorul de rășină timp de 5 minute înainte de a începe imprimarea.

Pentru a accelera procesul, puteți, de asemenea, să filtrați rășina pentru a elimina bulele de aer sau să aspirați sticla deschisă.

Greșeala de a nu filtra rășina după fiecare imprimare sau neglijarea încălzirii rășinii înainte de fiecare imprimare poate duce la eșecuri de imprimare.

Nu depozitați rășina în rezervor.

Vă rugăm să scoateți rășina din rezervorul imprimantei, să o filtrați și să o păstrați în sticla originală.

www.filamente3d.ro



DENTAL CAST

SETĂRI DE PRINTARE

CUM SĂ UTILIZAȚI PROFILELE DE IMPRIMARE CHITUBOX

Pentru a configura parametrii de imprimare, trebuie să adăugați mai întâi o imprimantă.

Dacă nu ați adăugat încă o imprimantă, vă rugăm să verificați mai jos cum să adăugați o imprimantă.

O imprimantă poate avea mai multe profiluri; vă puteți gestiona profilurile în Slicing Profile Panel, unde vă puteți adăuga, edita, șterge, reseta, importa și exporta profilurile.

Descărcați pachetul de fișiere de configurare pentru imprimanta dvs. și salvați-l pe computer [CLICK AICI](#)

Deschideți instrumentul de setare făcând clic pe pictograma albastră „SETĂRI” din partea dreaptă.

Selectați opțiunea „IMPORT PROFIL” din butonul din partea de sus.

Selectați fișierul de configurare .cfg pe care l-ați salvat anterior.

Pentru a adăuga imprimanta, deschideți instrumentul de setare făcând clic pe pictograma albastră „SETĂRI” din partea dreaptă și faceți clic pe „+” de jos din partea stângă sus. Selectați dispozitivul dvs. din cel disponibil.

[Urmăriți tutorialul video \(EN\)](#)

www.filamente3d.ro



DENTAL CAST

CURĂȚARE POST-PRINTARE

Modelele imprimate cu această rășină sunt foarte dure și rigide.

Curățați printurile utilizând alcool etilic 91% până la 99% sau alcool izopropilic (IPA).

Când utilizați un aparat de curățare cu ultrasunete, rulați un ciclu de 3 minute (procedura recomandată).

Cu o mașină de spălat pentru rășină, rulați un ciclu de aproximativ 5 minute.


Pentru imersarea simplă într-o baie cu alcool, așteptați aproximativ 8 minute.

După spălare, uscați modelele cu aer comprimat.

Dacă aerul comprimat nu este disponibil, se poate folosi un uscător de păr pentru a usca modelele.

Este necesar un timp minim de post-întărire de 10 minute.

După post-întărire UV, o spălare rapidă cu alcool nou-nouț asigură rezultate excelente de turnare.

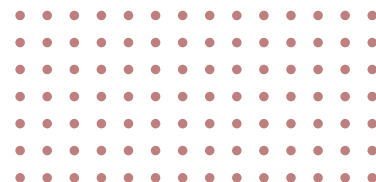




DENTAL CAST




www.filamente3d.ro



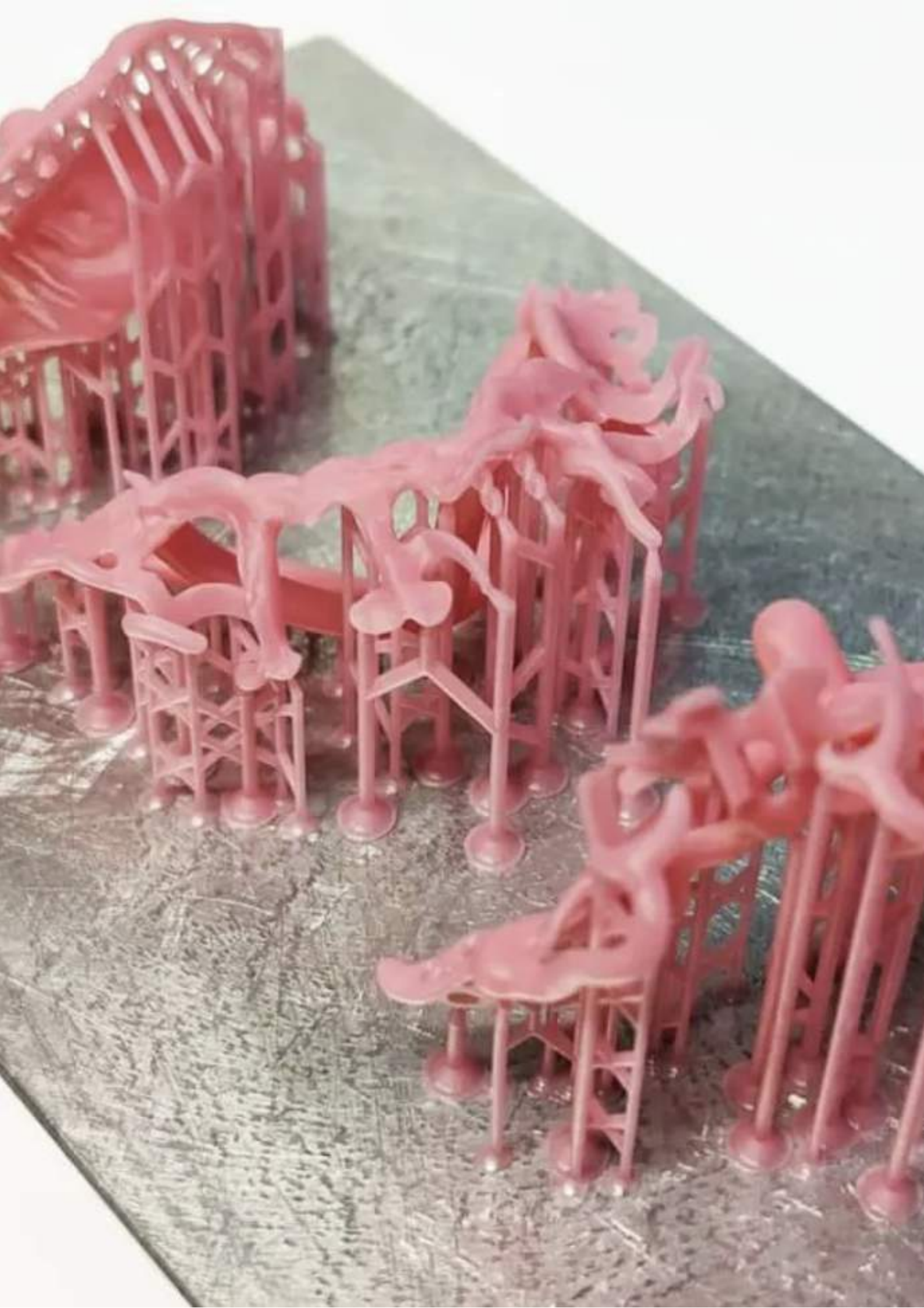

DENTAL CAST

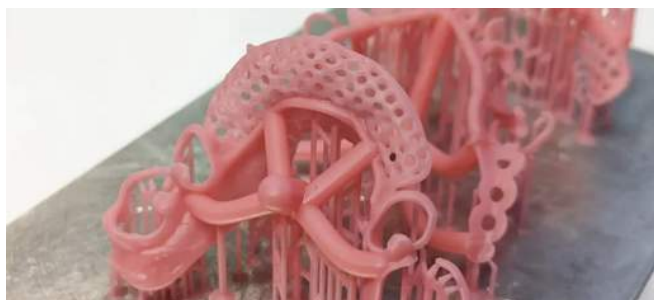

DISTRIBUTOR EXCLUSIV AUTORIZAT ÎN ROMÂNIA

ATELIER CONCEPT&DESIGN STUDIO SRL
www.FILAMENTE3D.ro

str. Valea Merilor nr. 39, 011274, București
comenzi@filamente3d.ro
0799-780-393

www.filamente3d.ro

