



SURUB ODONTOID ATLAS TEHNICA CHIRURGICALĂ

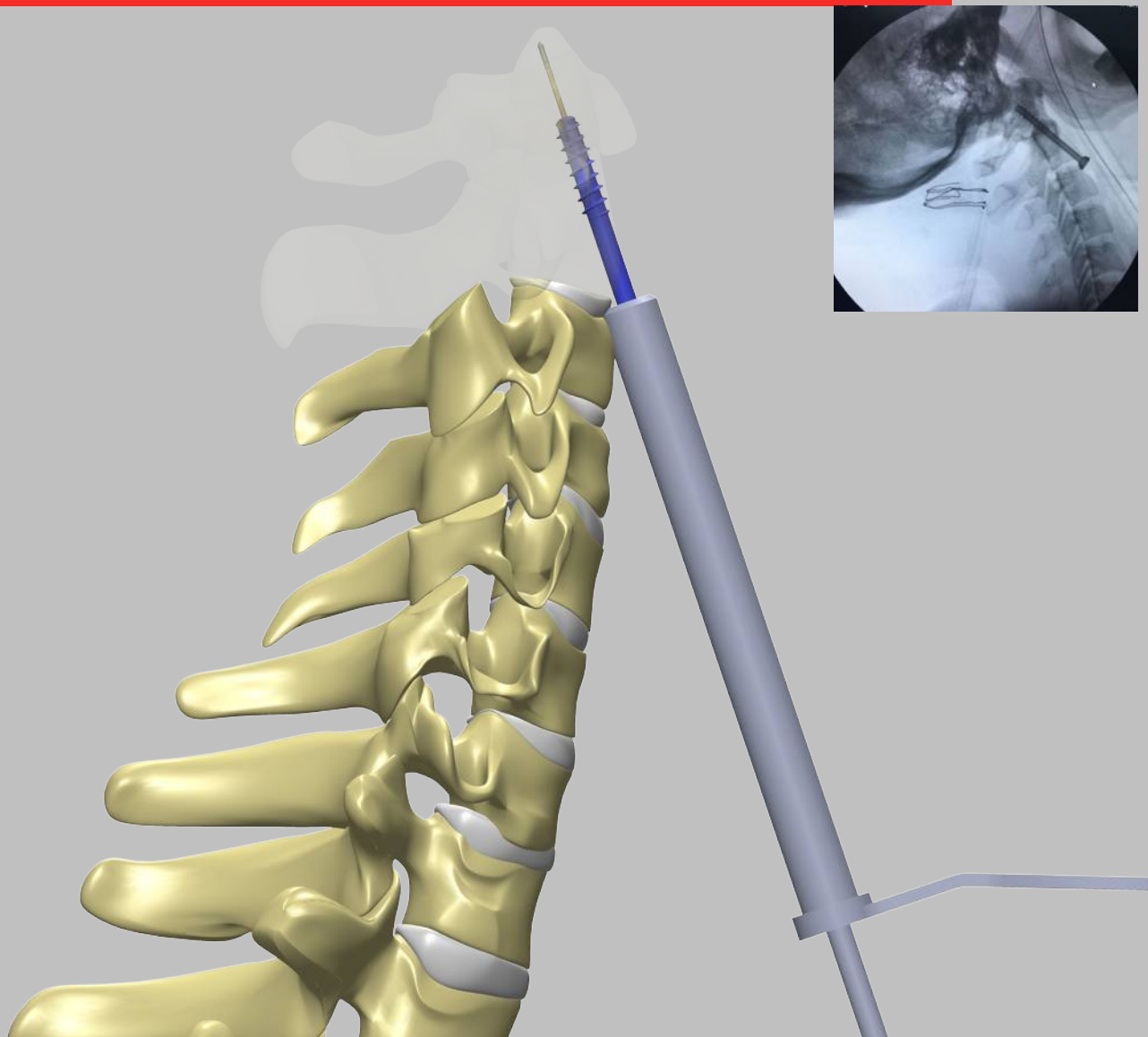


TITAN
CANULAT

 **OSIMPLANT**
Spine Restoration Technology




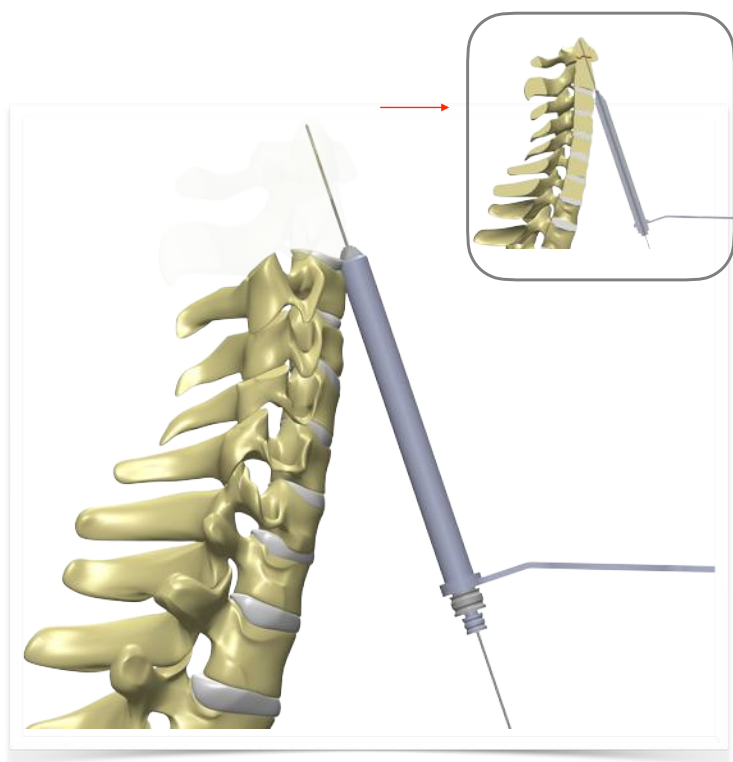


După incizia chirurgicală, se pun dilatatoare formate din 3 bucăți și se fixează linia de fractură prin deplasarea înainte prin dilatator până la odontoidul firului Kirschner.

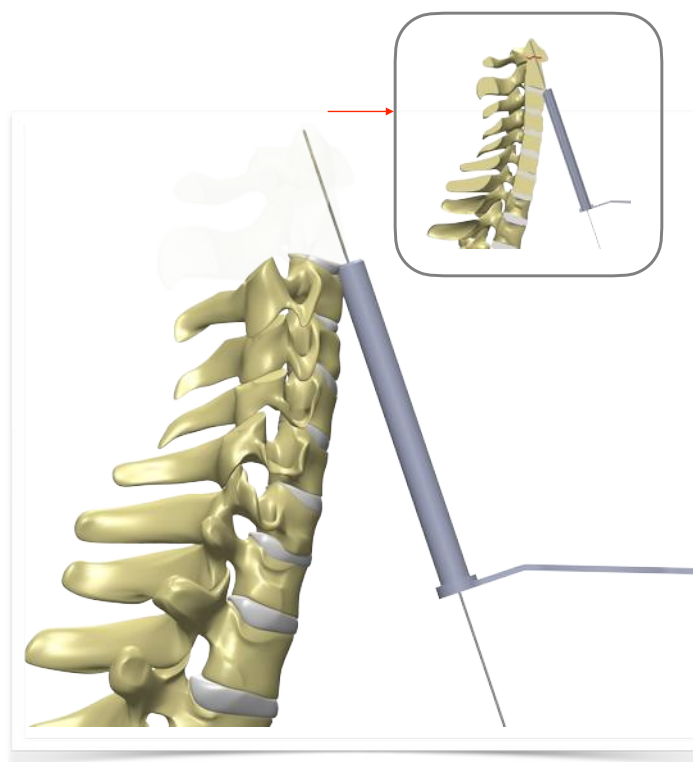


Cel mai larg dilatator mare rămâne în zona chirurgicală, iar celelalte sunt îndepărtate din câmpul chirurgical.

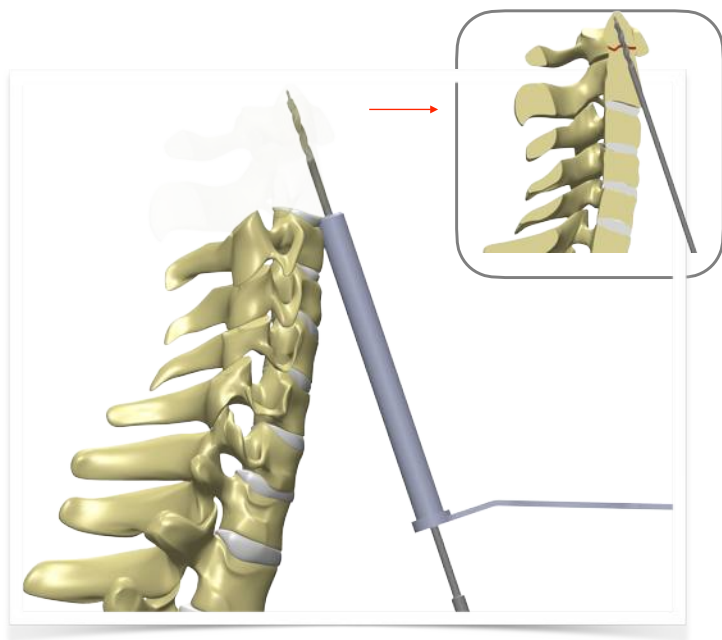


Găurirea se face prin cel mai larg dilatator mare și prin sârmă Kirschner.

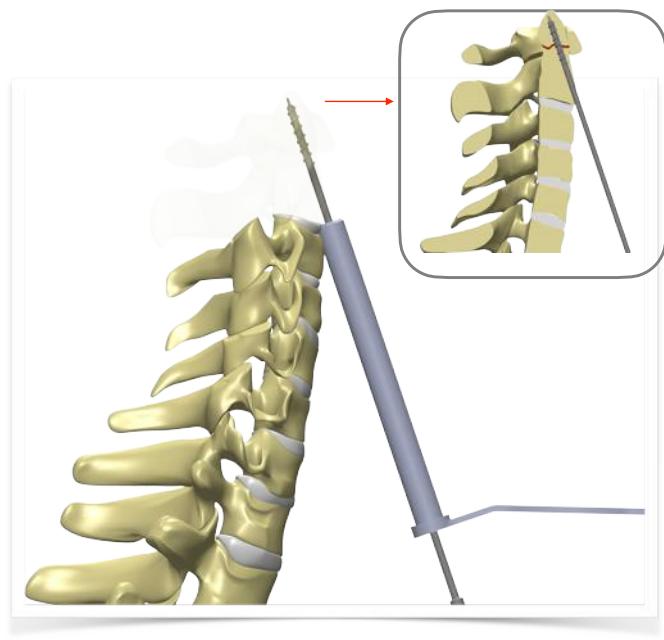


După găurire, procesul de filetare se face în același mod.

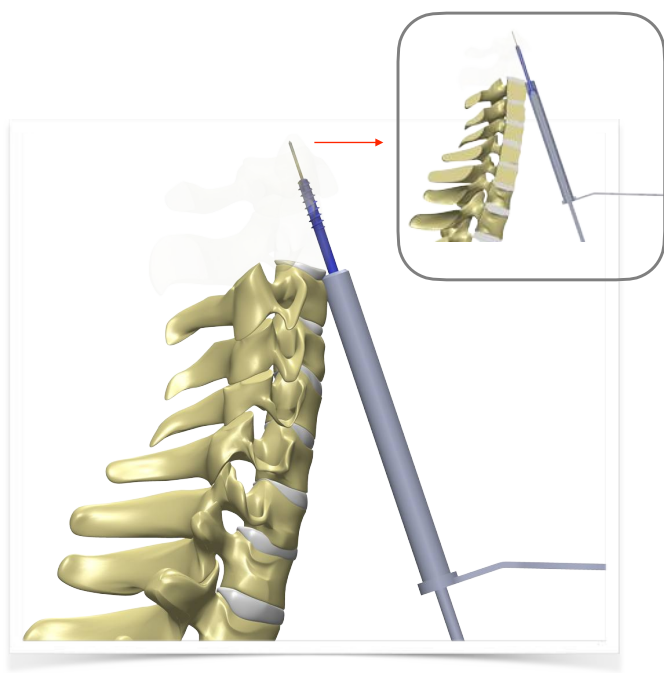





După atingere, șurubul odontoid ATLAS este implantat prin sârmă Kirschner cu șurubelniță canulată și dilatator mare cu mâner drept.

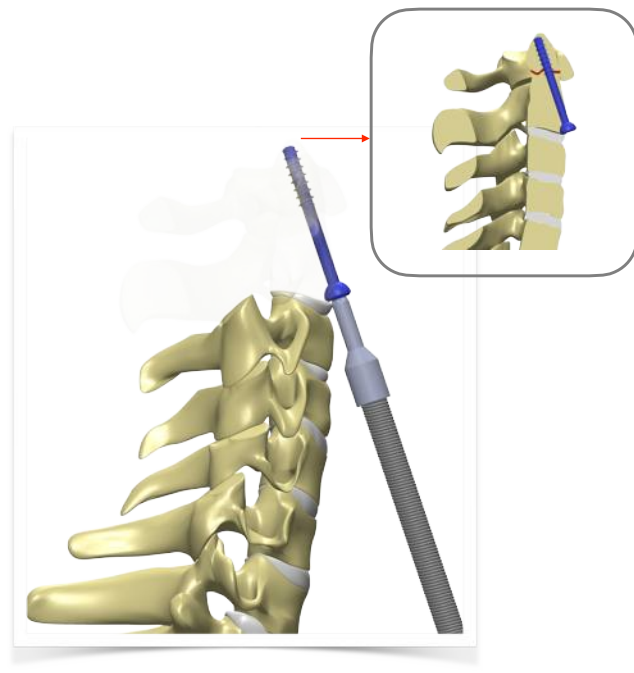

După atingere, firul kirschner este îndepărtat și șurubul odontoid ATLAS cu mâner drept și șurubelniță flexibilă este implantat în dilatatorul mare.

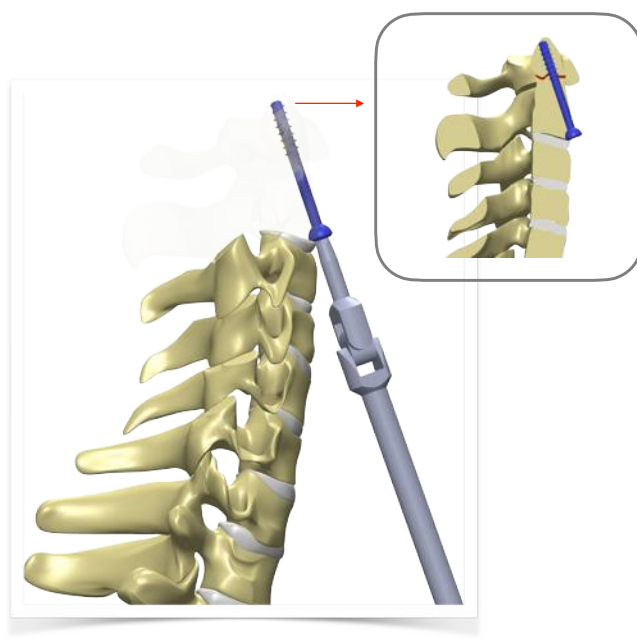

După atingere, firul kirschner este îndepărtat și șurubul odontoid ATLAS cu mâner drept și șurubelniță articulată este implantat ca mână liberă.

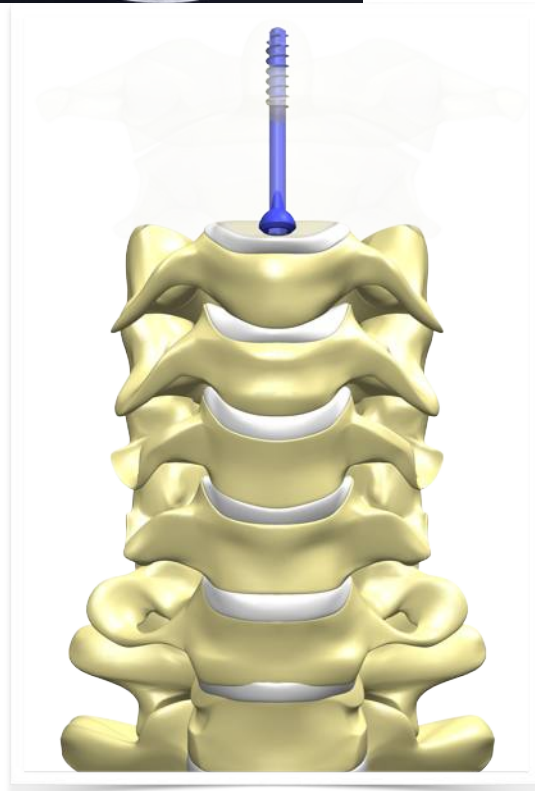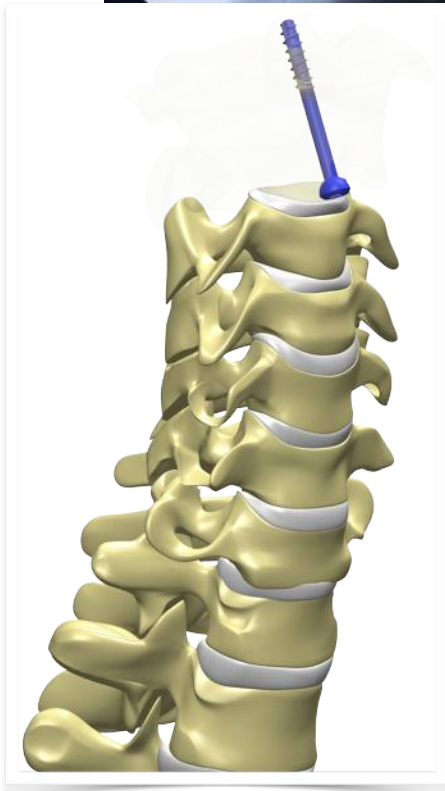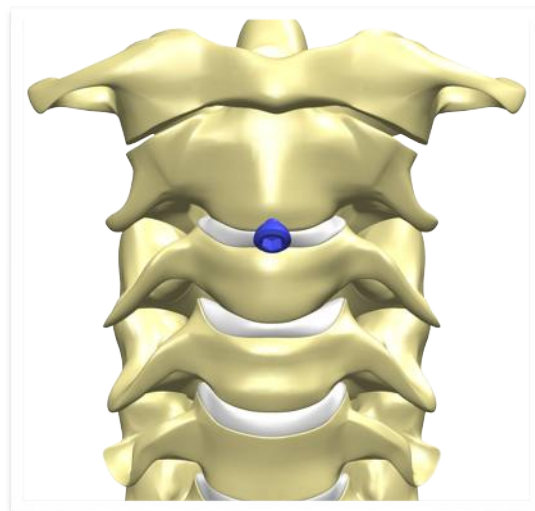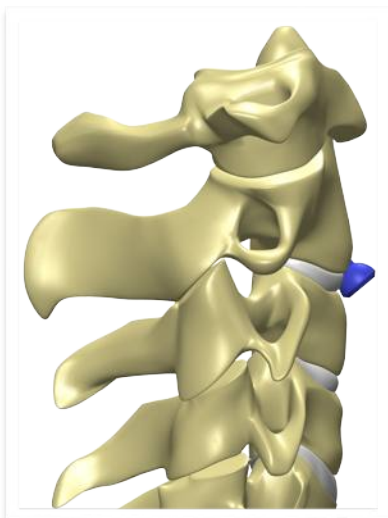




Dilatator mic



Dilatator mediu

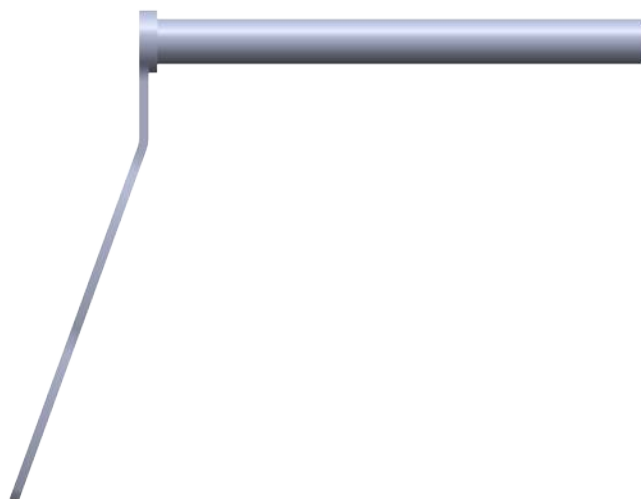

Dilatator mare



Sârmă
Kirschner



Burghiu canulat



Tap canulat



Surubelniță canulată




Mâner drept




Surubelniță articulară



Surubelniță flexibilă

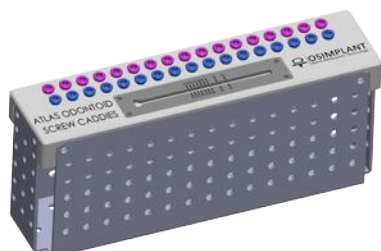

Rack șuruburi

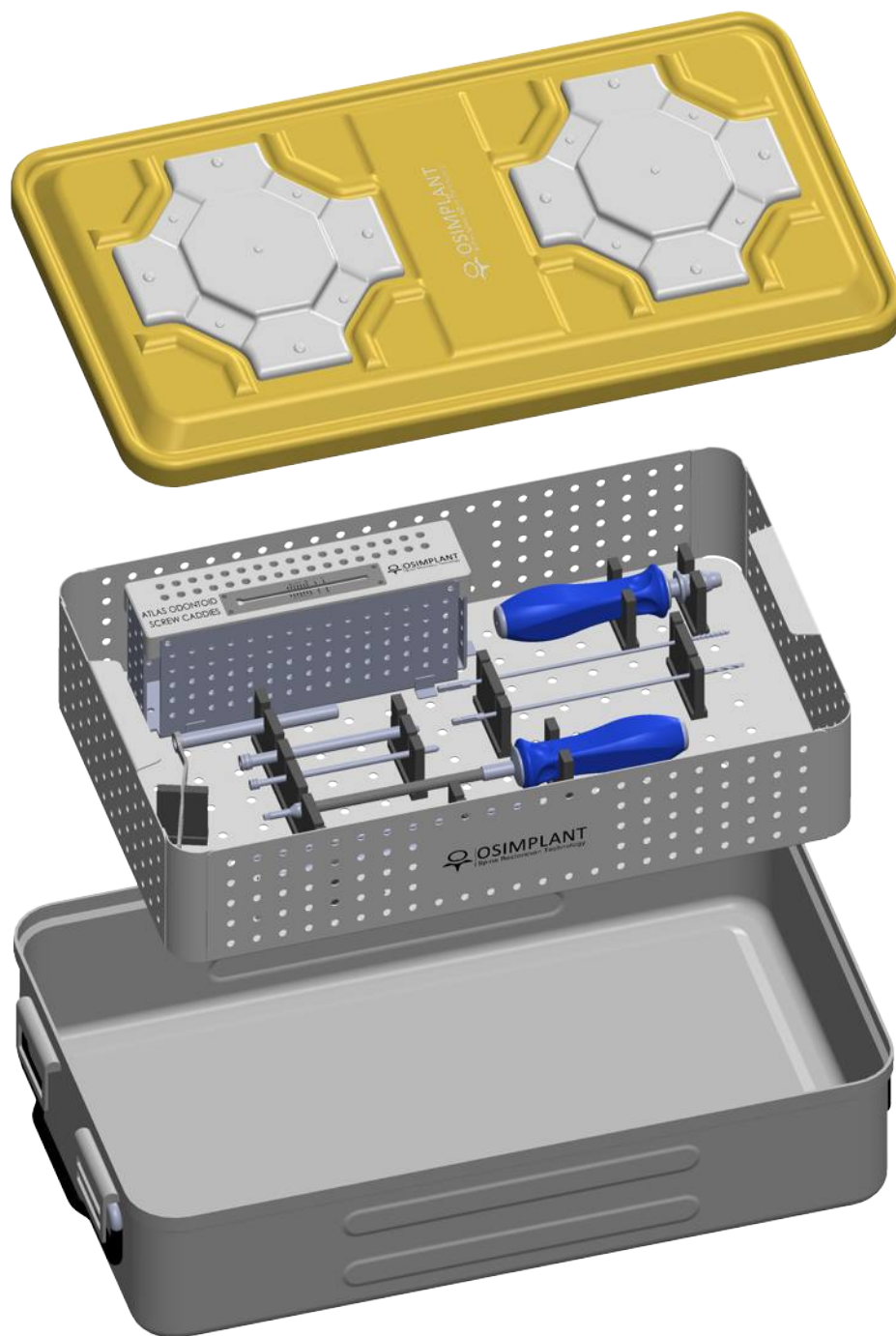

Adresa:

Mustafa Kemal Mahallesi, 2133. Sok No: 4/2 Royale

Office PC: 06510 Çankaya/Ankara, Turcia Telefon:

+90 312 473 82 80

E-mail:

sales@osimplant.com.tr

www.osimplant.com

