


# DISKOM

*DISPOZITIV PERCUTANT DISCECTOMIE /  
NUCLEOPLASTIE*

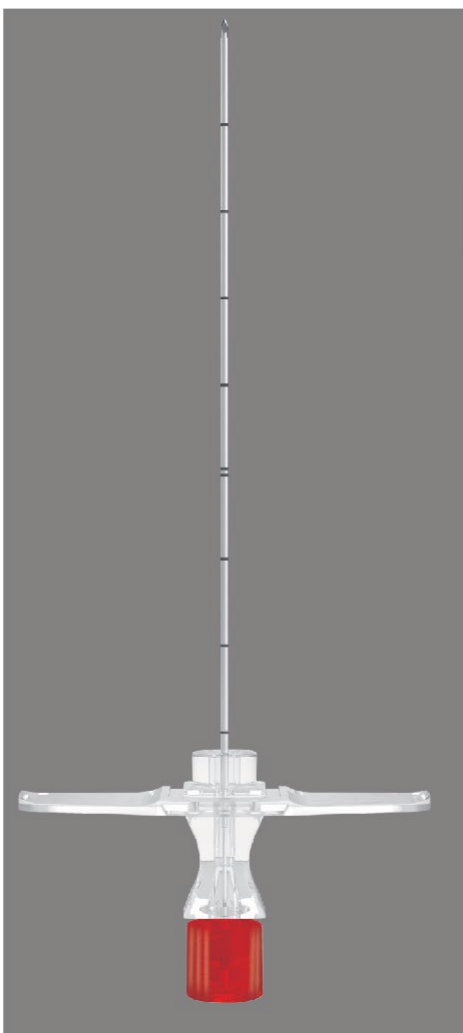

**bpb**medica

# Diskom

Folosind Diskom, neurochirurgii reduc presiunea de pe rădăcina nervului prin eliminarea nucleului discului printr-o procedură minim invazivă.



## PROCEDURĂ:

- Introduceți acul de acces în disc prin ghidul fluoroscopic
- Îndepărtați stiletul și introduceți dispozitivul în canulă, apoi atașați partea pozitivă a camerei de colectare la partea negativă pe canula acului de acces.
- Porniți dispozitivul
- Avansați 1cm și apoi avansați în față și în spate. Repetați această mișcare timp de 2/3 min. Este o alternativă a mișcării rotative.
- Nucleul este îndepărtat din disc și înțră în camera de colectare și de-a lungul stiletul probei
- Îndepărtați dispozitivul

## BENEFICIILE DISKOM:

- Integritatea inelara este menținută
- Reabilitare rapidă
- Procedura durează 15 spre 30 minute
- Îndepărtarea materialului de disc
- Materialul poate fi folosit pentru biopsie de disc
- Folosibil în coloana lombară, toracică și cervicală
- Diferente lungimi și mărimi sunt disponibile pentru a crea un dispozitiv specific.

### Ghid de comandă DISKOM cu gaură laterală și vârf închis

Mărimi	17G	19G	Procedură	Packaging
8cm	Indisponibil	DKR1908CDFL10B	Cervical	O singură bucată
16cm	DKR1716CDFL10B	Indisponibil	Toracic/Lombar	O singură bucată
23cm	DKR1723CDFL10B	Indisponibil	Toracic/Lombar	O singură bucată

### Ghid de comandă DISKOM cu gaură laterală și vârf deschis

Mărimi	17G	19G	Procedură	Ambalare
8cm	Indisponibil	DKR1908CDFL10	Cervical	O singură bucată
16cm	DKR1716CDFL10	Indisponibil	Toracic/Lombar	O singură bucată
23cm	DKR1723CDFL10	Indisponibil	Toracic/Lombar	O singură bucată

DISPONIBIL DOAR   
PENTRU

REV. 03 del 04-09-17®



BIOPSYBELL s.r.l.  
Via A. Manuzio 24 - 41037 Mirandola (MO) Italy  
tel. +39 0535 27850 - fax +39 0535 33526 - www.biopsybell.it  
FDA (Număr de înregistrare a producției) 961761