



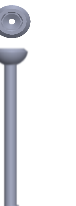

LISTĂ TOATE IMPLANTURILE ATLAS									
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Ținut Groseli		Numărul Birincii Ținut / Număr produs principal	Ținut Adă /Nume produs	Opa /Echipament	Numer de referință din catalog / Număr de referință-catalog	GMDN Kodu / Cod GMDN	Hammadde / Materie prime	Standarde / Standarde	Ținut Steril Durumu / Stare sterilă a produsului
	8681317407090	SURUB ATLAS	Ø4.0X28	ATODT4028	61325	Aliaj Ti6Al4V	ISO 5832-3	NESTERIL	
	8681317407106	SURUB ATLAS	Ø4.0X30	ATODT4030	61325	Aliaj Ti6Al4V	ISO 5832-3	NESTERIL	
	8681317407113	SURUB ATLAS	Ø4.0X32	ATODT4032	61325	Aliaj Ti6Al4V	ISO 5832-3	NESTERIL	
	8681317407120	SURUB ATLAS	Ø4.0X34	ATODT4034	61325	Aliaj Ti6Al4V	ISO 5832-3	NESTERIL	
	8681317407137	SURUB ATLAS	Ø4.0X36	ATODT4036	61325	Aliaj Ti6Al4V	ISO 5832-3	NESTERIL	
	8681317407144	SURUB ATLAS	Ø4.0X38	ATODT4038	61325	Aliaj Ti6Al4V	ISO 5832-3	NESTERIL	
	8681317407151	SURUB ATLAS	Ø4.0X40	ATODT4040	61325	Aliaj Ti6Al4V	ISO 5832-3	NESTERIL	
	8681317407168	SURUB ATLAS	Ø4.0X45	ATODT4045	61325	Aliaj Ti6Al4V	ISO 5832-3	NESTERIL	
	8681317407175	SURUB ATLAS	Ø4.0X50	ATODT4050	61325	Aliaj Ti6Al4V	ISO 5832-3	NESTERIL	
8681317407182	SURUB ATLAS	Ø4.0X55	ATODT4055	61325	Aliaj Ti6Al4V	ISO 5832-3	NESTERIL		
	8681317407199	SURUB ATLAS	Ø4.5x28	ATODET4528	61325	Aliaj Ti6Al4V	ISO 5832-3	NESTERIL	
	8681317407205	SURUB ATLAS	Ø4.5x30	ATODET4530	61325	Aliaj Ti6Al4V	ISO 5832-3	NESTERIL	
	8681317407212	SURUB ATLAS	Ø4.5x32	ATODET4532	61325	Aliaj Ti6Al4V	ISO 5832-3	NESTERIL	
	8681317407229	SURUB ATLAS	Ø4.5x34	ATODET4534	61325	Aliaj Ti6Al4V	ISO 5832-3	NESTERIL	
	8681317407236	SURUB ATLAS	Ø4.5x36	ATODET4536	61325	Aliaj Ti6Al4V	ISO 5832-3	NESTERIL	
	8681317407243	SURUB ATLAS	Ø4.5x38	ATODET4538	61325	Aliaj Ti6Al4V	ISO 5832-3	NESTERIL	
	8681317407250	SURUB ATLAS	Ø4.5x40	ATODET4540	61325	Aliaj Ti6Al4V	ISO 5832-3	NESTERIL	
	8681317407267	SURUB ATLAS	Ø4.5x45	ATODET4545	61325	Aliaj Ti6Al4V	ISO 5832-3	NESTERIL	
	8681317407274	SURUB ATLAS	Ø4.5x50	ATODET4550	61325	Aliaj Ti6Al4V	ISO 5832-3	NESTERIL	
8681317407281	SURUB ATLAS	Ø4.5x55	ATODET4555	61325	Aliaj Ti6Al4V	ISO 5832-3	NESTERIL		

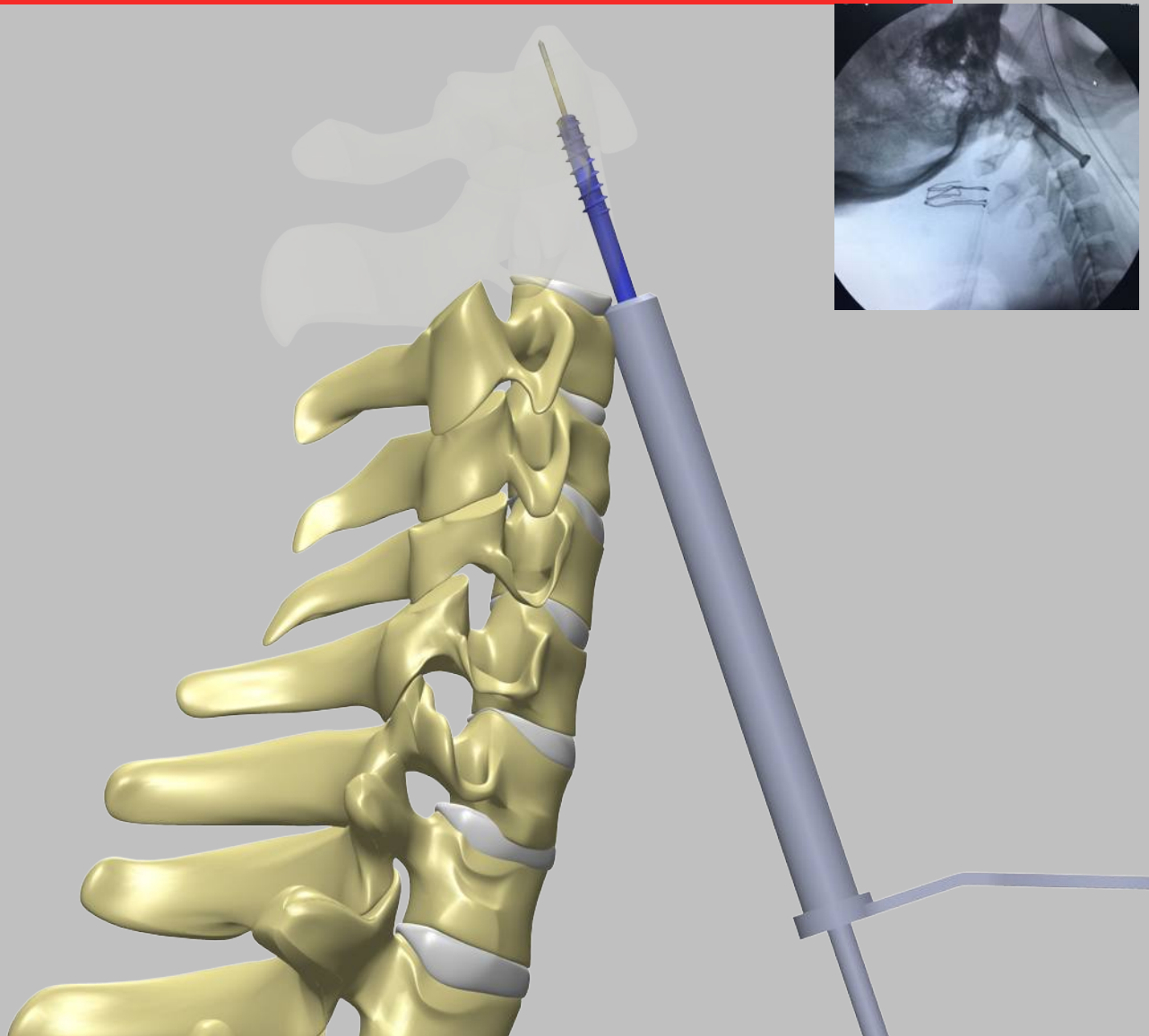


CANULAT
TITAN

 **OSIMPLANT**
Spine Restoration Technology




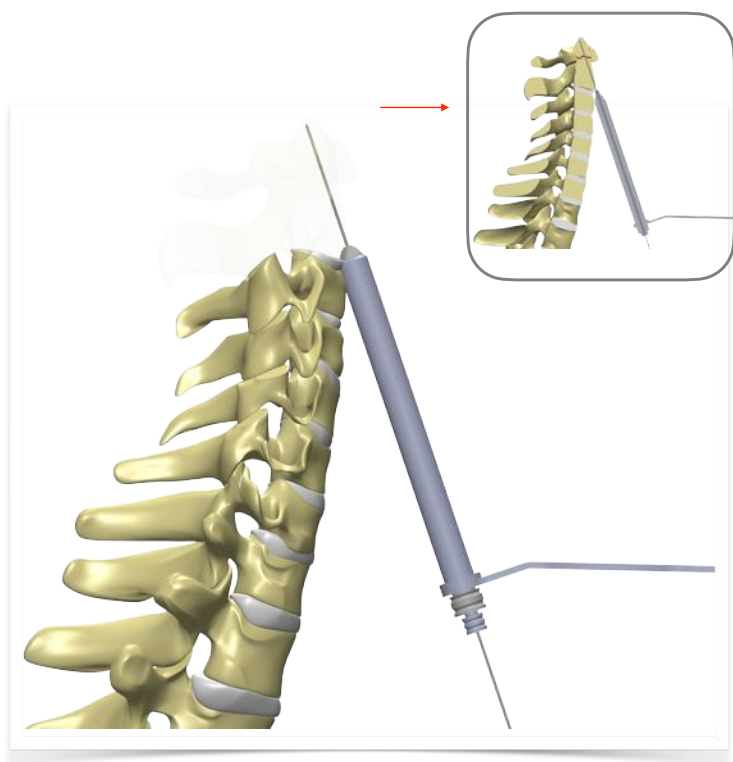


După incizia chirurgicală, se plasează dilatatoare formate din 3 piese și linia de fractură este fixată prin deplasarea înainte prin

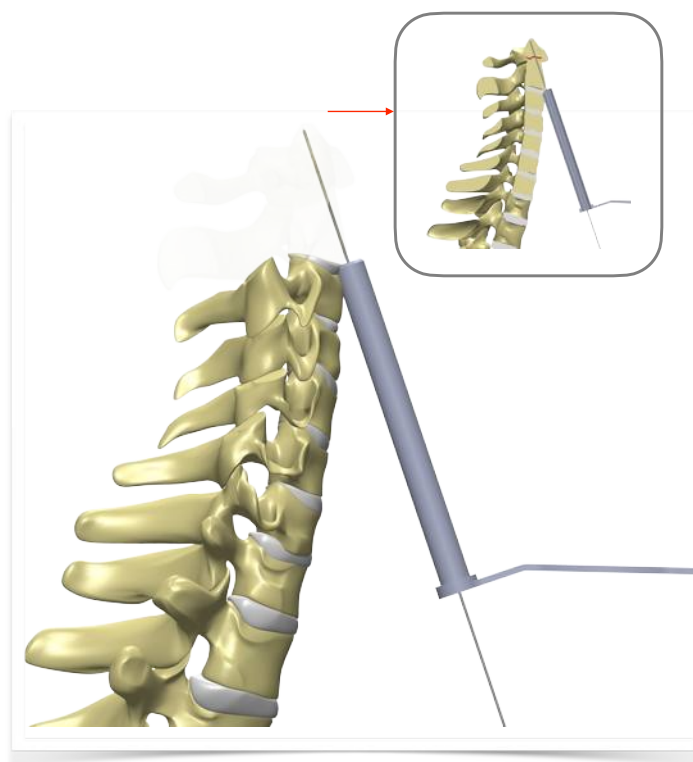


Cel mai lat dilatator mare rămâne în zona operatorie, iar celelalte sunt îndepărtate din câmpul chirurgical.

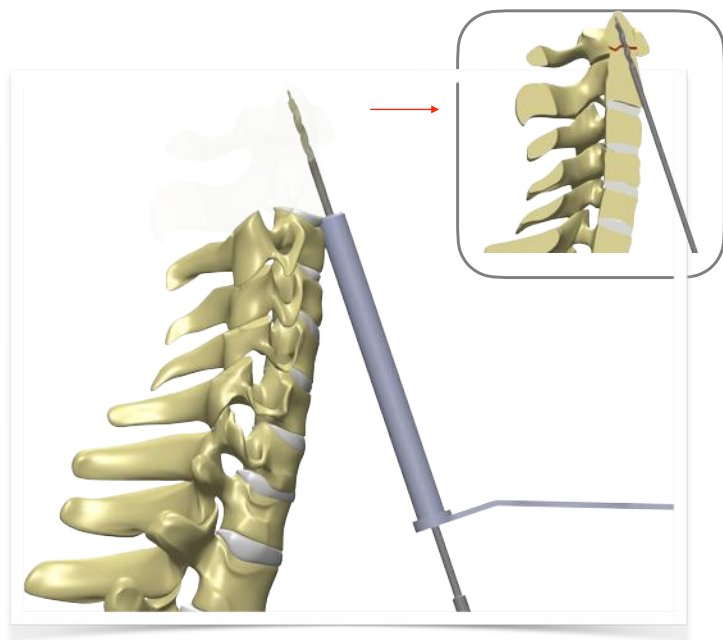


Perforarea se face prin cel mai lat dilatator mare și prin fir kirschner.

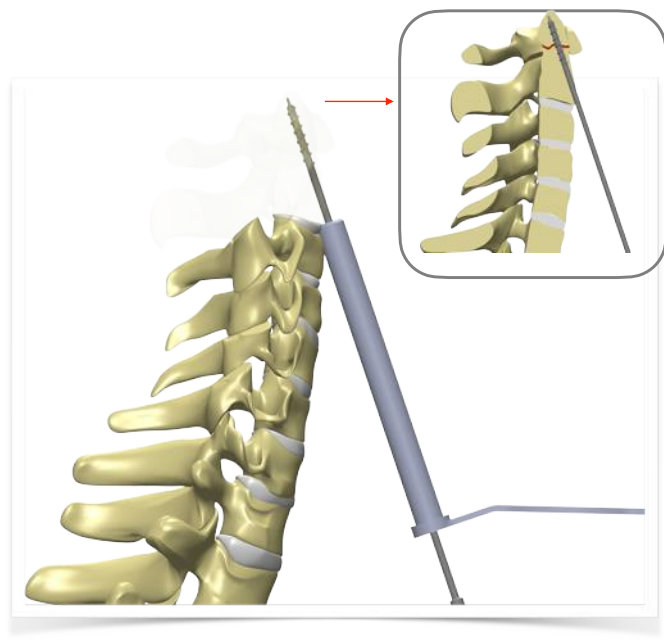


După găurire, procesul de filetare se efectuează în același mod.

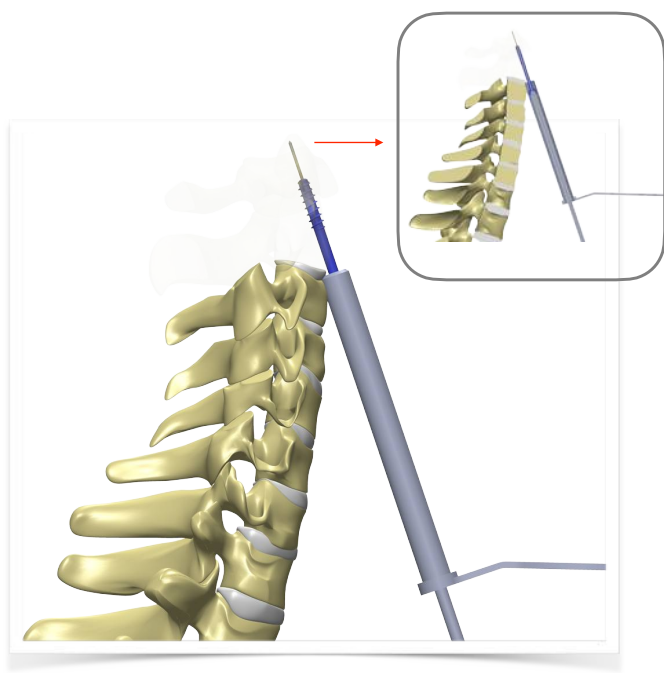





După filetare, șurubul odontoid ATLAS este implantat prin fir kirschner cu o șurubelniță canulată și un dilatator mare cu mâner drept.

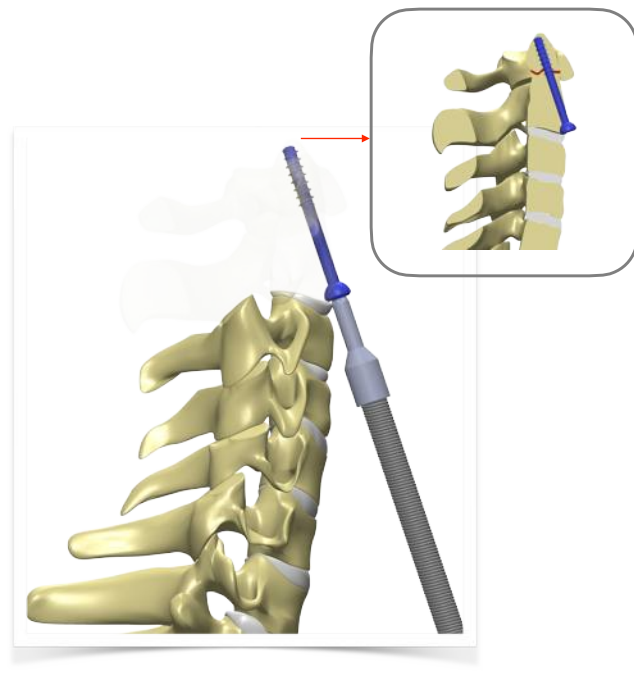

După filetare, sârma kirschner este îndepărtată și șurubul odontoid ATLAS cu mâner drept și șurubelniță flexibilă este implantat în

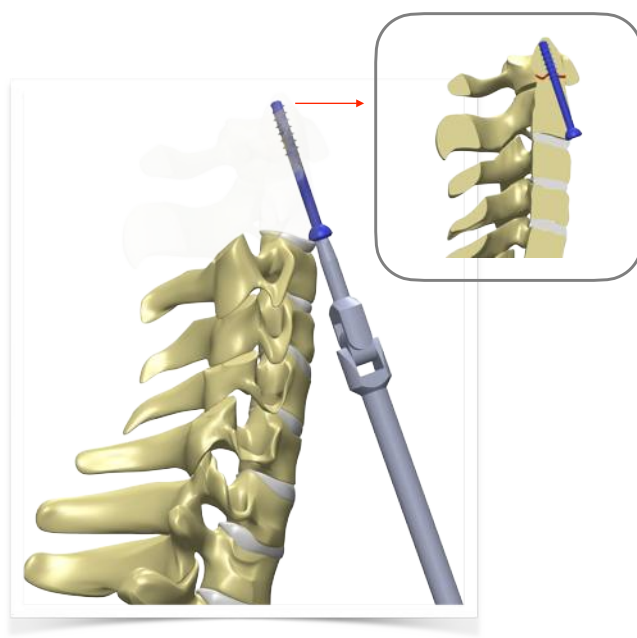

După filetare, sârma kirschner este îndepărtată și șurubul odontoid ATLAS cu mâner drept și șurubelniță articulată este implantat cu mâna liberă.

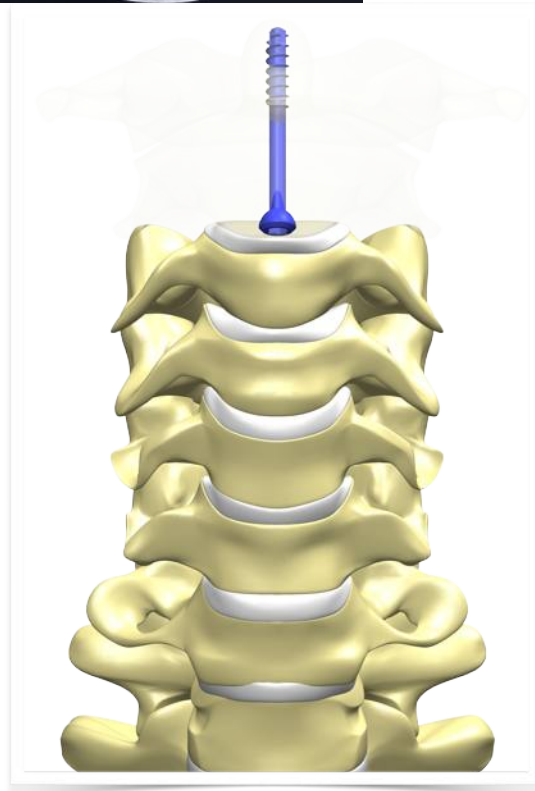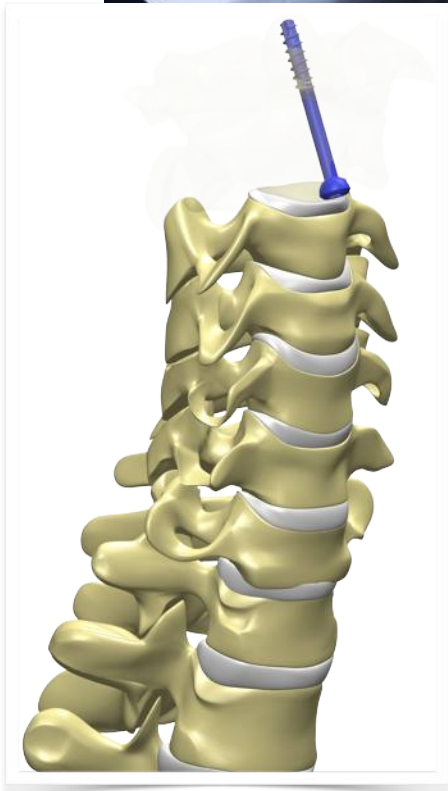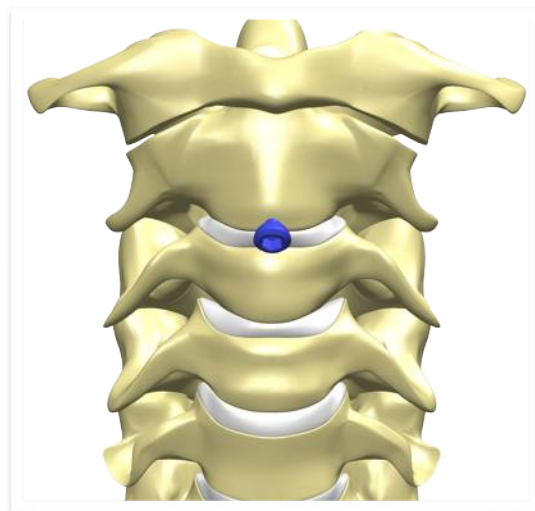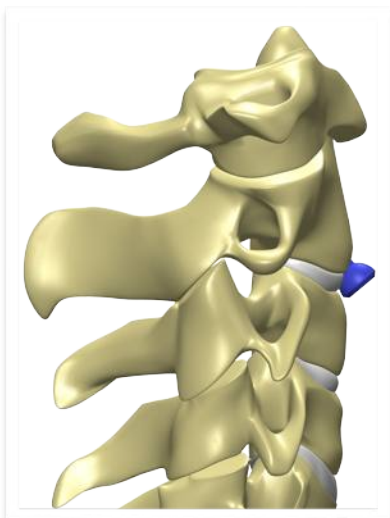




Dilatator mic



Dilatator mediu

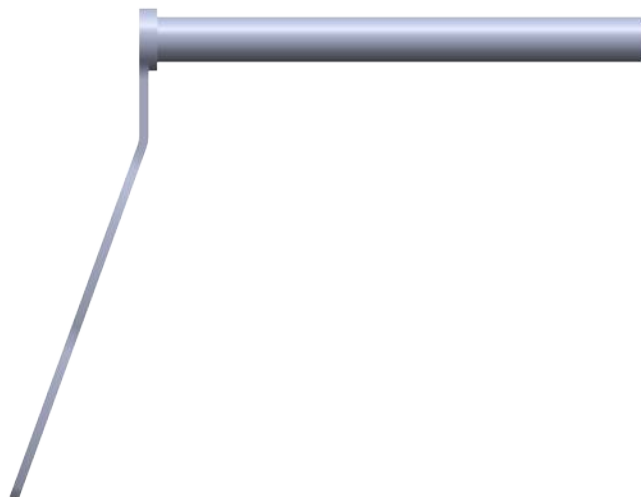

Fir Kirschner



Burghiu canulat



Tarod canulat



Șurubelniță canulată




Mâner drept




Șurubelniță articulară



Șurubelniță flexibilă

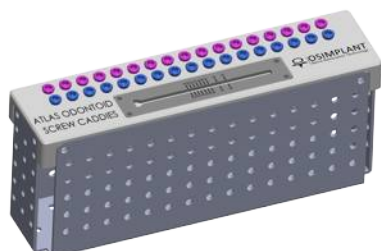

Suporturi cu șuruburi

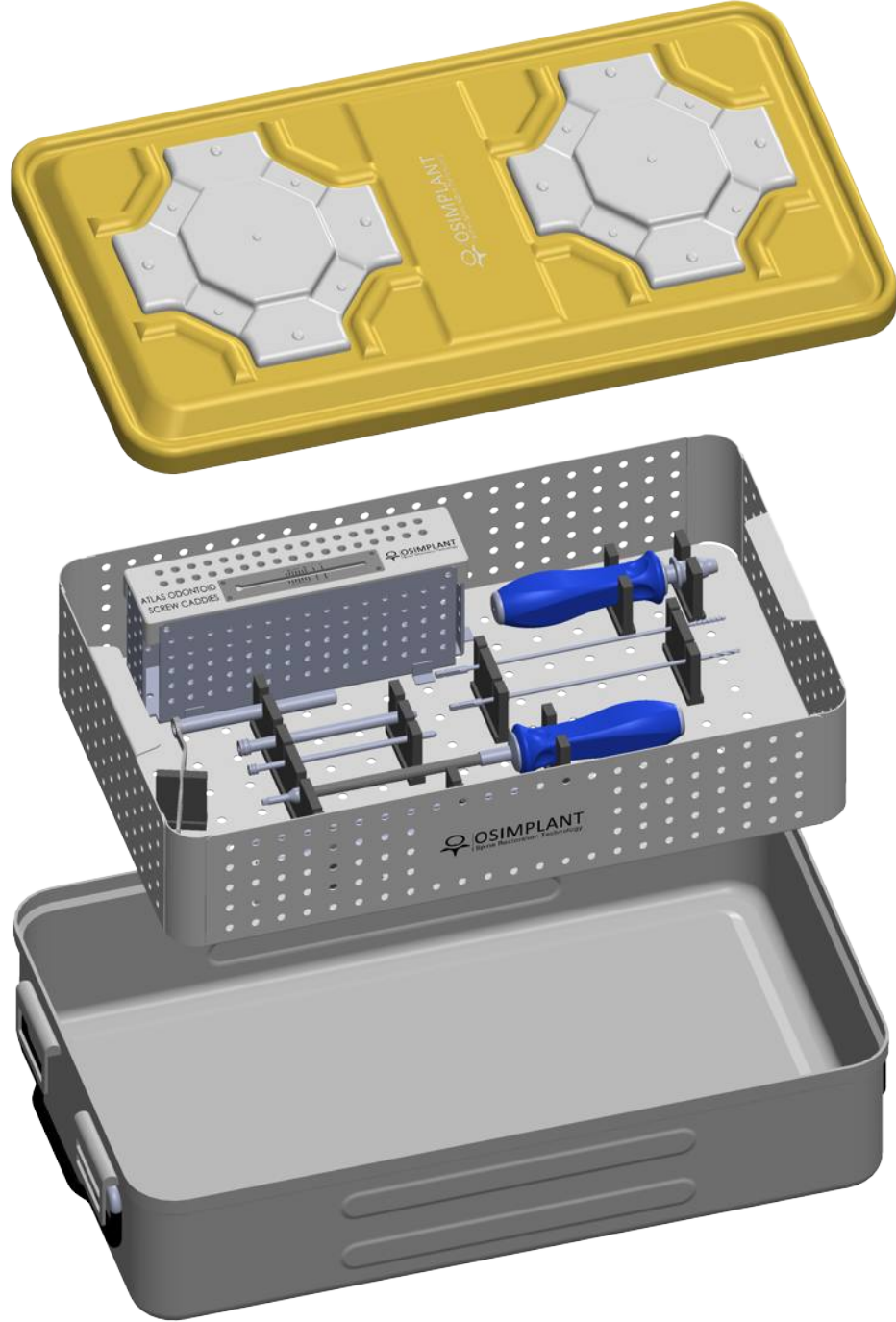

Adresa:

Mustafa Kemal Mahallesi, 2133. Sok No: 4/2 Royale
Office PC: 06510 Çankaya/Ankara, Turcia **Telefon:**

+ 90 312 473 82 80

E-mail:

sales@osimplant.com.tr
www.osimplant.com



SF-C-14/ 10.11.2021/R00

