

Portofoliul de CRANIOPLASTIE



TECRES

ADVANCING HIGH TECHNOLOGY

MENDEC® CRANIO

RĂȘINĂ PMMA RADIOOPACĂ

Mendec® Cranio este o rășină acrilică dezvoltată pentru proceduri de cranioplastie.

Este o soluție sigură și fiabilă pentru repararea găurilor craniului, a tăieturilor de craniotomie și a altor defecte craniene. Această rășină este extrem de maleabilă și se adaptează perfect defectului cranian.

Odată ce rășina s-a întărit, poate fi găurită și măcinată. Poate fi folosit și pentru fixare prin intermediul plăcilor și șuruburilor sau a firelor de sutură.

Formula include sulfat de bariu, care face rășina radioopacă și astfel perfect vizibilă pe raze X.



Scanați codul QR și
descoperiți cum să
pregătiți Mendec®
Cranio



PACHETUL

INCLUDE:

- 20 g de pudră
 - 6.65 g de lichid
- COD 1220/D

AVANTAJE:

Maleabilitate: la scurt timp după amestecare, Mendec® Cranio devine extrem de maleabil, permițând o manipulare chirurgicală prelungită. Mendec® Cranio rămâne maleabil pentru o lungă perioadă de timp, permițând reconstrucția defectului osos. Odată ce rășina s-a întărit, poate fi găurit și măcinată. Poate fi folosit și pentru fixare prin intermediul plăcilor și șuruburilor sau a firelor de sutură.

Reconstrucție perfectă: datorită maleabilității sale, Mendec® Cranio poate reconstrui defectul cranian, obținând o estetică excelentă. Textura sa păstrează forma dată chiar înainte de întărirea rășinii. Prin urmare, polimerizarea exotermă trebuie să aibă loc pe un mediu extern, departe de meninge.

Siguranță: PMMA este un material biocompatibil cu proprietăți mecanice excelente: elasticitate, rezistență și ușurință. PMMA este utilizat pe scară largă în aplicații clinice. Siguranța sa a fost demonstrată în mod fiabil.

Toxicitate redusă: datorită procesului nostru special de producție, Mendec® Cranio are nevoie de mai puțin lichid (MMA). Aceasta înseamnă o **toxicitate redusă** și o temperatură mai mică de polimerizare.

TIMPII DE LUCRU LA 23° C

MIXARE	AȘTEPTARE	MANIPULARE ȘI MODELARE	ÎNTĂRIRE
45" ±15"	1'45" ±30"	5'30" ±1'00"	3'00" ±2'00"



TECRES S.P.A.

Via A. Doria, 6 - 37066 Sommacampagna (VR) - Italy
T +39 045 92 17 311 - F +39 045 92 17 330
www.tecres.it - info@tecres.it

