


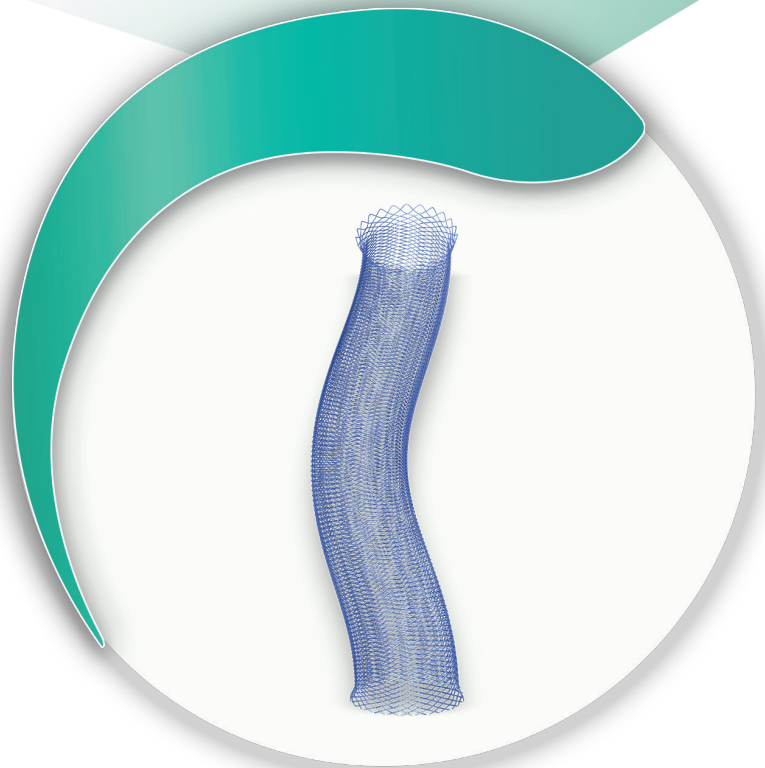

CARESTO® heal

Stent

- » Primul stent carotidian acoperit – cu tehnologie unică HEAL
 - » Stent cu celule închise, foarte flexibil, cu un singur strat
 - » Dimensiunea mică a porilor cu acoperire mare a plăcii (până la 40%)
 - » Sistem flexibil de livrare cu profil redus (0,068" OD)
-

CARESTO® heal Stent

Specializat pentru tratamentul plăcii vulnerabile

Stent-ul CARESTO® heal este conceput pentru a oferi cel mai bun rezultat clinic pentru anatomia carotidiană, în special pentru leziunile vulnerabile bogate în placă.



O abordare complet nouă pentru vindecarea rapidă a leziunilor vasculare după implantarea dispozitivului.

Antitrombogenic* | Anti-inflamator | Promovarea endotelializării

*Proprietățile antitrombogenice au fost demonstrate în teste non-clinice


Tratament cu Stent CARESTO® heal ¹



Placă moale groasă pe CTA



Desfășurarea Stentului CARESTO® heal

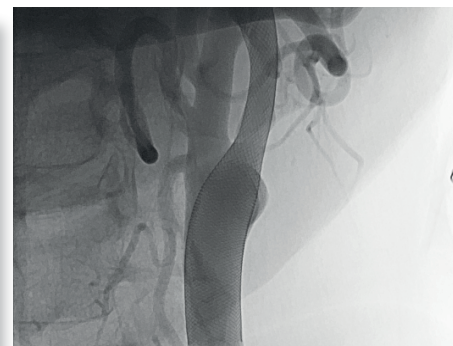

Plasarea stentului CARESTO® heal

¹ Imaginile sunt oferite de Dr. Hannes Nordmeyer, radprax MVZ GmbH Solingen, Germania

² Imaginile sunt oferite de Dr. Fritz Wodarg, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Germania

Configurații diferite de dispozitiv care asigură performanțe optime pentru diferite diametre ale vaselor de la distal la proximal.

Flexibilitate excelentă

Cu o flexibilitate remarcabilă, stentul carotidian cu un singur strat menține forma naturală a vasului și asigură o apunere completă a peretelui vasului..

Stent-ul CARESTO® heal este repositionabil până la 96 % din lungime.


Acoperire înaltă a plăcii Ușor și neted

Stent-ul CARESTO® heal este dezvoltat pentru tratamentul leziunilor vulnerabile bogate în placă.

Placa sa împletită strânsă minimizează proeminența plăcii, acoperind până la 40% din leziune, având în același timp o suprafață metalică mai mică în comparație cu stenturile cu două straturi..

Livrabil prin cateter flexibil cu profil redus (0,068" OD) care permite navigarea ușoară în anatomii sinuoase și accesul radial.


În combinație cu Acandis® Dilator trecerea atraumatică a plăcii este asigurată de vârful moale conic dilator.

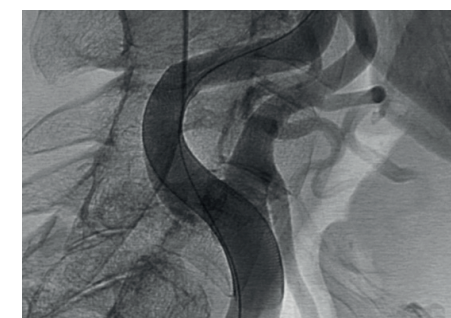

Apoziție perfectă a peretelui vasului²



Plasă împletită strânsă

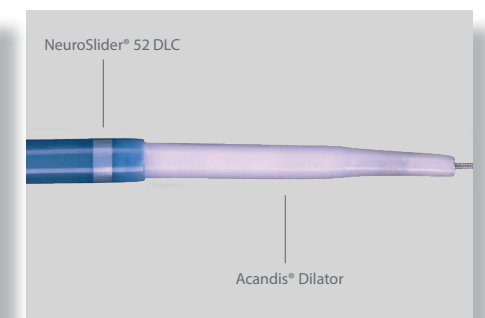

Sistem de livrare atraumatic

Conceptul de marker radioopac

Fire compozite de
nitinol radioopace

pentru vizualizarea perfectă a întregului contur și formă a dispozitivului

Marker distal de
transport

Marker median
de transport

indicând "point of no return"
până la care stentul poate fi repositionat în siguranță

Marker distal al
zonei de tranziție

Zona de tranziție


Marker proximal al
zonei de tranziție

INFORMAȚII DE COMANDĂ | CARESTO® heal

Etichetat CARESTO® heal Dimensiuni (mm)	Număr de referință	Diametrul dispozitivului neconstrâns (mm)	Unconstrained Device Length (mm)	Recommended Vessel Diameter (mm)	Required/ Recommended Catheters for Delivery
6.0 × 30	01-005301	6.3	23	4.0 – 6.0	NeuroSlider® 52 DLC NeuroSlider® 52 DLC pro (ID: 0.052")
6.0 × 40	01-005302	6.3	30	4.0 – 6.0	
6.0 × 50	01-005303	6.3	37	4.0 – 6.0	
8.0 × 30	01-005311	8.3	24	6.0 – 8.0	
8.0 × 40	01-005312	8.3	32	6.0 – 8.0	
8.0 × 50	01-005313	8.3	40	6.0 – 8.0	
8.0 × 60	01-005314	8.3	47	6.0 – 8.0	
10.0 × 30	01-005321	10.3	25	8.0 – 10.0	
10.0 × 40	01-005322	10.3	33	8.0 – 10.0	
10.0 × 50	01-005323	10.3	41	8.0 – 10.0	
10.0 × 60	01-005324	10.3	49	8.0 – 10.0	

Dispozitive cilindrice

Lungimea dispozitivului neconstrâns

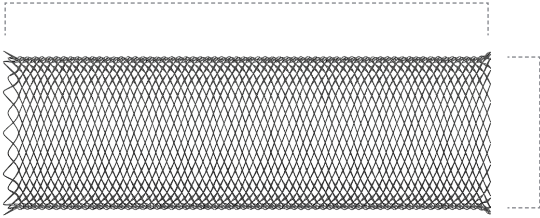


Diametrul dispozitivului neconstrâns

Labelled CARESTO® heal Dimensions (mm)	Reference Number	Unconstrained Device Diameter dist. / prox. (mm)	Unconstrained Device Length (mm)	Recommended Vessel Diameter dist. / prox. (mm)	Required/ Recommended Catheters for Delivery
6.0 / 8.0 × 29	01-005351	6.3 / 8.3	29	4.0 – 6.0 / 6.0 – 8.0	NeuroSlider® 52 DLC NeuroSlider® 52 DLC pro (ID: 0.052")
6.0 / 8.0 × 35	01-005352	6.3 / 8.3	35	4.0 – 6.0 / 6.0 – 8.0	
6.0 / 8.0 × 41	01-005353	6.3 / 8.3	41	4.0 – 6.0 / 6.0 – 8.0	
8.0 / 10.0 × 29	01-005361	8.3 / 10.3	29	6.0 – 8.0 / 8.0 – 10.0	
8.0 / 10.0 × 36	01-005362	8.3 / 10.3	36	6.0 – 8.0 / 8.0 – 10.0	
8.0 / 10.0 × 43	01-005363	8.3 / 10.3	43	6.0 – 8.0 / 8.0 – 10.0	

Dispozitive conice

Dist. diametrul dispozitivului neconstrâns.

Lungimea dispozitivului neconstrâns

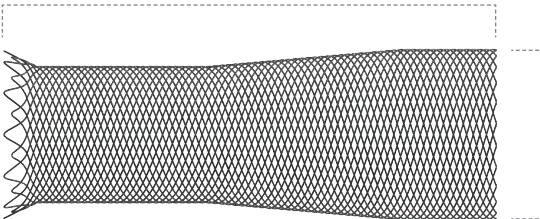

Diametrul dispozitivului neconstrâns prox.

Toate modificările sau modificările, fie ele tehnice sau de altă natură, sau modificările în disponibilitatea produselor sunt expres rezervate.
Vă rugăm să contactați reprezentantul local Acandis® pentru disponibilitatea produsului și informații despre (micro)catetere compatibile.
Nu este disponibil spre vânzare în Statele Unite.

