
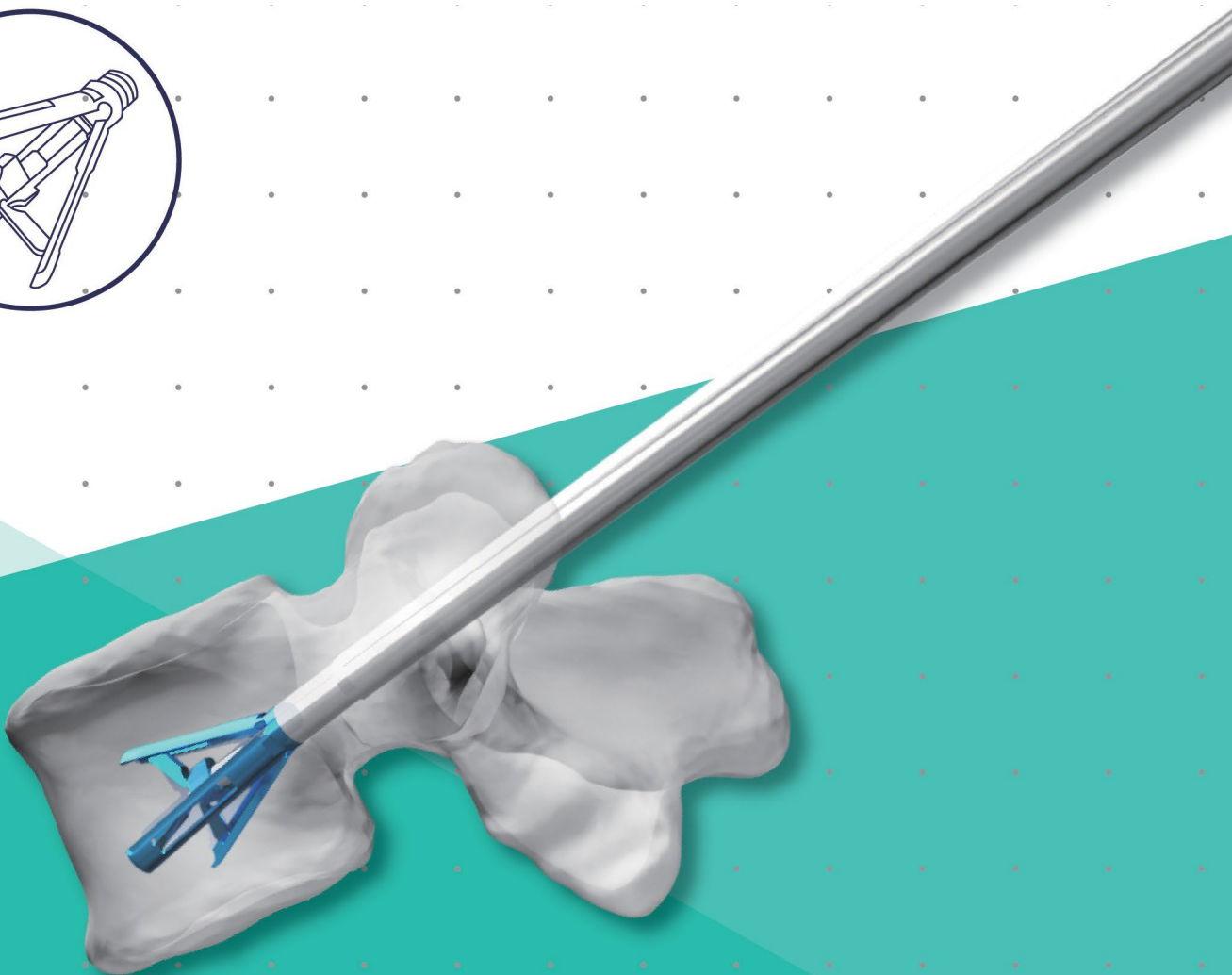


# TRIPOD-FIX

## Sistem de Augmentare a Corpului Vertebral

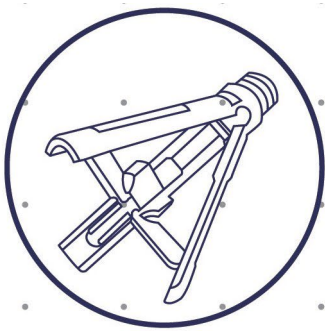

---

## Sistemul de Augmentare a Corpului Vertebral Tripod-Fix

---

Sistemul de Augmentare a Corpului Vertebral Tripod-Fix (Tripod-Fix) este conceput pentru tratamentul fracturilor de compresie vertebrală (VCFs) și este destinat utilizării împreună cu ciment osos din polimetilmetacrilat (PMMA) pentru augmentarea vertebrală percutanată.

Sistemul este alcătuit dintr-un stent de expansiune implantabil și instrumente chirurgicale asociate. Stentul este introdus în corpul vertebral colapsat, printr-o abordare transpediculară și este expandat mecanic pentru a restabili înălțimea anatomică. Mecanismul de expansiune tridimensional oferă suport solid pentru restaurarea înălțimii vertebrale.



---

## Indicație

---

Sistemul de Augmentare a Corpului Vertebral Tripod-Fix este indicat pentru reducerea fracturilor dureroase de compresie vertebrală osteoporotică. Este destinat utilizării în combinație cu ciment osos din polimetilmetacrilat (PMMA) în timpul intervenției de augmentare vertebrală percutanată.




vertebral compression fracture(VCF)

---

## Caracteristici și Beneficii


---

### Înainte de Expansiune

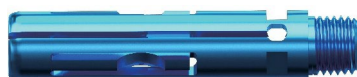

- Oferă restaurare anatomică și expansiune controlabilă a implantului în timpul procedurii de tratament al VCF, în special pentru fracturile în formă de pană.
- Expansiunea tridimensională oferă suport stabil.
- Mecanismul de expansiune tridimensional permite o distribuție mai uniformă a cimentului osos pentru a asigura menținerea stabilă a restaurării.


### După Expansiune

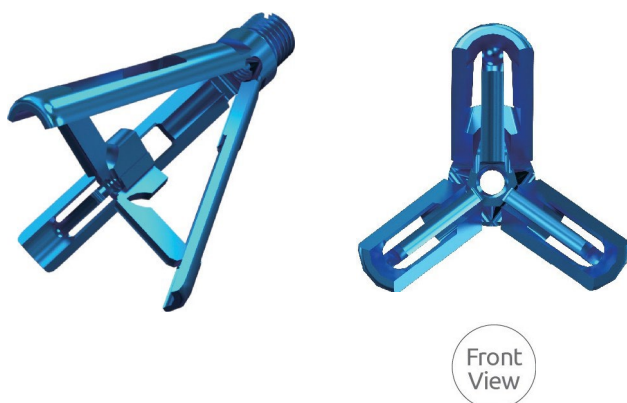

---

## Direcția de abordare chirurgicală

---

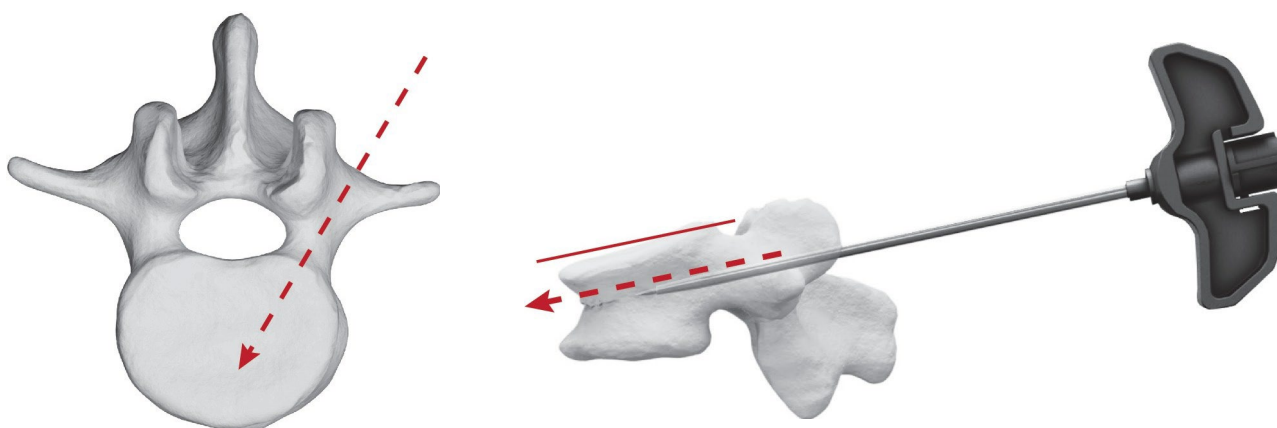


Abordare Transpediculară


---

## Plasarea Implantului


---

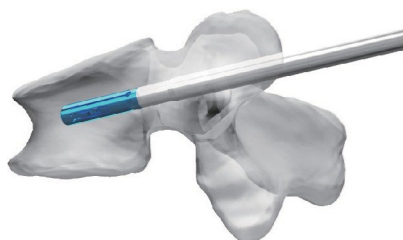

Plasarea Implantului

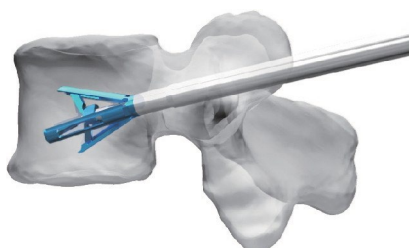

Expansiunea Implantului

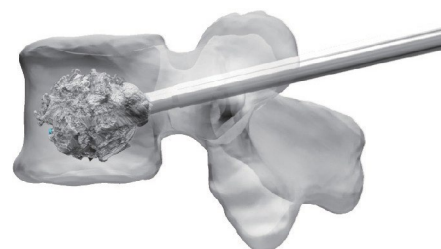


Injectarea Cimentului Osos

# Specificații de produs

## Stent de Expansiune (Steril)


|                                             |               |                 |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------|
| REF No.                                     | 40-465000     | 40-465800       |
| Material                                    | Ti-6Al-4V ELI | Ti-6Al-4V ELI   |
| Culoare                                     | Auriu         | Albastru închis |
| Diametrul Neexpandat (mm)                   | 5.0           | 5.8             |
| Lungime (mm)                                | 25.0          | 28.0            |
| Înălțimea la Expansiune Maximă (mm)         | 15.0          | 17.0            |
| Diametrul Minim al Canalului Pedicular (mm) | 5.7           | 6.5             |

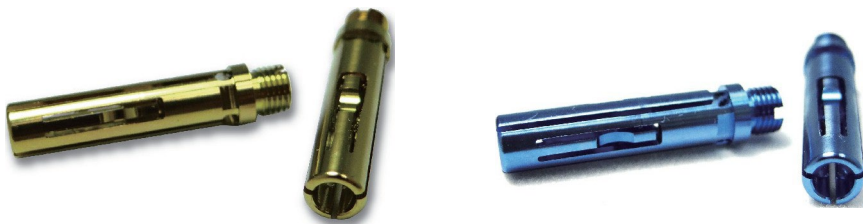

## Instrumente chirurgicale Tripod-Fix

A. Instrumente pentru Stentul de Expansiune Sistem 05.0 & Sistem 05.8

Pregătirea Sitului de Implantare și Plasarea Implantului
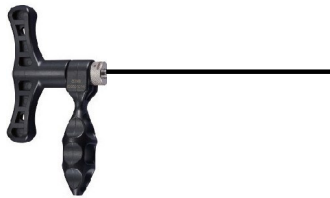
| Nr. ref.<br>Sistem 05.0<br>Sistem 05.8 | Nume                | Aspect                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 85035<br>85036                         | Șurubelniță         |   |
| 70125<br>70125                         | Ghidaj de Sârmă     |  |
| 85016<br>85006                         | Canulă de Lucru     |  |
| 85013<br>85004                         | Burghiu             |  |
| 85029<br>85030                         | Capac pentru Canulă |  |
| 85017<br>85008                         | Lărgitor            |  |

## Instrumente chirurgicale Tripod-Fix

### A. Instrumente pentru Stentul de Expansiune Sistem 05.0 & Sistem 05.8

#### Implant Site Preparation and Implant Placement

| Nr. ref.<br>Sistem 05.0<br>Sistem 05.8 | Nume    | Aspect                                                                              |
|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 85009<br>85009                         | Detasor |  |

### B. Instrumente pentru Injectarea Cimentului Osos

| Nr. ref. . | Nume                          | Aspect                                                                               |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 85010      | Împingător de Ciment          |  |
| 85011      | Tub de Transfer pentru Ciment |  |



• **wcttrom** •

Partenerul Tău pentru Sănătate

• 1F., No.26, Sec. 2, Shengyi Rd, Oraș Zhubei,  
Hsinchu County, 30261, Taiwan (R.O.C.)

T+886 3 6107168

F+886 3 6580006

E-mail : [customerservice@wiltrom.com.tw](mailto:customerservice@wiltrom.com.tw)