

AEVIZOL® Hydrogel New Formula - Instrucțiuni de utilizare (RO)

MECANISM DE ACTIUNE

AEVIZOL® Hydrogel New Formula este un hidrogel cu proprietăți de solidificare și aderență ridicată, care:

1. Umple punga parodontală și împiedică infiltrarea resturilor alimentare.
2. Exerciță o acțiune mecanică de limitare a formării biofilmului bacterian prin închiderea pungii parodontale.
3. Sigilează punga gingivală prin efect mucoadeziv, reducând răspândirea bacteriană.
4. Susține acțiunea bacteriostatică a antibioticului reținut în hidrogel datorită afinității dintre componentele polimerice și substanța activă.

INFORMATII DESPRE PRODUS

AEVIZOL® Hydrogel New Formula este un preparat topic gata de utilizare pentru sigilarea pungilor parodontale. Produsul contribuie la reducerea pungilor parodontale și favorizează regenerarea osului peri-radicular prin efectul de sigilare și acțiunea bacteriostatică. Înainte de aplicare trebuie efectuate toate procedurile necesare pentru eliminarea biofilmului bacterian de pe suprafața radiculară sau implantară.

BENEFICII

Produsul este alcătuit din două componente:

- un gel vâcos alb-gălbui care conține metronidazol;
- o soluție apoasă transparentă de reticulare.

La contact, cele două componente formează un compus cu consistență crescută, capabil să sigileze eficient zona tratată pentru cel puțin trei săptămâni.

CONTRAINDICAȚII

Nu utilizați produsul în caz de hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre componente. Nu au fost identificate contraindicații în asociere cu antibiotice sistemice beta-lactamice, inclusiv amoxicilină.

COMPOZITIE

Hidrogel, metronidazol și soluție apoasă de reticulare.

ASAMBLAREA SERINGII

Deșurubați capacul Luer Lock al seringii preumplute și montați acul steril.

MOD DE UTILIZARE

1. Pregătiți zona afectată.
2. Dacă implanturile sunt mobile, acestea trebuie îndepărtate înainte de aplicare.
3. Omogenizați conținutul seringii cu gel prin mișcarea pistonului de câteva ori.
4. Montați acul bont și aplicați gelul în zona tratată.
5. Adăugați câteva picături din soluția de reticulare pentru transformarea gelului într-o membrană compactă.
6. Nu este necesară uscarea pungii parodontale. În caz de sângerare abundentă se poate utiliza peroxid de hidrogen.
7. După 2-3 minute îndepărtați excesul de produs.
8. Nu depășiți conținutul unei seringi pentru o singură aplicare.
9. Pacientul nu trebuie să mănânce, să bea sau să clătească gura timp de minimum o oră.
10. Începând cu ziua următoare se poate efectua igiena orală obișnuită cu o periuță moale.
11. După aproximativ 20 de zile, reziduurile rămase se îndepărtează și, dacă este necesar, serepetă aplicarea.

PRECAUȚII

Nu utilizați produsul pentru alte indicații decât cele prevăzute. Nu utilizați în caz de hipersensibilitate la metronidazol sau la alte componente. Nu se utilizează la copii cu vârsta sub 12 ani.

ATENȚIONĂRI

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu utilizați produsul dacă ambalajul este deteriorat. Nu utilizați după data de expirare.

După deschidere, produsul trebuie utilizat imediat, iar orice cantitate rămasă trebuie eliminată.

Produs de unică folosință.

INTERACȚIUNI

Datorită cantității reduse de metronidazol eliberate local, produsul este bine tolerat și nu prezintă interacțiuni semnificative cu alte medicamente.

CONȚINUTUL AMBALAJULUI

4 seringi din plastic cu conector Luer Lock:

- 2 seringi cu 0,5 ml gel;
- 2 seringi cu soluție de reticulare;
- ace sterile boante;
- instrucțiuni de utilizare.

CONDII DE PĂSTRARE

A se păstra într-un loc uscat, ferit de lumină și căldură, la 16-25°C.

Nu congelați. Nu refrigerati.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni de la data fabricației indicată pe ambalaj.