



## perform® pro

Concentrat pe bază de oxigen activ sub formă de pulbere pentru dezinfectarea și curățarea suprafețelor și a dispozitivelor medicale

### Avantajul nostru:

- compatibilitate foarte bună cu materialele
- spectru larg de activitate (virucid, tuberculocid, sporicid (*C. difficile*))
- pe bază de oxigen activ

### Domenii de aplicare

perform® pro este potrivit pentru dezinfectarea suprafețelor și a dispozitivelor medicale. Prin îmbunătățirea unui produs consacrat, cu un spectru larg de activitate și compatibilitate ridicată cu materialele, perform® pro poate fi utilizat în toate zonele din spitale. În plus, produsul a fost îmbunătățit astfel încât să îndeplinească și cerințele actuale ale Regulamentului privind produsele biocide.

### Eficacitate microbiologică

#### Condiții de curățenie

Eficacitate	Concentrație	Timp de contact
<b>bactericid / levuricid</b> EN16615, EN13624, EN13727, EN17387	0,5% 1%	60 min. 5 min.
<b>activitate virucidă cu spectru limitat</b> EN14476, EN16777	0,5%	5 min.
<b>virucid</b> EN14476, EN16777	0,5% 1%	60 min. 5 min.
<b>tuberculocid</b> EN14348	2%	60 min.
<b>micobactericid</b> EN14348	2%	60 min.
<b>fungicid</b> EN13624, EN17387	2%	60 min.
<b>sporicid (<i>C. difficile</i>)</b> EN17126, EN17846	1% 3%	60 min. 30 min.
<b>sporicid (<i>B. cereus</i>, <i>B. subtilis</i>, <i>C. difficile</i>)</b> EN17126	3%	60 min.

#### Condiții de murdărie

Eficacitate	Concentrație	Timp de contact
<b>bactericid / levuricid</b> EN16615, EN13624, EN13727, EN17387	1% 3%	60 min. 5 min.
<b>activitate virucidă cu spectru limitat</b> EN14476, EN16777	1%	5 min.
<b>virucid</b> EN14476, EN16777	1% 3%	60 min. 5 min.
<b>tuberculocid</b> EN14348	2%	60 min.
<b>micobactericid</b> EN14348	2%	60 min.
<b>fungicid</b> EN13624, EN17387	3%	60 min.

## Date despre produs

**Compoziție:** 49,5 g bis (peroximonosulfat) bis (sulfat) de pentapotasiu  
**Conține:** (1- hidroxietiliden)bifosfonat de sodiu, dodecil sulfat de sodiu, acid (+)-tartric.

### Date fizico-chimice

Culoare	alb
Punct de aprindere	Nu este cazul
Formă	solid granular
pH	aprox. 3,0 / 20 g/l / 20 °C / în apă
Densitate, dinamică	nu este cazul

## Instrucțiuni speciale

**Utilizați dezinfectanții în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.**

În cazul murdăririi abundente, schimbați din timp soluția de lucru. Soluția de lucru poate avea un efect de albire asupra anumitor coloranți textili foarte sensibili. Reciclați numai ambalajele complet golite. Resturile de produs pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere. Asigurați o ventilație adecvată la locul de utilizare.

**Numai pentru uz profesional.** Orice incident grav legat de produs trebuie raportat producătorului și autorității competente.

## Instrucțiuni de utilizare

Pentru a pregăti soluția de lucru, umpleți găleata cu apă (max.30°C), adăugați produsul și dizolvați:

- 1 pungă (40 g) la 8 l de apă = soluție 0,5%
- 2 pungi (80 g) la 8 l de apă = soluție 1%

Atunci când se utilizează cutia, dozarea corespunzătoare se efectuează în conformitate cu eticheta cutiei. Soluția de lucru preparată are valabilitate de 8 ore (la 25° C) pentru o stabilitate garantată a substanței active. Soluția de lucru trebuie înlocuită mai devreme în caz de contaminare puternică.

**Dezinfecția suprafețelor:** Aplicați soluția de lucru în ștergere în 2 etape. Ștergeți umed dispozitivele medicale și alte suprafețe. Pentru a evita formarea de reziduuri, după a doua etapă de ștergere, pe suprafață nu trebuie să rămână decât o umiditate reziduală minimă. Asigurați-vă că toată murdăria vizibilă este îndepărtată înainte de dezinfecție. Curățați bine echipamentul cu apă.

## Informații pentru comandă

Articol	Ambalaj	Cod articol
perform <sup>®</sup> pro (40 g) pungă	60 / cutie	la cerere
perform <sup>®</sup> pro (40 g) pungă	250 / cutie	la cerere
perform <sup>®</sup> pro (900 g) cutie	4 / cutie	la cerere

## Informații de mediu

schülke fabrică produse în mod economic și cu ajutorul unor procese de producție avansate, sigure și cu considerație pentru mediu, menținând în același timp standardele noastre înalte de calitate.

## Expertize și informații de specialitate

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru web pentru o prezentare generală a întregii literaturi/rapoarte disponibile despre produs: [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com).

Pentru întrebări individuale:

Telefonul Departamentului de aplicații: +49 40 52100-666

E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)



Schülke & Mayr GmbH deține o autorizație de producător în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Legea germană privind medicamentele și certificate de conformitate GMP pentru medicamente.

### Producător:

Schülke & Mayr GmbH  
Str. Robert-Koch 2  
22851 Norderstedt, Germania  
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)