



Șervețele impregnate cu o soluție cu conținut redus de alcool, pentru dezinfectia și curățarea rapidă, având totodată o bună compatibilitate cu materialele.

mikrozid® universal wipes

Plusul nostru:

- foarte bună compatibilitate cu materialele
- efect rapid (Noro 30 sec.)
- eficiență raportată la EN 16615 (4 testări) în 1 minut
- testat dermatologic
- șervețele mari și de înaltă calitate (20 X 20 cm)
- fără coloranți și parfum
- performanță de curățare remarcabilă

Domeniul de utilizare

Asigură dezinfectia rapidă pe bază de alcool a dispozitivelor medicale în toate domeniile și a suprafețelor de orice tip prin ștergere, cu un risc ridicat de infecție, unde sunt necesari timpi de contact scurți și unde este necesar un dezinfectant blând cu materialele, de exemplu:

- suprafețe din proximitatea pacienților
- cabinete de tratament a pacienților
- mise de examinare
- mise pentru operație cu suprafață de lucru
- suprafețele dispozitivelor medicale
- tastaturile sau touchpad-urile echipamentelor de comunicare sensibile, de exemplu: telefoane sau tablete

Instrucțiuni pentru utilizare

Ștergeți bine suprafața cu șervețelul impregnat și lăsați să acționeze. Asigurați-vă că acoperiți complet suprafețele și păstrați-le umede pe tot timpul de expunere. Asigurați-vă că murdăria vizibilă este îndepărtată înainte de dezinfectie. Când deschideți pachetul, asigurați-vă că cerințele de igienă sunt păstrate. Asigurați-vă că închideți ermetic capacul după utilizare. Nu este adecvat pentru dezinfectia dispozitivelor medicale invazive. Schulke garantează un termen de valabilitate de o lună după ce pachetul a fost deschis. Produsul poate fi utilizat fără mănuși, în cazul în care măsurile de protecție împotriva infecțiilor și de protecția muncii permit acest lucru.

Eficiența microbiologică

Eficiență	Concentrație	Timp de acțiune
bactericid EN13727 - condiții de murdărie	gata de utilizare	15 sec.
Mycobacterium terrae EN 14348 - condiții de murdărie	gata de utilizare	5 min.
levuricid EN 13624 - condiții de murdărie	gata de utilizare	1 min.
Virusuri capsulate (inclusiv HIV, HBV, HCV) - condiții de murdărie	gata de utilizare	15 sec.
adenovirus EN 14476 - condiții de murdărie	gata de utilizare	15 min.
norovirus EN 14476 - condiții de curățenie	gata de utilizare	30 sec.
norovirus EN 14476 - condiții de murdărie	gata de utilizare	60 sec.
polyoma SV40 - condiții de murdărie	gata de utilizare	15 sec.
rotavirus EN 14476 - condiții de curățenie	gata de utilizare	15 sec.



CE 0297

mikrozid® universal wipes

Date produs:

Compoziție:

Un pachet conține 100 de servetele impregnate gata de utilizare. 100 de grame de soluție conține următoarele ingrediente active: 17,4 g Propan-2-ol, 12,6 g Ethanol (94 % w/w).

Date fizico-chimice:

Culoare	incolor
Densitate	cca. 0.95g/cm ³
Punct de inflamare	26 °C/metodă: DIN 51755 partea 1
Formă	lichidă
pH	3 - 3,6
Vâscozitate, dinamică	nu a fost determinată

Observații speciale

Utilizați dezinfectantele în siguranță. A se citi eticheta și informațiile despre produse înainte de utilizare.

Produsul are o foarte bună compatibilitate cu metalele și materialele sintetice.

Vă rugăm să urmați cu atenție orice instrucțiuni naționale privind protecția împotriva incendiilor și exploziilor atunci când utilizați dezinfectanți pe bază de alcool. Utilizați doar pentru suprafețe mici. Suprafața care poate fi acoperită depinde de temperatura camerei și de structura suprafeței ce urmează a fi dezinfectată. Informații suplimentare se pot obține la cerere.

Informații privitoare la comandă

Articol	Formă de livrare	Nr. art.
mikrozid® servetele universale 100 ST SP	ambalaj cu 100 buc. servetele	la cerere

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați filiala locală sau distribuitorul.

Informații de mediu

schülke fabrică produsele sale conform unor procese avansate, sigure și ecologice, în mod economic și cu respectarea standardelor de calitate ridicate.



Schülke & Mayr GmbH se află în posesia permisului de producție conform art. 13 alin. 1 din Legea Germană a Medicamentului și a certificatelor GMP pentru conformitatea medicamentelor.



O societate a grupului Air Liquide.

Producător:
Schülke & Mayr GmbH
22851 Norderstedt, Germania
Tel.: +494052100-0
Telfax: +494052100-318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com



Distribuitor autorizat:
S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud. Mureș, România
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro