

Ediție/Revizie:
01/00

Cod document:
FT-01-169

Data ultimei revizii:
05.02.2024

Cod produs:
B169-RO

❖ Avantaje

- ✓ Peste 90% biodegradabil
- ✓ Nu decolorează / pătează
- ✓ Eficiență demonstrată în condiții de murdărie
- ✓ Conține agenți tensioactivi cu capacitate bună de curățare și spumare redusă
- ✓ Nu conține: clor, aldehyde, fenoli, peroxizi

❖ Utilizare

Dezinfectarea și curățarea suprafețelor dure neporoase de diverse tipuri sau instrumentarului medical.

Dezinfectarea sistemului de aspirare în domeniul stomatologic.

❖ Instrucțiuni de utilizare

Recipientul cu produs dezinfectant concentrat este agitat energic înaintea dozării cantității necesare de produs pentru a prepara soluția gata de lucru.

Exemplu mod de preparare: 75ml detergent dezinfectant concentrat + 9,925L apă potabilă/distilată, pentru a obține 10L soluție gata de lucru 0,75%.

Produsul se diluează 0,5% / 1% pentru soluția gata de lucru, în funcție de spectrul de activitate dorit și în conformitate cu datele din tabelul următor. Produsul se poate utiliza pe suprafețe curate / murdare.

Tehnici de aplicare:

- se folosește un pulverizator manual
- laveta curată din material sintetic (preferabil poliester/ polietilenă)
- imersie în cuvă/ recipient cu lichid
- sistem de curățare prin recirculare

Pentru dezinfecția suprafețelor se folosește o cantitate suficientă de soluție 0,5-1% gata de lucru, pentru acoperirea totală a acestora (4-10ml acoperă 1m²), prin tehnicile de aplicare direct pe suprafețe. Pentru dezinfectarea de nivel mediu în condiții de murdărie se prepară o soluție gata de lucru 1%, iar timpul de contact este de 60minute. După preparare soluția gata de lucru poate fi folosită în maxim 7 zile calendaristice.

Se utilizează pentru dezinfectarea diferitelor suprafețe din unități medicale precum: spitale, clinici, cabinete medicale, ambulanțe, unități primiri urgențe, unități medicale mobile, ș.a.

Poate fi aplicat direct pe suprafețe din: plastic, metale (acoperit prin vopsire/ galvanizare, cupru, aluminiu, 314L, 316L, alimentar/ industrial), cauciuc, teflon, silicon, lemn, ceramică, sticlă, pavimente (beton, gresie, lemn, marmură, rășină, linoleum, covoare/ mochete). Produsul poate fi aplicat și pe suprafețe din zona de pregătire și servire a alimentelor (cantină, bucătărie), dar nu în contact cu acestea/ pe alimente.

Tip produs biocid: grupa principală I, PT 2.

❖ Eficacitatea microbiologică

Eficacitate	Concentrație	Timp de contact
Bactericidă EN 13727	0,7%	5 minute
Bactericidă EN 13727 (MRSA)	0,2%	5 minute
Levuricidă EN 13624	0,2%	15 minute
Fungicidă EN 13624	0,75%	15 minute
Fungicidă EN 13697	0,75%	15 minute
Levuricidă EN 13697	0,3%	15 minute
Levuricidă EN 1650	0,2%	15 minute
Fungicidă EN 1650	0,5%	15 minute
Tuberculocidă/ Micobactericidă EN 14348	5%	30 minute
Virucidă EN 14476 (MAV)	0,5%	5 minute
Bactericidă EN 13697	0,5%	30 minute
Micobactericidă EN 14348	1%	60 minute
Micobactericidă EN 14563	1%	60 minute
Fungicidă EN 14562	0,5%	60 minute
Bactericidă EN 14561	0,5%	60 minute

❖ Caracteristicile produsului

- Compoziție ingrediente active pentru 100g produs: 5,1% N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamină, nr. CAS: 2372-82-9, CE: 219-145-8; 2,5% Clorură de didecildimetilamoniu, nr CAS: 7173-51-5, CE: 230-525-2.
- Alte ingrediente: <5% surfactanți nonionici, solubilizanți, inhibitori de coroziune, agent de chelatizare, apă.
- Descriere produs concentrat: lichid, translucid, verde deschis cu miros specific.
- pH produs conc. = 10,7 -11,1
- Solubil în apă.

❖ Informații privind siguranța în utilizare

Se recomandă consultarea și respectarea informațiilor specificate în fișa cu date de securitate a produsului (FDS/ MSDS). Pentru a accesa MSDS produs: solicitați furnizorului, sau consultați pagina web: www.klintensiv.com

Nu utilizați produsul dacă a expirat sau în condiții diferite față de cele recomandate.

❖ Alte informații

Termen de valabilitate produs: 3 ani de la data fabricației, respectiv 6 luni de la deschidere.

Depozitare produs: în recipientul original, la temperaturi pozitive cuprinse între 5 - 30°C.

Produsul este însoțit de recipient dozator necesar pregătirii soluției de lucru, conform protocolul stabilit de unitatea medicală, în acord cu documentația tehnică. Recipientul gol nu se va reutiliza!

❖ Informații suplimentare, opinii de specialitate

Consultați pagina web: www.klintensiv.com



Pentru alte detalii privind produsul, modul de utilizare vă rugăm utilizați mail: office@klintensiv.com, telefon: 021/44.81.498.

Informațiile referitoare la acest produs sunt actualizate în mod controlat, atunci când este cazul, de aceea trebuie să vă asigurați că utilizați o variantă actualizată.