

Manual de Utilizare "Alcooltest Digital Portabil Techstar"

SKU3768

Ce este produsul / la ce se foloseste

Alcooltest digital portabil pentru verificarea orientativa a concentratiei de alcool din aerul expirat. Testarea se realizeaza prin suflare fara contact direct cu un mustiuc. Aparatul are senzor de detectie, camera interna de filtrare, afisaj LCD si indicator LED verde/galben/rosu. Afiseaza rezultatele in g/L si %BAC.

Punerea in functiune

1. Incarcati bateria aparatului prin cablul USB furnizat inainte de prima utilizare.
2. Pentru o masurare mai corecta, asteptati minimum aproximativ 20 de minute dupa consumul de alcool.
3. Apasati butonul de pornire pentru initierea aparatului si a preincalzirii.
4. Asteptati aproximativ 10 secunde pana cand aparatul este pregatit pentru testare.
5. Tineti dispozitivul stabil si orientati zona senzorului spre gura, fara contact direct.
6. Suflati constant catre zona senzorului conform indicatiilor aparatului.
7. Asteptati procesarea si afisarea rezultatului pe ecranul LCD.
8. Cititi valoarea afisata in g/L sau %BAC si verificati indicatorul luminos.
9. Verde indica valoare redusa, galben nivel de avertizare, iar rosu nivel ridicat/avertizare.
10. Opriti aparatul dupa utilizare si pastrati-l intr-un loc uscat si protejat.

Tensiuni / alimentare / conditii de utilizare

Baterie reincarcabila incorporata: 300 mAh. Incarcare prin USB. Domeniu de masurare declarat: 0.000-0.199% BAC. Dimensiuni aproximative: 90 x 26 x 25 mm. Pentru rezultate mai relevante, evitati testarea imediat dupa consumul de alcool, alimente, bauturi sau produse care pot contine alcool.

Avertismente de siguranta

Produsul este destinat exclusiv testarii orientative personale. Rezultatele nu inlocuiesc aparatele profesionale omologate sau verificate metrologic si nu trebuie folosite pentru a decide daca este sigur sau legal sa conduceti. Daca ati consumat alcool, nu conduceti. Nu demontati, modificati, loviti sau expuneti produsul si bateria la foc ori temperaturi ridicate. Nu folositi produsul daca este deteriorat. Feriti aparatul de apa si umezeala. Nu lasati produsul si cablul la indemana copiilor.

Frecventa si putere radio

Produsul nu utilizeaza comunicatie radio conform informatiilor disponibile; cerintele privind frecventa si puterea RF nu sunt aplicabile.

Date importator/producer (nume + adresa)

Neoallbet SRL (Techstar);

Sediu social birouri: loc. Bragadiru, judetul Ilfov, Str. Curcubeului, Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 si Etaj Cam 1-5, ZIP: 077025

Declaratia UE de conformitate

https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_4512.pdf