

150x150 mm



SPRAY NAZAL
SOLUȚIE STERILĂ
20 ml

SINOSUN[®]


SPRAY

SINOSUN[®] spray este un dispozitiv medical cu aplicare nazală, conștând într-o soluție hipertonică, sterilă, fără conservanți, cu polisorbato 80 (tween 80), acid hialuronic și EDTA, ambalat într-un flacon de 20 ml.

Datorită acțiunii combinate a polisorbato 80 și EDTA în soluție hipertonică, Sinosun spray este indicat pentru curățarea căilor nazale, în special pentru eliminarea pe cale mecanică a biofilmului bacterian prezent în rinosinuzite cronice sau în răceli, restabilind mecanismul natural de curățare a mucoasei nazale (clearance-ul mucociliar). Prezența acidului hialuronic determină o acțiune emolientă și hidratantă, reduce senzația de uscăciune de la nivelul mucoasei nazale și protejează de agenții iritanți externi, cum ar fi fum, praf, aer uscat și polen, posibile cauze ale reacțiilor alergice sau iritative.

Instrucțiuni de utilizare

1. Agitați ușor flaconul înainte de utilizare
2. Scoateți capacul protector
3. Țineți flaconul cu degetul mare sub bază și duza între două degete
4. La prima utilizare, apăsați pompa de câteva ori până când spray-ul emite un jet uniform
5. Suflați nasul înainte de utilizarea produsului
6. Înclinați ușor capul pe spate și inserați duza în nară
7. Apăsați pe pompă și respirați ușor în același timp
8. După utilizare, curățați duza și închideți cu capacul protector
9. Produsul se va utiliza doar de către un pacient

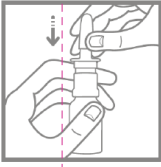

Compoziție

Hialuronat de sodiu, clorură de sodiu (2,5 %), tween 80, EDTA, fosfat disodic dihidrat, fosfat monosodic monohidrat, apă purificată până la 100 ml.



150x150 mm



Ambalaj
Flacon cu 20 ml spray

Atenționări

Consultați medicul pentru utilizare pediatrică sau folosirea de către femeile care sunt însărcinate sau care alăptează.

Produsul este doar de uz inhalator, nu îl înghițiți și nu îl utilizați altfel decât a fost indicat să îl folosiți.

Odată deschis și utilizat, duza trebuie curățată și flaconul închis utilizând capacul protector, iar soluția rămasă se va folosi în 3 luni de la deschidere.

Pentru a evita transmiterea infecțiilor, un flacon va fi folosit doar de către un singur pacient.

Nu folosiți dacă ambalajul e deteriorat sau flaconul nu este perfect intact.

Spălați bine mâinile înainte de utilizarea produsului.

Nu atingeți cu pulverizatorul alte zone, în afara mucoasei nazale.

Nu utilizați produsul în cazul intoleranței chiar și la un singur ingredient din compoziție.

În cazul apariției unui incident cum ar fi sensibilizare sau iritație, în timpul utilizării dispozitivului, opriți imediat tratamentul și consultați un medic.

Administrarea concomitentă cu medicamente de uz inhalator ar trebui făcută sub supravegherea unui medic care poate evalua posibilele interacțiuni.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Nu folosiți produsul după data de expirare indicată pe ambalaj.

Nu aruncați produsul în mediul înconjurător după utilizare.

Păstrați la loc uscat, ferit de surse de căldură și de expunerea directă la soare, în ambalajul original.

Temperatura de păstrare nu trebuie să depășească 25°C.

În cazul unor reclamații sau incidente grave legate de dispozitiv este necesară raportarea acestora producătorului.

Valabilitate

36 luni, în ambalaj intact.

Producător

Enable Innovations SRL
Via Claudio Tolomeo, nr. 20/4
41012 Carpi (MO), Italia

Distribuitor

Ascendis Wellness SRL
Calea Floreasca, nr. 169
Sector 1, București, România
office@sunwavepharma.com

Data ultimei revizuirii a instrucțiunilor de utilizare: Rev. 00 Mai 2018



Simboluri utilizate

STERILE A

	a se citi instrucțiunile de utilizare
	0425 marcaj de conformitate
	a se păstra la temperaturi sub 25°C
	nu aruncați produsul în mediul înconjurător
	a nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat
	soluția din flacon trebuie folosită în 3 luni de la deschidere