

TRIASAB

Orteză pentru abducție a brațului la 45°/60°

Ref. SRT 221

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Dragă utilizatorule!

Îți mulțumim că ai ales produsele Triamed!

Dorim să te informăm că produsele Triamed sunt confecționate din materiale PREMIUM, toate având certificate de calitate și testări de biocompatibilitate.

Produsele Triamed sunt înregistrate la Ministerul Sănătății și sunt conforme cu Specificația tehnică și cu cerințele Regulamentului (UE) MDR 2017/745 al Parlamentului European privind dispozitivele medicale și respectă cerințele prevăzute în Anexa I – Cerințe generale privind siguranța și performanța- și Anexa VIII – Reguli de clasificare. Conformitatea este declarată în baza Articolului 52(7), Anexa II și Anexa III din MDR 2017/745.

Atenție!

Orteza se folosește conform recomandărilor medicului specialist!

Alegerea mărimii - Pentru rezultate optime, mărimea potrivită va fi selectată pe baza tabelului de măsurători de mai jos. O mărime prea mică poate duce la intoleranță la purtare sau la deteriorarea produsului! O dimensiune prea mare scade semnificativ eficacitatea ortezei.

Această orteză trebuie aplicată numai în conformitate cu instrucțiunile menționate aici.

Produsul este destinat utilizării de către un singur pacient.

Mărimi disponibile

Mărimi	1	2	3
Circumferința toracelui și brațului (cm)	90-110	110-130	130-150
Lungime antebrăț și mână, până la baza degetelor (cm)	36	39	43
Referință	SRT221M1	SRT221M2	SRT221M3

Se măsoară circumferința toracelui și brațului

Se măsoară lungimea antebrățului și mâinii, până la baza degetelor.

Orteza poate fi utilizată atât pe brațul stâng cât și pe brațul drept.

Indicații

Se recomandă în chirurgia plastică și reparatorie, ortopedie, postoperator, după traumatisme ale umărului și brațului, fracturi la nivelul articulației scapulohumerale.

Descriere

Orteza este confecționată din 3 componente:

- pernă de susținere a brațului, din spumă poliuretanică (burete), acoperită cu material textil, prevăzută cu două înclinații: 45° și 60°. Fixarea pernei de abducție la nivelul abdomenului se face cu o centură de poziționare prevăzută cu 2 cataramă duble pentru reglaj și un manșon de protecție

- componentă de fixare a antebrățului, din spumă poliuretanică (burete)

- componentă de susținere dinamică a mâinii, opțională (cilindru din spumă poliuretanică de densitate mică, pentru gimnastica pumnului)

- ham de susținere a ortezei pe torace, compus din 4 benzi reglabile prin tăiere și repoziționarea scaiului tip "crocodil", prevăzut cu 2 inele și 2 manșoane de protecție.

Orteza are posibilitatea de fixare în abducție a brațului la 45° sau 60° față de torace, prin modificarea poziției pernei de susținere.

Se poate utiliza atât pe stânga cât și pe dreapta.

Închiderea se face cu scai.

Scop

Orteza stabilizează articulația umărului în abducție, prevenind mișcările nedorite și favorizând vindecarea.

Compoziție

Material textil cașerat. Ansamblul textil cașerat se comportă ca un regulator de umiditate, asigurând un transfer rapid al umidității spre exterior.

Poziționare

Se fixează perna de susținere a brațului între torace și braț, astfel încât unghiul de abducție a brațului să corespundă indicațiilor medicului specialist. Hamul de fixare se va sprijini cu partea centrală pe stern, părțile lungi ale hamului se petrec unul peste umărul sănătos, celălalt subaxilar și vor înconjura spatele, fixându-se pe partea posterioară a pernei. Se fixează la lungimea optimă prin tăierea benzilor și repoziționarea scaiului tip "crocodil". Părțile scurte ale hamului se fixează pe partea anterioară a pernei. Buretele pentru antebrăț și cel pentru pumn se fixează în așa fel încât să permită sprijinirea antebrățului și a palmei pe burete.

Dacă este necesară ajustarea poziției ortezei, ajustarea se face prin deschiderea completă a scaiului și repoziționarea ortezei mai sus sau mai jos pe segmentul de corp, în funcție de necesitate. **Pentru a evita destrămarea materialului, nu se trage de orteza fixată.**



Curățare

Se spală manual cu apă caldă, nu se albește, nu se stoarce mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!

Depozitare

La temperatura camerei, la loc uscat și bine ventilat.

 **Producător**
SC TRIAMED SRL

Producție Calea Buziașului nr. 77, Hall 1-C1/A | Timișoara | Timiș | România

Sediu social Str Cosminului nr.12 | Timișoara | Timiș | România

Telefon 00 40 256 48 73 88

office@triamed.ro | triamed@gmail.com | www.triamed.ro

Ediția 6, Revizia 0 /20.06.2025



CERTIFICAT DE GARANȚIE

Garanția legală de conformitate conform **OUG 140 din 2021** revizuită prin Legea nr.205 din 7 iulie 2023, privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora: **2 ani**

Pentru a corespunde cerințelor de conformitate, bunurile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1. Respectă descrierea, tipul, calitatea și dețin funcționalitatea și alte caracteristici prevăzute în descrierile tehnice ale produsului (catalog, fișă tehnică sau instrucțiuni de utilizare);
2. Corespund scopului pentru care consumatorul le solicită, pe care consumatorul l-a adus la cunoștința vânzătorului și pe care vânzătorul l-a acceptat;
3. Sunt livrate împreună cu toate accesoriile și cu instrucțiunile de utilizare.

Vânzătorul declară că în caz de neconformitate a produsului, consumatorul are dreptul la măsuri corective, fără costuri, conform OUG nr. 140/2021.

Conform dispozițiilor legale, la achiziționarea produsului, vânzătorul are obligația de a explica modul de utilizare și întreținere a produsului furnizat. Cumpărătorul are obligația să verifice integritatea produsului, aspectul exterior și prezența în ambalaj a accesoriilor produsului înainte de finalizarea vânzării. Orice reclamație ulterioară referitoare la lipsa de conformitate din punct de vedere estetic sau de integritate exterioară și care ar fi putut fi sesizată la cumpărare nu va fi luată în considerare.

Garanția comercială a produsului: 30 zile.

Măsurile corective în cazul defectului de fabricație sau deteriorare în garanție

Consumatorul are dreptul de a beneficia de:

1. Reparația produsului;
2. Dacă reparația nu este posibilă sau costurile implicate sunt disproporționale cu valoarea produsului, produsul este înlocuit
3. În cazul în care acțiunile corective de mai sus nu sunt posibile, se returnează clientului suma plătită la achiziționarea produsului;
4. Consumatorii beneficiază de înlocuirea bunurilor în cazul în care neconformitatea acestora este constatată la scurt timp după livrare (7 zile), fără a depăși 30 de zile calendaristice.

Acțiunile corective se efectuează fără costuri pentru cumpărător.

Termen de comunicare a soluționării: 15 zile.

În cazul în care defectul este remediat prin reparație, perioada de timp prevăzută în garanția comercială se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului, din momentul la care a fost adus la cunoștința garantului defectul până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator.

În cazul în care defectul este remediat prin înlocuire, pentru bunurile care înlocuiesc bunurile defecte, perioada de timp prevăzută în garanția comercială începe să curgă de la data înlocuirii.

Data producției: vezi eticheta ambalaj.

Data valabilității: fără termen de expirare.

Pentru validarea garanției, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării.

În cazul returnării unui produs defect cumpărătorul se adresează direct vânzătorului de la care a achiziționat produsul.

Cumpărătorul este obligat să păstreze și să prezinte împreună cu produsul defect următoarele:

1. Ambalajul individual al produsului
2. Bonul fiscal sau factura primită la achiziția produsului
3. Talonul de garanție inclus în instrucțiunea de utilizare.

În cazul în care produsul a fost achiziționat direct de la producător (TRIAMED SRL), sesizările și reclamațiile se pot trimite online, pe adresa de mail: suportclienti@triamed.ro.

TALON DE GARANȚIE 30 zile de la data cumpărării produsului	Lotul și data fabricației:
Referința produsului:	Data cumpărării:
Motivul sesizării/reclamației:	Semnătura și ștampila vânzătorului

SR EN ISO 9001:2015
SR EN ISO 13485:2016



Producător
SC TRIAMED SRL

Producție Calea Buziașului nr. 77, Hall 1-C1/A | Timișoara | Timiș | România

Sediu social Str Cosminului nr.12 | Timișoara | Timiș | România

Telefon 00 40 256 48 73 88

office@triamed.ro | triamed@gmail.com | www.triamed.ro

Ediția 6, Revizia 0 /20.06.2025