

Instrucțiuni de utilizare

CameleonX

Material universal pentru restaurări – fotopolimerizabil

CameleonX este un compozit fotopolimerizabil, radioopac, potrivit pentru restaurări anterioare și posterioare. CameleonX poate fi folosit pentru toate nuanțele naturale ale dinților datorită proprietăților sale de potrivire continue. În afară de lucii permanent și opalescența naturală, CameleonX deține proprietăți fizice excelente și o manevrabilitate foarte bună. Lustruirea sa necesită un efort minim. CameleonX conține rășină dimetacrilat și conținut anorganic <0.2μm. Conținutul de umplere este de 80% ca și greutate, și 75% ca volum.

Radioopacitatea materialului CameleonX este de 200% aluminiiu (radioopacitatea smalțului : ~200 % aluminiiu, a dentinei ~100% aluminiiu)

Proprietățile materialului CameleonX îndeplinesc standardele cerute ISO4049, tip 1, clasa 2, grup 1.

Indicații pentru CameleonX

- Restaurări pentru toate tipurile de cavități
- Fațete directe
- Închideri de diasteme
- Reparații ale restaurărilor ceramice (fațete, coroane)

Efecte secundare

Nu pot fi excluse iritațiile generate de contactul direct cu gingia. De aceea, pulpa trebuie protejată prin acoperire cu material specific. (ex. MTAcap LC)

Incompatibilitatea cu alte materiale

Nu se folosește în combinație cu alte substanțe ce conțin eugenol pentru că acesta oprește polimerizarea compozitului. Nu trebuie depozitat alături de materiale ce conțin eugenol și trebuie evitat contactul cu aceste materiale.

Pregătirea dintelui

Curățați cavitatea orală cu pastă de polșare fără fluor (ex. Pudra ponce cu apă) înainte de pregătirea și de potrivirea culorii.

Pregătirea cavității

După izolare (preferabil cu digă de cauciuc), pregătiți cavitatea prin reducere minimă.

Pentru protecția pulpei și a zonelor apropiate, acestea trebuie acoperite cu un material de protecție (ex. MTAcapLC). Urmați instrucțiunile produselor utilizate.

Aplicați un sistem adeziv comun pentru smalț și dentină conform instrucțiunilor producătorului.

Sistemele adezive recomandate sunt Quickbond plus care este autodecapant, fotopolimerizabil sau X-bond prin tehnica de gravare totală în combinație cu Xacid.

Aplicarea și tratarea cu CameleonX

În cazul cavităților adânci sau extinse, rezultatele cele mai bune se obțin prin construirea unui liner folosind ciment cu rășină fotopolimerizabilă sau un compozit fluid fotopolimerizabil (ex. NanoFill X Flow), urmat de aplicarea de CameleonX.

În cazul cavităților mici, se poate aplica CameleonX direct.

Notă:

În cazul dinților decolorați sau a cavităților închise la culoare, folosiți un blocker (ex. Mask LC) pentru a vă asigura că restaurarea nu rămâne întunecată.

Aplicați CameleonX în straturi de maxim 2mm. Tratați cu lampa foto fiecare strat separat. CameleonX este ușor de modelat. Așezați-l folosind un instrument potrivit. Se pot utiliza benzi matrice.

Folosind un unit pentru polimerizare (cu undă între 400-500nm) cu intensitatea luminii de minim 1000mW/cm², tratați fiecare strat separat timp de 20 de secunde.

Apropiati lampa cât de mult posibil de materialul de restaurare.

Finisarea

În funcție de forma zonei, conturați cu o freză diamantată, discuri flexibile de modelare sau cu freza cu carbid.

Pentru un luciu intens folosiți discuri sau perii de polșare.

Depozitarea

Nu depozitați produsul la temperatură de peste 25°C (77°F). Evitați expunerea directă la soare. Nu folosiți produsul după expirarea termenului de valabilitate.

Aplicarea – vârfurile sunt de unică folosință.

Note adiționale/Atenționări

- Lumina ambientală a unitului dentar poate declanșa polimerizarea compozitului.
- Nu folosiți rășină pentru a ajusta vâscozitatea compozitului pentru restaurare.
- Evitați contactul cu ochii, pielea și cu membranele mucoase.
- Compozitul nepolimerizat poate avea efect iritativ și poate duce la sensibilitate la metacrilati.
- Mănușile medicale comerciale nu protejează împotriva sensibilității la metacrilati.

Garanția

P.L. Superior Dental Materials GmbH garantează că acest produs nu va avea defecte nici de material, nici de fabricație. P.L. Superior Dental Materials GmbH nu asigură nici o altă garanție provenită din vânzare sau din utilizare într-un anumit scop. Utilizatorul este singurul responsabil în determinarea scopului pentru care va folosi produsul. Dacă produsul este defect în perioada garanției, singura obligație ce îi revine producătorului P.L. Superior Dental Materials GmbH este să repare sau să înlocuiască produsul.

Limitarea responsabilității

În afara cadrului legal, P.L. Superior Dental Materials GmbH nu va fi răspunzător pentru daunele produse de material, direct, indirect, special, accidental sau pe cale de consecință, indiferent de teoria afirmată, inclusiv garanție, contract, din neglijență sau răspundere.

Nu lăsați la îndemâna copiilor!

Numai pentru uz dentar!



CE 0482

Manufacturer: P.L. Superior Dental Materials GmbH, 22607 Hamburg, Germany

Distributor: Nastimed Serv S.R.L., Cluj-Napoca,
Str. M. Eminescu, Nr.1, Romania